

It

Adaptyvusis neįgaliojo vežimėlis

Modelis 2.360 SMART F

Modelis 2.370 SMART S

Naudojimo instrukcija



MEYRA®

Turinys

Naudojamo ženklavimo reikšmė	6
Įvadas	6
Modelių sąrašas	6
Indikacijos / kontraindikacijos	6
Įsigijimas	7
Paskirtis	7
Naudojimas	7
Neįgaliojo vežimėlio sulankstymas / išlankstymas / nešimas	8
Pritaikymas	8
Derinimas su kitų gamintojų gaminiais	9
Pakartotinis naudojimas	9
Naudojimo trukmė	9
Apžvalga	10
Modelis 2.360	10
Apžvalga	11
Modelis 2.370	11
Stabdys	12
Spaudžiamasis stabdys naudotojui	12
Stabdžių užfiksavimas	12
Stabdžių atlaisvinimas	12
Darbiniai stabdžiai	12
Sparnuotasis stabdys naudotojui	13
Stabdžių užfiksavimas	13
Stabdžių atlaisvinimas	13
Darbiniai stabdžiai	13
Viena ranka valdomas stabdys	13
Viena ranka valdomo stabdžio ypatybės	13
Lydinčiojo asmens valdomas būgninis stabdys	14
Darbinio stabdžio funkcija	14


Kojų atramos	15
Blauzdos diržas, modelis 2.370	15
Blauzdų diržo nuėmimas	15
Blauzdų diržo uždėjimas	15
Blauzdų diržo ilgio nustatymas	15
Kulnų diržas	15
Kulnų diržo ilgio nustatymas	15
Blauzdos diržas, modelis 2.360	16
Blauzdų diržo nuėmimas	16
Blauzdų diržo uždėjimas	16
Blauzdų diržo ilgio nustatymas	16
Kojų atramos apatinė dalis, modelis 2.370	17
Pėdų plokštelės	17
Pėdų plokštelė	17
Kojų atramos apatinė dalis, modelis 2.360	18
Pėdų plokštelė	18
Kojų atramos viršutinė dalis, modelis 2.370	19
Kojų atramų pasukimas į išorę	19
Kojų atramų pasukimas	20
Kojų atramų nuėmimas	21
Kojų atramų įkabinimas	21
Mechaninė reguliuojamo aukščio kojų atrama	22
Kojų atramos pakėlimas / nuleidimas	22
Porankiai	23
Porankio nuėmimas	23
Porankio įstatymas	24
Porankio užlenkimas į viršų	25
Porankio aukščio reguliavimas	25
Drabužių apsauga	26
Drabužių apsauga su porankiu	26
Stūmimo strypas	27
Stūmimo rankenos	28

Ratai	29
Varantieji ratai	29
Manevravimo ratukai	29
Atraminiai ratukai	30
Atraminių ratukų pasukimas	30
Specialūs reikalavimai naudojant ratus su dvigubais stumiamaisiais ratlankiais	31
Neįgaliojo vežimėlio valdymas	31
Dvigubo stumiamojo ratlankio sulankstymas / išlankstymas	31
Galvos atrama	32
Terapijoms skirta plokštė	32
Prilaikymo diržas	33
Pagrindinės saugos nuorodos	34
Lydintysis asmuo	34
Persėdimas iš neįgaliojo vežimėlio	34
Daiktų siekimas	35
Nuokalnės, įkalnės arba pasviras važiavimo kelias	35
Kliūčių įveikimas	36
Neįgaliojo vežimėlio pakrovimas	36
Transportavimas transporto priemonėse	37
Tuščio neįgaliojo vežimėlio apsauga transportuojant	37
Asmenų gabenimas transporto priemone	37
Pervežimas viešuoju transportu	37
Važiavimas viešaisiais keliais	38
Valymas	38
Dengiamasis sluoksnius	39
Dezinfekavimas	39
Remonto darbai	39
Remontas	39
Priežiūra	39
Atsarginės dalys	39
Nuorodos, jei nenaudojama ilgesnį laiką	40
Utilizavimas	40

Techninė priežiūra	40
Techninės priežiūros darbai	40
Techninės priežiūros planas	41
Techniniai duomenys	43
Padangų pripildymo slėgis naudojant pneumatines padangas	43
Taikyti standartai	43
Modelio „2.360 Smart F“ duomenys pagal ISO standartą	44
Kiti modelio „2.360 Smart F“ techniniai duomenys	45
Modelio „2.370 Smart S“ duomenys pagal ISO standartą	46
Kiti modelio „2.370 Smart S“ techniniai duomenys	47
Plovimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė	48
Prie neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė	49
Identifikacinėje plokštelėje pateiktų simbolių reikšmė	50
Patikros patvirtinimas	51
Atsakomybė už trūkumus / garantija	52
Atsakomybės už trūkumus / garantijos skirsnis	53
Patikros patvirtinimas norint perduoti	53
Užrašams	54

NAUDOJAMO ŽENKLINIMO REIKŠMĖ

Privaloma laikytis tam tikra spalva pažymėtų saugos nuorodų!

-  Šiuo simboliu žymimos nuorodos ir rekomendacijos.
- [] Nuoroda į paveikslėlio numerį.
- () Nuoroda į paveikslėlyje pavaizduotus funkcinis elementus.


ĮVADAS

Prieš pradėdami eksploatuoti pirmą kartą perskaitykite šį dokumentą.

Vaikai ir jaunuoliai prieš važiuodami vežimėliu pirmą kartą šį dokumentą turėtų perskaityti kartu su tėvais arba prižiūrimi prižiūrėtojo ar lydinčiojo personalo.

Jūsų platintojas turėtų Jus papildomai instrukuoti, kaip naudoti šį neįgaliojo vežimėlį.

Pateikta eksploatavimo instrukcija padės Jums susipažinti su neįgaliojo vežimėlio naudojimu ir išvengti nelaimingų atsitikimų.

-  Vaizduojami įrangos variantai gali neatitikti Jūsų modelio.

Tam yra paruoštas skyrius su parinktimis, kurių gali nebūti Jūsų pasirinktame neįgaliojo vežimėlyje. Tiekiamų parinkčių ir priedų sąrašą rasite savo neįgaliojo vežimėlio užsakymo formoje.

Regėjimo negalią turintys asmenys šiuos PDF formatu pateikiamus failus su papildoma informacija apie mūsų gaminius ras mūsų interneto svetainėje adresu:

< www.meyra.com >.

-  Jei reikės, kreipkitės į platintoją.

Naudotojai su regos sutrikimu gali paprašyti, kad dokumentus perskaitytų padėjėjas.

Reguliariai pasidomėkite informacija apie gaminio saugą ir galimas mūsų gaminių atšaukimo akcijas, kuri pateikiama mūsų interneto svetainės skirtuke < *Information center* > (Informacijos centras) adresu: < www.meyra.com >.

Mes sukūrėme gaminį, kuris atitinka medicinos prietaisams keliamus techninius ir įstatymų reikalavimus. Norėdami pranešti apie sunkius nenumatytus įvykius, kurių vis dėlto nepavyksta išvengti, rašykite mūsų el. pašto adresu < info@meyra.de > ir informuokite kompetentingą šalies narės įstaigą.

MODELIŲ SĄRAŠAS

Ši naudojimo instrukcija skirta toliau nurodytiems modeliams:

Modelis 2.360 (nuožulni priekinė dalis)

Modelis 2.370 (tiesi priekinė dalis)

INDIKACIJOS / KONTRAINDIKACIJOS

Atsiradus alerginėms reakcijoms, odos paraudimui ir (arba) nuspaudimui naudojant neįgaliojo vežimėlį būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Siekiant išvengti kontaktinės alergijos, rekomenduojame neįgaliojo vežimėlį naudojant uždengti uždangalu.

Neįgaliojo vežimėlis yra tinkama pagalba turint didelę judėjimo negalią ar esant smarkiai apribotoms galimybėms vaikščioti, pvz.:

- paralyžius,
- kūno dalių defektai ar deformacijos,
- prarastos kūno dalys,
- sąnarių pažeidimai ar kontraktūros,
- kiti susirgimai (žymi, visiška judėjimo negalia / negalėjimas vaikščioti dėl struktūrinių ir (arba) funkcinų apatinių

galūnių pažeidimų, taip pat dėl amputacijos, susižalojimo pasekmių, dėl kaulų ir raumenų ligų atsiradus judesių sutrikimams ir pan.).

Neįgaliojo vežimėliu negalima naudotis negebant sėdėti.

Neįgaliojo vežimėliu be lydinčiojo asmens naudotis draudžiama:

- turint nekontroliuojamą pusiausvyros sutrikimą,
 - suvokimo sutrikimą,
 - netekus didelės abiejų rankų dalies,
 - esant abiejų rankų sąnarių kontraktūroms / pažeidimams,
 - esant daliniam arba visiškam aklumui.
- ☞ Dėl šių ir kitų galimų rizikų naudojant gaminį pasitarkite su savo gydytoju, terapeutu ar platintoju.

ĮSIGIJIMAS

Savo gamykloje mes patikriname kiekvieno gaminio kokybę ir supakuojame jį į specialią kartoninę dėžę.

- ☞ Tačiau mes norėtume paprašyti gavus neįgaliojo vežimėlį, geriausia dar neišvykus atgabenusiam asmeniui, patikrinti, ar transportuojant nebuvo padaryta žalos.
- ☞ Reikėtų išsaugoti neįgaliojo vežimėlio pakuotę, kad prireikus transportuoti būtų galimą ją panaudoti ir vėliau.

PASKIRTIS

Ši vežimėlių grupė naudojama savarankiškai judėti asmenims arba važiuoti vežant lydinčiam asmeniui.

NAUDOJIMAS

Nelieskite besisukančių ratų stipinų ir riedėjimo paviršių. – Pavojus susižaloti!

Varydami neįgaliojo vežimėlį neikiškite rankų tarp spaudžiamojo stabdžio ir padangų. – Pavojus susižaloti!

Stenkitės nevaryti neįgaliojo vežimėlio per smarkiai. – Kyla pavojus persiversti arba pakrypti!

Nenaudokite neįgaliojo vežimėlio, jei nesumontuotos kojų atramos bei rankturių bloka!

Didesnio nei 500 mm sėdynės pločio neįgaliojo vežimėlis nepritaikytas transportuoti traukiniu.

Neįgaliojo vežimėlis naudojamas ant lygaus, tvirto pagrindo ir gali būti pritaikytas, kaip aprašyta toliau:

- vidaus patalpose (pvz., bute, dienos centre),
- lauke (pvz., važiuoti sutvirtintais parkų keliais),
- kaip pagalbinė priemonė keliaujant (pvz., autobusu ir traukiniu),
- ☞ Tam tikrų matmenų (bendrojo aukščio, bendrojo pločio, bendrojo ilgio, sukimosi trajektorijos) neįgaliojo vežimėliai nėra pritaikyti transportuoti traukiniu.
- ☞ Prieš transportuodami pasidomėkite galimais apribojimais.
- Transportuoti lėktuvu leidžiama tik primontavus PU padangas.
- ☞ Prieš transportuodami pasidomėkite galimais skrydžių bendrovės taisyklėmis apribojimais.
- Apsaugokite neįgaliojo vežimėlį nuo ekstremalių temperatūrų ir kenksmingų oro sąlygų, pvz., saulės spindulių, didelio šalčio, druskingo vandens.

- Smėlis ir kitokios nešvarumų dalelės gali užblokuoti judančias dalis, todėl jos neveiks.
- Neįgaliojo vežimėlį varykite tik sukdami varančiųjų ratų stumiamuosius ratlankius.

Neleiskite Jūsų nešti neįgaliojo vežimėlyje jį pakeliant nuo žemės. Gali atsilaisvinti nepriktvirtintos konstrukcinės dalys, pvz., šoninės dalys arba kojų atramos, todėl kyla pavojus iškristi.

Neįgaliojo vežimėlį naudokite tik pagal skyriuje skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 43 psl. pateiktas specifikacijas ir laikydamiesi ribinių verčių.

NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO SULANKSTYMAS / IŠLANKS- TYMAS / NEŠIMAS

Jūsų neįgaliojo vežimėlis sulankstomas be įrankių.

- ☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!
 1. Nuimkite sėdynės pagalvėlę, jei ji yra.
 2. Nuimkite kojų atramas arba į viršų užlenkite abi pėdų plokšteles.
 3. Priekyje ir gale per vidurį esantį sėdynės diržą patraukite į viršų.
 - ☞ Jei naudojamos papildomos pavaros (pavaros rato stebulėje), sulankstydami neįgaliojo vežimėlį pakreipkite jį į šoną.
 4. Jei reikia, nuimkite dvigubo stumiamojo ratlankio pavaros jungiamąjį strypą arba stūmimo strypą.

Sulankstytą neįgaliojo vežimėlį galima nešti.

Tam iš priekio per apačią įkiškite dilbį į sulankstytą sėdynės diržą. Kad būtų lengviau,

kitą ranką įkiškite po galine sėdėjimo diržo kilpa.

Pakelkite neįgaliojo vežimėlį horizontaliai.

Norėdami išlankstyti neįgaliojo vežimėlį, šiek tiek pakreipkite jį į šoną. Pusėje, kuri pastatyta ant žemės, sėdynės vamzdį stumkite iki galo žemyn.

- ☞ Tai atliekant gali prireikti abu sėdynės vamzdžius paspausti ranka.
- ☞ Įsitinkinkite, kad sėdynės vamzdis tinkamai įsistatė į atramą.

PRITAIKYMAS

Pritaikymo, nustatymo ir remonto darbus leidžiama atlikti tik platintojui.

Neįgaliojo vežimėlį galima pritaikyti pagal individualius naudotojo kūno matmenis. Prieš naudojant pirmą kartą, neįgaliojo vežimėlį turi pritaikyti platintojas, kuris turėtų informuoti ir apie Jūsų neįgaliojo vežimėlio funkcijas. Tai atliekant atsižvelgiama į naudotojo mokėjimą važiuoti, fizines savybes ir pagrindinę neįgaliojo vežimėlio naudojimo vietą. Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą patikrinkite neįgaliojo vežimėlio funkcijas.

- ☞ Mes rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar neįgaliojo vežimėlis tinkamai pritaikytas, kad būtų galima vežimėlį naudoti ilgą laiką ir optimaliai net ir pasikeitus naudotojo ligos / neįgalumo aplinkybėms. Augantiems asmenims rekomenduojama pritaikyti kas 6 mėnesius.

DERINIMAS SU KITŲ GAMINTOJŲ GAMINIAIS

Bet koku būdu atliekamas neįgaliojo vežimėlio derinimas su kitų gamintojų tiekiamais komponentais traktuojamas kaip neįgaliojo vežimėlio konstrukcijos pakeitimas. Norėdami priderinti kitus komponentus, kreipkitės į mus, kad sužinotumėte, ar tai yra įmanoma.

Papildomos ir priekyje jungiamos pavaros

Įmontavus papildomas ir priekyje jungiamas pavaras ženkliai pasikeičia neįgaliojo vežimėlio konstrukcija. Atlikus pakeitimus neįgaliojo vežimėlio atitikties deklaracija netenka galios.

- ☞ Papildomos arba priekyje jungiamos pavaros tiekėjas privalo pateikti šio derinio atitikties galiojančią Medicinos prietaisų direktyvai / Medicinos prietaisų reglamentui patvirtinimą. Tiekėjas taip atsako už dokumentus, kurie turi būti pridedami prie medicininių gaminių derinio.

PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS

Neįgaliojo vežimėlį galima naudoti pakartotinai. Neįgaliojo vežimėlio modulinę konstrukciją galima pritaikyti esant įvairiems neįgalumo pobūdžiams ir kūno gabaritams. Prieš kiekvieną pakartotinį naudojimą reikia kruopščiai patikrinti visą neįgaliojo vežimėlio konstrukciją.

- ☞ Prieš pakartotinį naudojimą reikia imtis būtinų, patvirtintame higienos plane nurodytų higienos priemonių bei dezinfekuoti.

Platintojui skirtoje priežiūros instrukcijoje pateikiama informacijos apie Jūsų neįgaliojo vežimėlio pakartotinį naudojimą ir apie tai,

kiek kartų vežimėlį galima naudoti pakartotinai.

NAUDOJIMO TRUKMĖ


Mes numatėme, kad Jūsų neįgaliojo vežimėlis turėtų būti naudojamas vidutiniškai 4 metus, jei jis būtų naudojamas pagal paskirtį bei atliekant visus nurodytus techninės priežiūros ir apžiūros darbus. Jūsų neįgaliojo vežimėlio naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo dažnumo, naudojimo aplinkos ir jo priežiūros. Naudojant atsargines dalis neįgaliojo vežimėlio naudojimo trukmė gali būti ilgesnė. Atsarginių dalių dažniausia galima įsigyti dar 5 metus nuo gaminių gamybos pabaigos.

- ☞ Nurodytos naudojimo trukmės negalima traktuoti kaip papildomos garantijos.

APŽVALGA

Modelis 2.360

Apžvalgoje pateikiami svarbiausi visų neįgaliojo vežimėlio modelių komponentai.

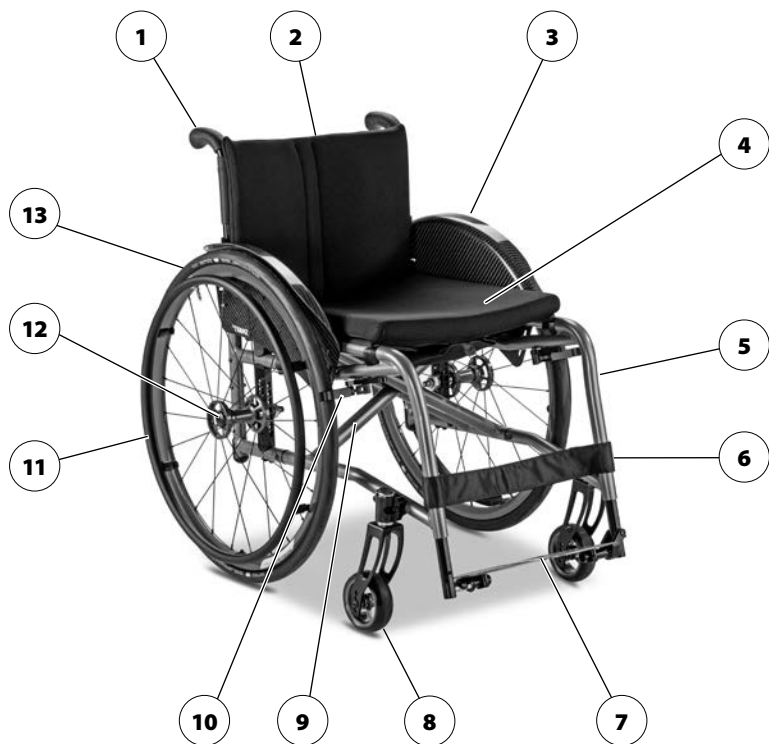


Poz. Pavadinimas

- | | |
|---|---|
| (1) Stūmimo rankena | (8) Vairuojamasis ratas |
| (2) Nugaros atlošas | (9) Identifikacinė plokštelė |
| (3) Drabužių apsauga | (10) Stabdymo svirtis – spaudžiamasis stabdys |
| (4) Sėdynės diržas / sėdėjimo pagalvėlė | (11) Stumiamieji ratlankiai |
| (5) Nuožulni priekinė dalis | (12) Užfiksavimo mygtukas įstatomojoje ašyje |
| (6) Blauzdos diržas | (13) Varantysis ratas |
| (7) Pėdų atrama / pėdų plokštelės, padalyta | |

APŽVALGA

Modelis 2.370

Apžvalgoje pateikiami svarbiausi visų neįgaliojo vežimėlio modelių komponentai.

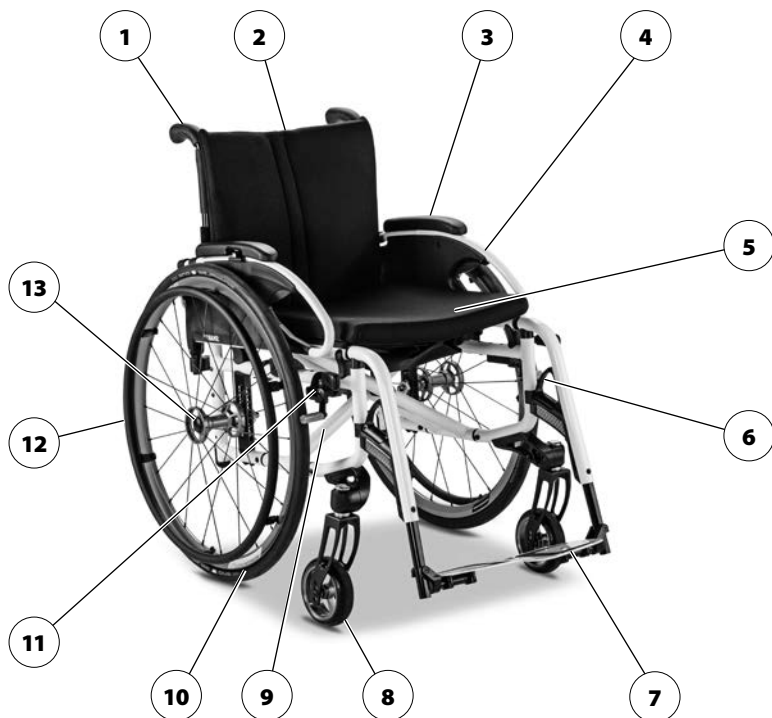

Poz. Pavadinimas

- | | |
|---|---|
| (1) Stūmimo rankena | (8) Vairuojamasis ratas |
| (2) Nugaros atlošas | (9) Identifikacinė plokštelė |
| (3) Porankis | (10) Varantysis ratas |
| (4) Drabužių apsauga | (11) Stabdymo svirtis – spaudžiamasis stabdys |
| (5) Sėdynės diržas / sėdėjimo pagalvėlė | (12) Stumiamieji ratlankiai |
| (6) Kojų atramos fiksavimo svirtis | (13) Užfiksavimo mygtukas įstatomojoje ašyje |
| (7) Pėdų atrama / pėdų plokštelės, padalyta | |

STABDYS

Sumažėjus stabdymo galiai būtina nedelsiant kreiptis į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų stabdį.

Neįgaliojo vežimėlius su PU (poliuretano) padangomis statant ilgesniam laikui, reikėtų neįjungti spaudžiamųjų stabdžių, nes gali atsirasti liekamųjų eigos paviršių deformacijų.

Užfiksavus stabdžius stabdymo svirtimi (1), neįgaliojo vežimėlis (stovėjimo stabdžiu) yra apsaugotas nuo netikėto nuriudėjimo.

Atsižvelgiant į konstrukciją, neįgaliojo vežimėlyje gali būti įrengti spaudžiamieji stabdžiai [2] arba būgniniai stabdžiai [3].

Spaudžiamasis stabdys naudotojui

Stabdžių užfiksavimas

Norėdami užfiksuoti neįgaliojo vežimėlį, kad jis nepradėtų riedėti netikėtai, abi stabdymo svirtis pastumkite iki galo į priekį [4].

- ☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!
- ☞ Užfiksavus stabdžius negali būti įmanoma pastumti neįgaliojo vežimėlį.



Stabdžių atlaisvinimas

Abi stabdžių svirtis atlenkite iki galo atgal [2].

Darbiniai stabdžiai

Neįgaliojo vežimėlis stabdomas stumiamaisiais ratlankiais.

- ☞ Stabdant neįgaliojo vežimėlį reikėtų mūvėti tinkamas pirštines.

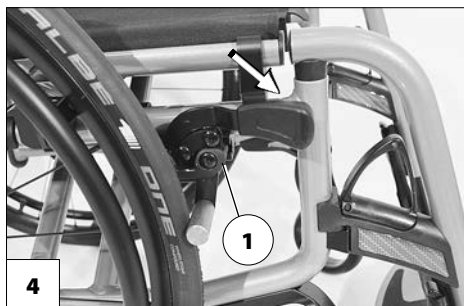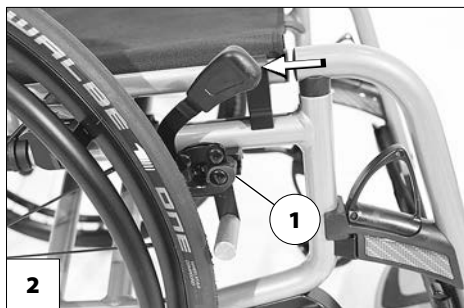


Sparnuotasis stabdys naudotojui

Stabdžių užfiksavimas

Norėdami užfiksuoti neįgaliojo vežimėlį, kad jis nepradėtų riedėti netikėtai, abi stabdymo svirtis pastumkite į išorę [2].

- ☞ Užfiksavus stabdžius negali būti įmanoma pastumti neįgaliojo vežimėlį.

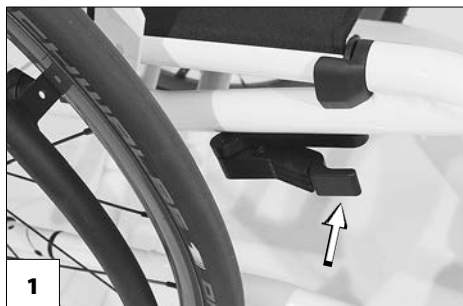

Stabdžių atlaisvinimas

Abi stabdžių svirtis atlenkite iki galo į vidų [1].

- ☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!

Darbiniai stabdžiai

Neįgaliojo vežimėlis stabdomas stumiamaisiais ratlankiais.

- ☞ Stabdant neįgaliojo vežimėlį reikėtų mūvėti tinkamas pirštines.



Viena ranka valdomas stabdys

Viena ranka valdomas stabdys [3] suteikia galimybę užfiksuoti stabdį naudojant tik vieną stabdymo svirtį.

Viena ranka valdomo stabdžio ypatybės

Visiškai į viršų ištrauktą vieną ranka valdomo stabdžio stabdymo svirtį galima užlenkti atgal [4].

- ☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!



Lydinčiojo asmens valdomas būgninis stabdys

Lydintysis asmuo būgninį stabdį aktyvina stabdymo svirtimi [1].

Darbinio stabdžio funkcija

Norėdami neįgaliojo vežimėlį pristabdyti, tolygiai šiek tiek paspauskite abi stabdymo svirtis.




Būgninių stabdžių užfiksavimas

Patraukite abu stovėjimo stabdžius [1] ir į priekį pastumkite fikساتorius (2).

☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!

Atleiskite stabdymo svirtį. – Atsižvelgiant į nustatymą, fikсаторius užfiksuoja pirmojoje (A) arba antrojoje (B) užfiksavimo padėtyje ir užfiksuoja stabdį.

☞ Jei reikia stabdį užfiksuoti trečioje užfiksavimo padėtyje (C), tuomet stabdys turi būti pareguliuotas specializuotose dirbtuvėse.

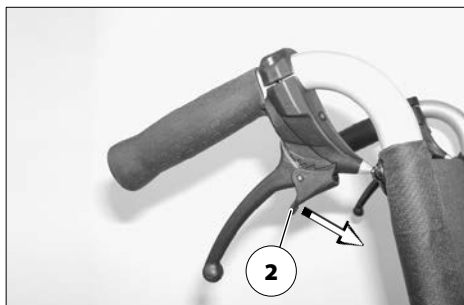


Būgninių stabdžių atfiksavimas

Traukite abi stabdymo svirtis [1] tol, kol fikсаторius (2) savaime atsilaisvins iš blokavimo vietų.

☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!

Atfiksukite abi valdymo svirtis. – Stovėjimo stabdžiai atfiksuoti ir neįgaliojo vežimėlis vėl gali važiuoti.

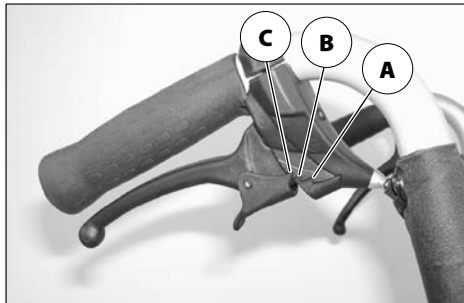

KOJŲ ATRAMOS

Prieš pradėdant reguliuoti kojų atramas, reikia apsaugoti neįgaliojo vežimėlį nuo netikėto pariedėjimo.

- Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Stabdys*, 12 psl..

Blauzdos diržas, modelis 2.370

Draudžiama važiuoti neuždėjus blauzdos diržo. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

Nuimamasis blauzdos diržas (1) apsaugo, kad pėdos nenuslystų nuo pėdų atramos.

- Norint pasukti kojų atramą, reikia nuimti blauzdų diržą.
- Blauzdų diržas nenaudojamas montuojant reguliuojamo aukščio kojų atramas. Vietoje diržo naudojamas minkštinamasis blauzdų elementas.



Blauzdų diržo nuėmimas

Norint nuimti blauzdų diržą, jis numaunamas nuo laikantiųjų strypelių (2).

Blauzdų diržo uždėjimas

Uždėdant abiejose blauzdų diržo pusėse esančios kilpos užmaunamos ant laikantiųjų strypelių (2).



Blauzdų diržo ilgio nustatymas

Norint nustatyti ilgį, blauzdų diržas apvedamas aplink laikantįjį strypelį (2) ir nustačius reikiamą ilgį užfiksuojamas lipuku.

Kulnų diržas

Kulnų diržas (3) neleidžia pėdoms nuslysti atgal nuo pėdų plokštelių.

Kulnų diržo ilgio nustatymas

Nustatant ilgį, kulnų diržas apvedamas aplink laikantįjį strypelį (2) ir nustačius reikiamą ilgį užfiksuojamas lipuku.

Blauzdos diržas, modelis 2.360

Draudžiama važiuoti neuždėjus blauzdos diržo. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

Nuimamasis blauzdos diržas (1) apsaugo, kad pėdos nenuslystų nuo pėdų atramos.

- ☞ Norint pasukti kojų atramą, reikia nuimti blauzdų diržą.
- ☞ Blauzdų diržas nenaudojamas montuojant reguliuojamo aukščio kojų atramas. Vietoje diržo naudojamas minkštinamasis blauzdų elementas.




Blauzdų diržo nuėmimas

Norėdami nuimti blauzdų diržą, atsekite lipuką (2).

Blauzdų diržo uždėjimas

Norėdami pritvirtinti, apjuoskite blauzdos diržą aplink įstrižąjį rėmo vamzdį [3] ir prisekite lipuku (2).

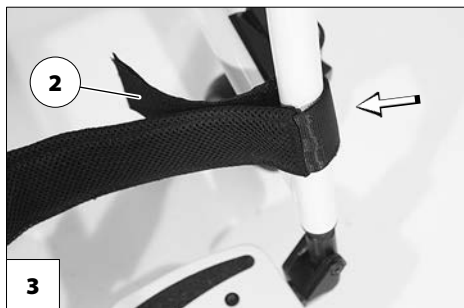

Blauzdų diržo ilgio nustatymas

Norint nustatyti ilgį, blauzdų diržas apvedamas aplink įstrižąjį rėmo vamzdį [3] ir nustatytus reikiamą ilgį užfiksuojamas lipuku (2).

Kojų atramos apatinė dalis, modelis 2.370

Norint įsisėsti arba atsistoti, reikia į viršų atlenkti pėdų plokšteles arba pėdų atramą [1].

- ☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!
 - Nuimkite abi kojas nuo pėdų plokštelių.
 - Nuimkite blauzdų diržą, jei yra.
 - ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Blauzdos diržas, modelis 2.370, 15 psl.*
- ☞ Prieš pradėdant važiuoti reikia vėl žemyn užlenkti pėdų plokšteles arba pėdų atramą [2] ir pritvirtinti blauzdų diržą.

Pėdų plokštelės

Pėdų plokšteles galima atlenkti į išorę aukščiau [1] arba į vidų žemyn [2].

Pėdų plokštelė


Prieš pasukant ir nuimant kojų atramos viršutinę dalį reikia į viršų užlenkti pėdų atramą [3].

Pėdų atramos atlenkimas

Norėdami atlenkti pėdų atramą, iki galo į viršų užlenkite nepritvirtintą pėdų atramos pusę [3].

Pėdų atramos užlenkimas

Norėdami užlenkti pėdų atramą, lenkite nepritvirtintą pėdų atramos pusę iki galo žemyn ant pėdų atramos laikiklio [4].

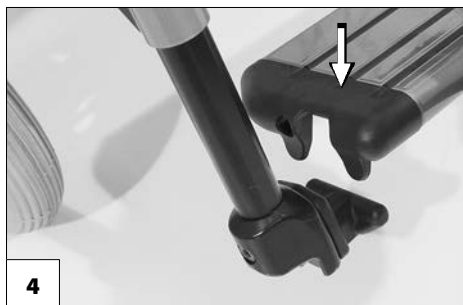

Kojų atramos apatinė dalis, modelis 2.360

Norint įsisėsti arba atsistoti, reikia į viršų atlenkti pėdų plokštelės arba pėdų atramą [1].

☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!

– Nuimkite abi kojas nuo pėdų plokštelių.

– Nuimkite blauzdų diržą, jei yra.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Blauzdos diržas, modelis 2.360, 16 psl.*

☞ Prieš pradėdant važiuoti reikia vėl nuleisti pėdų plokštelę [3] ir pritvirtinti blauzdų diržą.

Pėdų plokštelė


Prieš įlipat į neįgaliojo vežimėlį ir išlipant iš jo galima atlenkti pėdų plokštelę į viršų [4].

Pėdų atramos atlenkimas

Norėdami atlenkti pėdų atramą, iki galo į viršų užlenkite nepritvirtintą pėdų atramos pusę [4].

Pėdų atramos užlenkimas

Norėdami užlenkti pėdų atramą, lenkite nepritvirtintą pėdų atramos pusę iki galo žemyn ant pėdų atramos laikiklio [5].

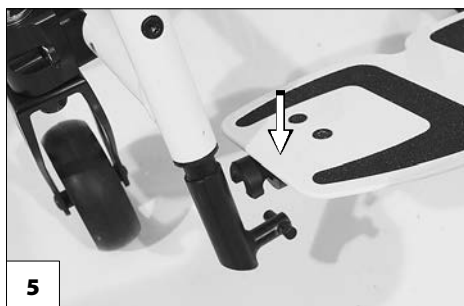

Kojų atramos viršutinė dalis, modelis 2.370

Kojų atramos viršutinė dalis su įstatyta kojų atramos apatine dalimi vadinama kojų atrama.

Kojų atramų pasukimas į išorę

Pasuktos kojų atramos automatiškai atfiksuojamos ir gali lengvai iškristi. Į tai atkreipkite dėmesį atlikdami tolesnius veiksmus (pvz., transportuodami).

Kad būtų lengviau atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį / iš jo išlipti bei privažiuoti arti, pvz., prie spintos, lovos ar vonios, kojų atramą galima pasukti į vidų / išorę [1].



☞ Prieš pasukdami kojų atramą, nuimkite blauzdų diržą, jei jis yra.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Blauzdos diržas, modelis 2.370, 15 psl.*

Norėdami pasukti kojų atramas, užlenkite į viršų pėdų plokšteles arba pėdų atramą.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramos apatinė dalis, modelis 2.370, 17 psl.*

Paskui norėdami užfiksuoti patraukite atitinkamą svirtį (2) atgal arba ją paspauskite ir atlenkite atitinkamą kojų atramą.

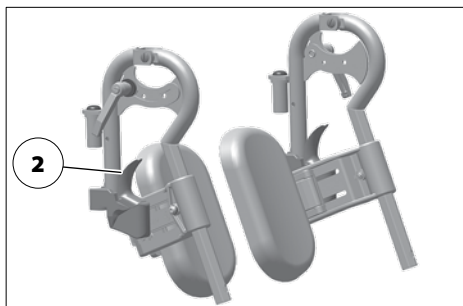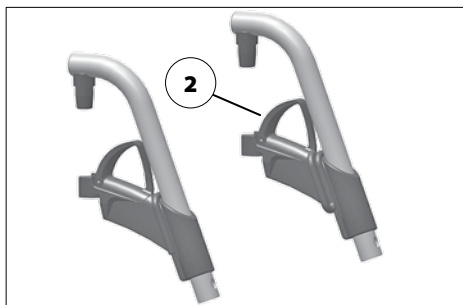

Kojų atramų pasukimas

Norėdami pasukti, turite lenkti kojų atramas į priekį, kol išgirsite, kad fiksatorius užsifiksavo [1].

- ☞ Kai pasukdami išgirsite, kad kojų atrama užsifiksavo, patikrinkite atitinkamą fiksatorių / blokuotę.
- ☞ Vėliau perskaitykite sk. *Kojų atramos apatinė dalis, modelis 2.370, 17 psl.*



Kojų atramų nuėmimas

Nuėmus kojų atramas kyla didesnis pavojus, kad vežimėlis pakryps atgal.

Kad būtų lengviau atsistoti iš neįgaliojo vežimėlio / į jį atsėsti ir neįgaliojo vežimėlis būtų trumpesnis (tai svarbu transportuojant), galima nuimti kojų atramas [1].

- ☞ Prieš pasukdami kojos atramą į išorę, nuimkite blauzdos diržą.
- ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Blauzdos diržas, modelis 2.370, 15 psl.*

Norėdami nuimti, pirmiausia pasukite kojų atramą [2], o paskui išimkite traukdami į viršų [1].

- ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramų pasukimas į išorę, 19 psl.*
- ☞ Atkreipkite dėmesį į galimą pavojų prisipasti!

Kojų atramų įkabinimas

Norėdami įkabinėti, pasukite kojų atramas į šoną, lygiagrečiai su priekiniu rėmo vamzdžiu ir įstumkite žemyn. – Tai atliekant laikantysis kakliukas turi įsistatyti į rėmo vamzdį.


- ☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!
- ☞ Įkabinę kojų atramas pasukite jas atgal [3].
- ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramų pasukimas, 20 psl.*



Mechaninė reguliuojamo aukščio kojų atrama

Atlikdami nustatymo darbus laisva ranka niekada nelieskite reguliavimo mechanizmo. Nurodykite lydinčiam asmeniui užfiksuoti kojų atramą, kad ji netikėtai neiškristų.

Stenkitės, kad kojų atrama neiškristų dėl savo svorio. – Pavojus susižaloti!

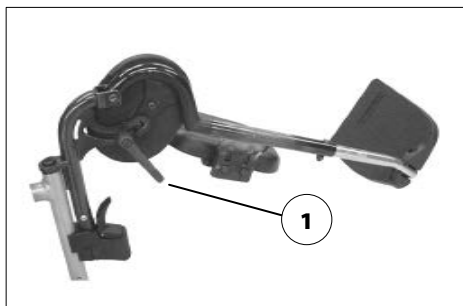

Kojų atramos pakėlimas / nuleidimas

Prieš pakeliant / nuleidžiant, lydintysis asmuo turi atfiksuoti kojų atramą ją šiek tiek kilstelėdamas.

Paskui atfiksuokite prispaudimo svirtį (1) ir nurodykite lydinčiam asmeniui lėtai iki pageidaujamo lygio pakelti / nuleisti kojų atramą.

Paregulavę vėl stipriai prisukite prispaudimo svirtį (1).

PORANKIAI

Nekelkite ir neneškite neįgaliojo vežimėlio už porankių.

Nevažiukite neprimontavę porankių.

Neimkite rankomis tarp rėmo ir porankio. – Pavojus prispausti!

Jei neįgaliojo vežimėlį stumia lydintysis asmuo, naudotojas turi padėti rankas ant porankio pagalvėlės arba ant kelių ir negali jų laikyti šonuose tarp korpuso ir porankio. – Gali būti suspausti pirštai!

Kai persėdant į šoną porankis yra nuimtas, kyla pavojus netyčia paspausti stabdį ir nusitepti drabužius palietus varantįjį ratą.


Porankiai [1] (atsižvelgiant į modelį ir konstrukciją) yra nuimami, jų aukštis yra reguliuojamas ir kartu naudojami kaip atrama rankoms, drabužių apsauga ir apsauga nuo vėjo.

Porankio nuėmimas

(Modelis 2.370)

Norėdami nuimti porankį, aktyvinkite fiksa-torių (3) ir užlenkite porankį į viršų [4].

Paskui nuimkite porankį keldami jį į viršų [2].

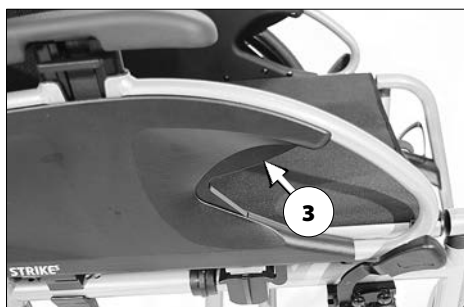


Porankio įstatymas

(Modelis 2.370)

Pirmiausia iš viršaus įstatykite porankį į kreipiamąsias, esančias už sėdimojo paviršiaus [1].

Paskui užlenkite porankį žemyn ir spauskite žemyn, kol išgirsite užsifiksuojant fiksiatorių (2).

- ☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!
- ☞ Nugaros atlošo vamzdis turi įsistatyti į porankio vamzdžio kreipiamosios griovelį (3).

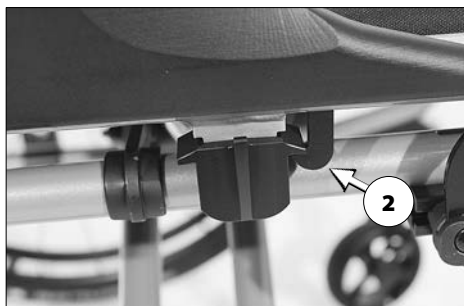

Porankio užlenkimas į viršų

(Modelis 2.370)

Norint atsistoti iš neįgaliojo vežimėlio arba jį atsisėsti, galima pakelti porankį į viršų [1] bei užlenkti jį už nugaros atlošo [2].

Norėdami pakelti porankį, pirmiausia aktyvinkite fiksavimo svirtį (3).

Paskui atlenkite porankį į viršų [1] ir prireikus užlenkite už nugaros atlošo [2].

☞ Naudojant modelį su būgniniu stabdžiu arba žemesniu nugaros atlošu, negalima porankio užlenkti už atlošo.



Porankio aukščio reguliavimas

(Modelis 2.370)

Paminkštintas rankų atramas galima nustatyti į vieną iš 5 aukščio pakopų [4].

Norėdami pakelti arba nuleisti rankos atramą, pirštais pakelkite svirtį (5) į viršų arba spauskite žemyn ir kartu nustatykite rankos atramą į norimą aukštį. Paskui stumkite rankos atramą toliau, kol išgirsite, kad fiksatorius užsifiksavo.

☞ Šiek tiek kilstelėdami arba nuleisdami rankos atramą patikrinkite, ar fiksatorius užsifiksavo.

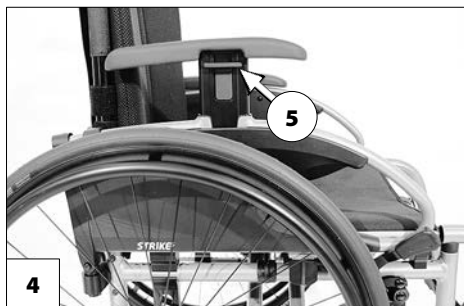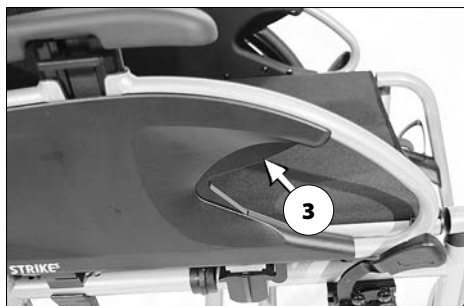

DRABUŽIŲ APSAUGA

Drabužių apsaugos [1] +[2] nenaudokite neįgaliojo vežimėliui kelti arba nešti.

Nevažiukite neprimontavę drabužių apsaugos!

Neimkite rankomis tarp rėmo, varančiojo rato ir drabužių apsaugos. – Pavojus prispausti!

Jei neįgaliojo vežimėlį stumia lydintysis asmuo, naudotojas turi padėti rankas ant kelių ir negali jų laikyti šonuose tarp korpuso ir drabužių apsaugos. – Gali būti suspausti pirštai!



Drabužių apsauga su porankiu

Drabužių apsaugos su porankiu [2] aukštis yra reguliuojamas ir ši dalis kartu naudojama kaip atrama rankoms, drabužių apsauga ir apsauga nuo vėjo.


STŪMIMO STRYPAS

Prieš pradėdant reguliuoti stūmimo strypą, reikia apsaugoti neįgaliojo vežimėlį nuo netikėto pariedėjimo. – Žr. skaitykite sk. *Stabdys*, 12 psl..

Nuimamasis stūmimo strypas sujungia abu nugaros srities vamzdžius ties stūmimo rankenomis [1]. Jis naudojamas neįgaliojo vežimėliui stumti ir kartu galvos atramai tvirtinti.

Norėdami nuimti stūmimo strypą arba sulankstyti neįgaliojo vežimėlį, visiškai išsukite vieną arba abu tvirtinimo varžtus (2).

- Išsukdami laikykite stūmimo strypą, kad jis nenukristų.
- Išsuktą (-us) varžtą (-us) vėl įsukite į vamzdį. – Taip neperarasite varžtų.

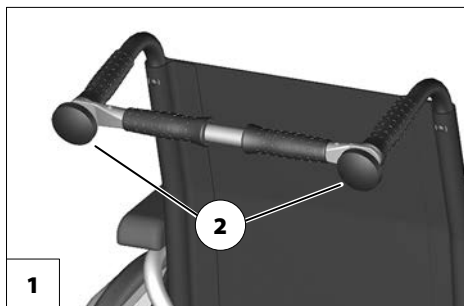

STŪMIMO RANKENOS

Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenų aukštį galima nuosekliai pereguliuoti apie 20 cm ir užfiksuoti, kad jos neišsitrauktų [1].

Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos su spaustu

- ☞ Tai atlikdami viena ranka prilaikykite stūmimo rankeną, kurią reguliuojate.
- ☞ Po kiekvieno reguliavimo vėl reikia prisukti prispaudimo svirtį tiek, kad nebūtų įmanoma pasukti stūmimo rankenos.

Aukščio reguliavimas:

Prispaudimo sraigto prispaudimo svirtimi (2) atlaisvinkite tiek, kad galėtumėte atitinkamą stūmimo rankeną patraukti į norimą padėtį.

Kampo reguliavimas:

Norėdami pasukti stūmimo rankenas, atlaisvinkite prispaudimo sraigto prispaudimo svirtimi (2) ir pasukite į norimą padėtį.

Ištraukimas / įstatymas:




1. Norėdami ištraukti arba įstatyti stūmimo rankenas, įspauskite atitinkamą spyruoklinį mygtuką (3).
2. Paskui per prispaudimo svirtį (2) vėl įsukite prispaudimo varžtą.

Prispaudimo svirties ypatybės

Prispaudimo svirtį (2) galima pasukti į patogiausią valdyti padėtį.

Tam ištraukite prispaudimo svirtį (2) tiek (rodyklės kryptimi), kad atsilaivintų krumpliai.

Pasukę prispaudimo svirtį (2) vėl užfiksuokite krumplius.

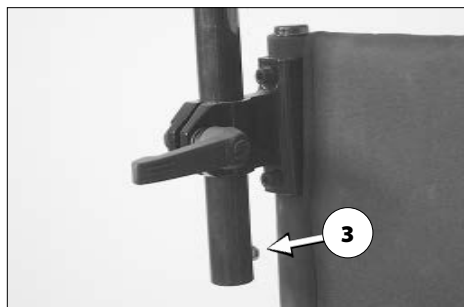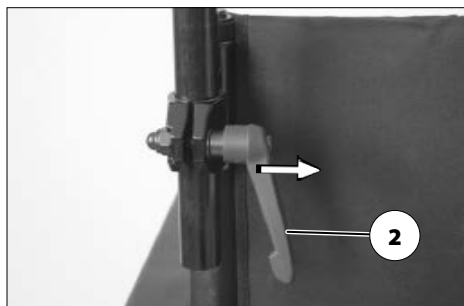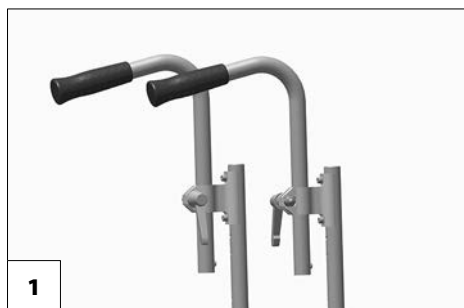

RATAI

Varantieji ratai

Nenaudokite neįgaliojo vežimėlio, jei neįmontuoti varantieji ratai.



Užmovus varantįjį ratą užfiksavimo mygtukas (2) turi išsikišti kelis milimetrus iš rato veržlės.

Varantieji ratai užmaunami ant įstatomosios ašies [1] ir nuimami bei uždedami nenaudojant įrankių.

Tam pirmiausia įspauskite rato stebulės viduryje esantį įstatomosios ašies užfiksavimo mygtuką (2).

Paskui numaukite arba užmaukite varantįjį ratą

- Neįgaliojo vežimėlio padangų oro slėgio vertė nurodyta ant padangos dangos arba šiuos duomenis rasite skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 43 psl..
- Jei varančiojo rato šone lieka per didelis tarpas arba neužsifiksuoja įstatomoji ašis, būtina nedelsiant kreiptis į platintoją, kad suremontuotų.
- Nuimant arba užmaunant neįgaliojo vežimėlyje negali sėdėti asmuo. Neįgaliojo vežimėlis turi stovėti ant lygaus ir tvirto pagrindo. Prieš išmontuodami ratą saugiai atremkite važiuklę, kad ji nenuvirstų, ir užfiksukite neįgaliojo vežimėlį, kad jis nenuvirstų ir nepariedėtų.

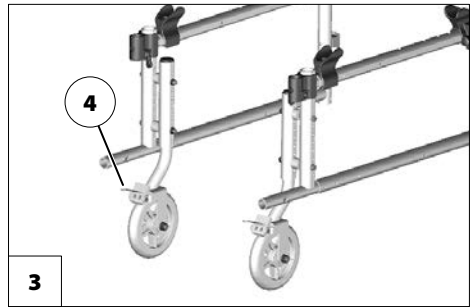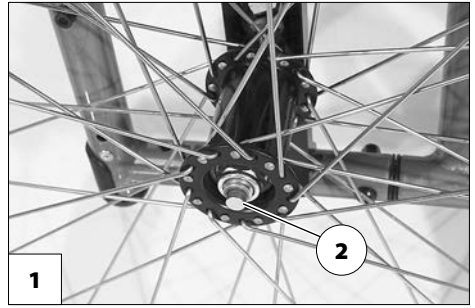

- Įstačius varančiuosius ratus manevravimo ratukai neveikia.
- Pastatę neįgaliojo vežimėlį, turite paspausti manevravimo ratukų stabdžius (4).

MANEVRAVIMO RATUKAI

Aktyvius manevravimo ratukus, neįgaliojo vežimėlio nebus galima stabdyti ir užfiksuoti stabdymo svirtimi.

Manevravimo ratukai [3] suteikia galimybę manevruoti neįgaliojo vežimėliu ankštesse patalpose.

ATRAMINIAI RATUKAI

Tam tikrose situacijose atraminiai ratukai neužtikrina pakankamos apsaugos nuo apsvertimo.

Žemiau nurodyta, ko negalite daryti:

- Per smarkiai nelenkite atgal viršutinės kūno dalies.
- Nevažiukite per greitai, ypač judėdami į kalną.

Siekdami užtikrinti kiek įmanoma didesnę apsaugą nuo pakrypimo, niekada nevažiukite pasukę atraminį ratuką atgal.

Atraminiai ratukai [1] padidina stabilumą ir juos galima pasukti į vidų po sėdyne [2].

- ☞ Atsižvelgiant į modelį, atraminiai ratukai gali būti po vieną arba poromis.
- ☞ Atraminius ratukus gali pasukti lydintis asmuo arba padėjėjas.

Atraminių ratukų pasukimas

Koja išstumkite atraminius ratukus žemyn iš fiksatoriaus, paskui pasukite į vidų po sėdyne [2] arba atgal [1], kol atitinkamas fiksatorius užsifiksuos savaime.



Specialūs reikalavimai naudojant ratus su dvigubais stumiamaisiais ratlankiais

Prieš pradėdami važiuoti kiekvieną kartą patikrinkite, ar jungiamasis strypas (2) stipriai pritvirtintas.

Esant ratams su dvigubais stumiamaisiais ratlankiais [1] neįgaliojo vežimėlis valdomas viena ranka.



Neįgaliojo vežimėlio valdymas


Norėdami važiuoti tiesiai, turite vienu metu stumti abu stumiamuosius ratlankius. Važiuodami posūkiu turite sukti tik vieną stumiamąjį ratlankį.

Dvigubo stumiamojo ratlankio sulankstymas / išlankstymas

Prieš sulankstant reikia nuimti ištraukiamąjį jungiamąjį strypą (2).

Jungiamasis strypas nuimamas (2) rankiniu ratuku (3) atlaisvinus prispaudimo varžtą.

Išlanksčius neįgaliojo vežimėlį reikia vėl įstatyti teleskopinį jungiamąjį strypą (2) ir rankiniu ratuku (3) priveržti prispaudimo varžtą.

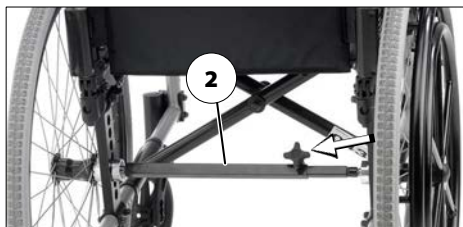

GALVOS ATRAMA

Galvos atramos viršutinį kraštą visada nustatykite ties pakušiu, maždaug akių lygyje.

☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!

Nenustatykite galvos atramos sprando aukštyje.

Galvos atramą iš laikiklio galima ištraukti ne daugiau nei iki žymos.

Galvos atrama yra skirta tik prilaikyti galvą eksploatuojant įprastai, tačiau ji neatstoja žmonių pervežimo automobiliuose naudojamą tvirtos galvos atramos.

Nustatomosios galvos atramos [1] viršutinį kraštą turi būti kuo arčiau pakušio, maždaug akių lygyje. Norint nustatyti aukštį ir nuimti galvos atramą, reikia atlaisvinti prispaudimo varžtą (2).



TERAPIJOMS SKIRTA PLOKŠTĖ

Aštriabriauniai daiktai (pvz., laikrodžiai, žiedai, peiliai arba dirželių sagtelės) bei stambios dulkės gali ant terapijoms skirtos plokštės palikti gilių griovelių ir įbrėžimų.

Ant terapijoms skirtos plokštės nedėkite karštų daiktų.

Nevažiukite, jei ant užstumtos terapijoms skirtos plokštės padėta nepritvirtintų daiktų arba skysčių pripildytų indų.

Terapijoms skirtos plokštės nevalykite agresyviomis arba grūdėtomis valymo priemonėmis.

Terapijoms skirtos plokštės nenaudokite neįgaliojo vežimėliui nešti.

Terapijoms skirta plokštė iš priekio užstumiama per porankio pagalvėles [3].

☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!

☞ Įsitinkite, kad terapijoms skirta plokštė saugiai uždėta ant porankių pagalvėlių.

PRILAIKOMO DIRŽAS

Atkreipkite dėmesį, kad po diržo juosta nebūtų prispaustų daiktų!

Prilaikymo diržas nėra neįgaliojo vežimėlio ir (arba) automobiliais vežamų keleivių saugos diržų sistemos dalis.

Prilaikymo diržas [1] iš galo prisuktas prie atitinkamo nugaros atlošo vamzdžio.

Prilaikymo diržas naudojamas sėdėjimo padėčiai stabilizuoti ir neleidžia sėdinčiajam neįgaliojo vežimėlyje virsti į priekį.

Norėdami prisisegti prilaikymo diržą, traukite abu diržo galus į priekį ir užsekite sagtį taip, kad ji užsifiksuotų. Norėdami atsegti prilaikymo diržą, įspauskite abu atleidimo mygtuką ir ištraukite diržo galus.

- ☞ Prilaikymo diržo ilgį galima pareguliuoti. Jis neturėtų būti per daug įtemptas.



PAGRINDINĖS SAUGOS NUORODOS

Šios saugos nuorodos yra ištrauka iš informacijos „Saugos ir bendrosios naudojimo nuorodos“, kurią rasite mūsų interneto svetainėje adresu < www.meyra.com >.

Nekiškite pirštų į atvirus rėmo vamzdžius (pvz., nuėmę porankius, kojų atramas arba atraminius ritinėlius). – Pavojus susižaloti!

Varyti pėdomis (neįgaliojo vežimėlio varymas stumiant pėdomis) leidžiama tik riedant nedideliu greičiu, ant horizontalių, lygių paviršių viduje.

Varydami pėdomis atkreipkite dėmesį, kad pėdos gali būti prispaustos.

Taip važiuojant negalima sėdėti ant priekinio sėdynės trečdaliao.

Naudojantis neįgaliojo vežimėliu, net ir stovint vietoje, ir ypač važiuojant įkalnėmis / nuokalnėmis, reikia sėdėti saugioje padėtyje. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Saugi sėdėjimo padėtis užtikrinama tuomet, kai naudotojo nugarą yra atremta į nugaros pagalvėlę, o dubuo prigludęs prie galinės sėdynės srities.

Išlipti iš neįgaliojo vežimėlio stovint ant įkalnių / nuokalnių galima tik esant avariniam atvejui bei padedant lydinčiam asmeniui ir (arba) padėjėjui! – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Didesnis pavojus, kad pakryps, jei nugaros atlošas palenktas tam tikru kampu.

Važiuodami neįgaliojo vežimėliu neturėtumėte rūkyti.

Šviečiant tiesioginiams saulės spinduliams gali iki 41 °C įkaisti sėdynės užvalkalai / pagalvėlės, porankių pagalvėlės, kojų atramos ir rankenos. – Kyla pavojus susižaloti palietus neuždengtomis kūno vietomis! Neįgaliojo vežimėlis neįkails, jei jį pastatysite pavėsyje.

Kartu vežamiems daiktams specialių tvirtinimo vietų nenumatyta.

Lydintysis asmuo

Prieš padedamas naudotis, lydintysis asmuo turi būti perspėtas apie visas galimas pavojingas situacijas. Reikia patikrinti, ar stipriai pritvirtintos Jūsų neįgaliojo vežimėlio konstrukcinės dalys, kurias valdys lydintysis asmuo.

Persėdimas iš neįgaliojo vežimėlio

Neįgaliojo vežimėliu privažiukite kuo arčiau tos vietos, ant kurios norite persėsti iš neįgaliojo vežimėlio.

- ☞ Apie tai taip pat skaitykite skaitykite sk. *Stabdys*, 12 psl. ir skaitykite sk. *Porankio užlenkimas į viršų*, 25 psl..
- ☞ Mes rekomenduojame iš neįgaliojo vežimėlio persėsti padedant padėjėjui.

Daiktų siekimas

Stenkitės per daug nelenkti viršutinės kūno dalies į priekį, į šoną arba atgal, ypač imdami arba padėdami sunkius daiktus. – Kyla pavojus, kad neįgaliojo vežimėlis persivers arba pakryps, ypač esant siauram sėdėjimo plotčiui ir dideliame sėdėjimo aukščiui (naudojant sėdynės pagalvėlę)!

Nuokalnės, įkalnės arba pasviras važiavimo kelias

Esant tam tikram važiavimo kelio nuolydžiui, dėl sumažėjusio sukibimo su žeme ženkliai padidėja pavojus, kad neįgaliojo vežimėlis pakryps, ir sumažėja stabdymo bei vairavimo galimybės.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 43 psl..

Dėl Jūsų pačių saugumo rekomenduojame važiuojant daugiau nei 1 % nuokalne pasikviesti į pagalbą lydintįjį asmenį.

☞ Į šią nedidelę įkalnės vertę turėtų atsižvelgti asmenys, kurie negali pakeisti kūno padėties, atsižvelgdami net į šiek tiek pasikeičiantį svorio centrą.

Lydintysis asmuo turėtų atkreipti dėmesį, kad stumti neįgaliojo vežimėlį nuokalnėmis / įkalnėmis reikia daugiau jėgos nei lygiu keliu, ir kyla didesnis pavojus išslysti.

Važiuodami įkalnėmis, nuokalnėmis ir pasvirais važiavimo keliais niekada nesilenkite posvyrio kryptimi.

Stenkitės staiga nekeisti važiavimo pobūdžio (ypač tuomet, kai parinkti kritiniai važiavimo parametrai, pvz., aktyvinus rato padėtį).

Niekada nevažiuokite greičiau nei žingsnio greičiu.

Važiuojant atgal kyla didesnis pavojus persiversti.

Važiuojant posūkais ir apsisukant įkalnėse ir nuokalnėse kyla pavojus pakrypti.

Važiuojant nuokalnėmis važiavimo keliui perduodama stabdymo jėga yra ženkliai mažesnė nei važiuojant lygiu keliu ir ši jėga dar labiau sumažėja dėl prastos kokybės kelio (pvz., drėgmės, sniego, skaldos, nešvarumų). Stabdomieji ratai gali pradėti pavojingai slysti, todėl netikėto krypties pasikeitimo dėl slydimo būtina išvengti atsargiai ir tinkamai stabdant.

Nuokalnės apačioje stebėkite, kad pėdų plokštelės nelieštų žemės ir jų nepažeistumėte staiga stabdydami.

Važiuojant nuolaidžiais keliais (pvz., į šoną pakrypusiu pėsčiųjų taku) neįgaliojo vežimėlio ratai sukasi nuolydžio kryptimi. Vykstant poslinkiui į šoną, slydimo turi padėti išvengti lydintysis asmuo arba Jūs patys, pradėdami sukti priešinga kryptimi.

Kliūčių įveikimas

Pervažiavus laiptus reikia vėl įmontuoti atraminius ratukus, jei jie buvo išmontuoti, ir atgal atsukti nusuktus atraminius ratukus.

Rizikinga važiuoti per bet kokią kliūtį! Pavojus pakrypti kyla net ir važiuojant per plokščias kliūtis (pvz., slenksčius, kilimo kraštus, išsikišimus ir pan.).

Kliūčių įveikimas – tai labai pavojinga situacija, kurios metu reikia atkreipti dėmesį į saugos nuorodas, galiojančias važiuojant nuokalnėmis, įkalnėmis ir nuolydžiais keliais.

Dėl Jūsų pačių saugumo visas kliūtis turite pervažiuoti lydimi lydinčiojo asmens. Pakrypus neįgaliojo vežimėliui reikia visada paspausti koja spaudžiamą vamzdį.

Savarankiškai ir nesukeliant sau pavojaus galima važiuoti per kliūtis (< 4 cm), net ir naudojant patvirtintas pagalbines pavaras, tik mokant saugiai valdyti neįgaliojo vežimėlį.

Prie mažesnių kliūčių, pvz., išsikišimų / kraštų, visada važiuokite lėtai ir stačiu kampu (90°), kol varantieji ratai beveik palies kliūtį. Trumpam sustabdykite neįgaliojo vežimėlį ir pervažiokite per kliūtį.

Kliūtį visada pervažiokite į priekį abiem priekiniais arba galiniais ratais, kad neįgaliojo vežimėlis nepakryptų į šoną.

Laikykitės pakankamai didelio saugaus atstumo iki daubų, laiptų, šlaitų, krantų ir kt., kad liktų pakankamai vietos / kelio atkarpos manevruoti, stabdyti ir apsisukti.

Jei įmanoma, paprašykite vieno arba kelių padėjėjų Jus iškelti iš neįgaliojo vežimėlio ir nunešti į paskirties vietą.

Laiptais galima važiuoti tik lydint dviem padėjėjams, kurie žino pavojų keliančią situaciją ir gali stipriai valdyti neįgaliojo vežimėlį.

☞ Padėjėjai gali suimti tik už stūmimo rankenų ir šoninio rėmo, tačiau negali kelti už neįgaliojo vežimėlio.

Reikia nuimti primontuotus atraminius ratukus, nes tam tikromis aplinkybėmis jie gali sukelti pavojų padėjėjui.

Neįgaliojo vežimėlio pakrovimas

Nekelkite neįgaliojo vežimėlio už kojų atramų, porankių ir priedų!

Prieš keliant reikia apsaugoti neįgaliojo vežimėlį nuo netikėto pariedėjimo!

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Stabdys*, 12 psl..

Pakraunant išmontuotas dalis reikia saugiai sudėti ir prieš važiuojant vėl kruopščiai pritvirtinti.

Neįgaliojo vežimėlio svoris sumažėja nuėmus nuimamąsias konstrukcines grupes.

Neįgaliojo vežimėlį galima pakrauti užvežant rampomis arba kėlimo platformomis.

☞ Apie tai skaitykite susijusioje naudojimo instrukcijoje ir atkreipkite dėmesį į rampos ar kėlimo platformos krovumą.

Transportavimas transporto priemonėse

Transportuojant išmontuotas dalis reikia jas saugiai sudėti ir prieš važiuojant vėl kruopščiai pritvirtinti.

Nuimtas dalis galima nešti paėmus už bet kurios vietos.

Kadangi transportuojant transporto priemonėmis vieta yra apribota, būtina imtis toliau nurodytų priemonių:

- nuimkite kojų atramas (galima tik naudojant modelį 2.370),
- nuimkite porankius,
- Nuimkite varančiuosius ratus.

Tuščio neįgaliojo vežimėlio apsauga transportuojant

Būtina vadovautis atitinkamos gabenimo paslaugas teikiančios įmonės potvarkiais ir instrukcijomis. – Šių nuorodų pasiteiraukite prieš transportuodami.

Neįgaliojo vežimėlį reikia padėti ir užfiksuoti taip, kad jis nekeltų pavojaus Jums ir kitiems.

Asmenų gabenimas transporto priemone

Ar Jūsų asmeninį neįgaliojo vežimėlį galima naudoti kaip sėdynę važiuojant transporto priemone, nurodyta skyriuje skaitykite sk. *Prie neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė*, 49 psl..

- ☞ Atkreipkite dėmesį į gaires < *Saugumas naudojant „Meyra“ neįgaliojo vežimėlius užtikrinamas ir pervežant transporto priemone* >! – Šį dokumentą ir kitą informaciją rasite skiltuke < *Information center* > (Informacijos centras), mūsų interneto svetainėje < www.meyra.com >.

Pervežimas viešuoju transportu

Jūsų neįgaliojo vežimėlis nepritaikytas vežti asmenis viešuoju transportu. Gali atsirasti tam tikrų apribojimų. Mes rekomenduojame naudoti viešajame transporte stabiliai įmontuotą sėdynę.

Jei vis dėlto nepavyktų išvengti sėdinčiojo neįgaliojo vežimėlyje gabenimo viešuoju transportu, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas nuorodas:

- Pastatykite transporto įmonės numatytoje statymo vietoje.
- Prieš pastatydami neįgaliojo vežimėlį, atkreipkite dėmesį į vežėjo pateiktas taisykles.
- Nurodytoje vietoje pastatykite savo neįgaliojo vežimėlį priešinga važiavimui kryptimi.
- Neįgaliojo vežimėlį reikia pastatyti taip, kad nugaros atlošas galėtų atsiremti į statymo vietos ribotuvą.
- Be to, viena neįgaliojo vežimėlio pusė turi papildomai priglusti prie kito statymo vietos ribotuvo, kad įvykus nelaimingam atsitikimui ar staiga prasidėjus stabdymo manevrui neįgaliojo vežimėlis neslystų.
- Papildomai aktyvinkite stovėjimo stabdį.

Važiavimas viešaisiais keliais

Atkreipkite dėmesį į Jūsų šalyje galiojančias važiavimo viešaisiais keliais taisykles ir prirėikus pasiteiraukite platintojo, kokius priedus reikia naudoti.

Jūsų neįgaliojo vežimėlyje gali būti papildomai įrengta apšvietimo įranga. Šią apšvietimo įrangą sudaro tokios dalys:

- Atšvaitai ant atlošo
- Atšvaitai ant varančiųjų ratų.

Esant prastam matomumui, ypač tamsoje, rekomenduojama primontuoti ir įjungti aktyviają apšvietimo įrangą, nes tuomet Jūs patys geriau matysite ir būsite matomi.

- ☞ Važiuojant viešaisiais keliais už neįgaliojo vežimėlio tinkamą veikimą ir saugią būseną atsako naudotojas.
- ☞ Važiuojant viešaisiais keliais reikia vadovautis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis ir jų laikytis.
- ☞ Jei įmanoma, važiuodami tamsoje dėvėkite šviesius, aiškiai matomus drabužius, kad Jūs būtumėte geriau matomi.
- ☞ Važiuodami tamsoje stenkitės nesinaudoti greitkeliais ir dviračių takais.
- ☞ Atkreipkite dėmesį, kad drabužiai ar kiti prie neįgaliojo vežimėlio pritvirtinti daiktai neuždengtų apšvietimo įrangos.
- ☞ Turint fizinę negalią, pvz., aklumą, Jūsų neįgaliojo vežimėlį turi valdyti lydintysis asmuo.

VALYMAS

Plastikinių dengiamųjų medžiagų negalima valyti nejoniniais tensidais bei tirpikliais, ypač alkoholiu.

Prie pagalvėlių ir užvalkalų dažniausia būna pritvirtintos priežiūros nuorodos (priežiūros etiketės).

- ☞ Tai aprašyta skyriuje skaitykite sk. *Plovimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė*, 48 psl..

Kitais atvejais laikykitės toliau pateikiamų nuorodų:

- ☞ Pagalvėles valykite šiltu vandeniu ir skalbimo rankomis priemone.
- ☞ Dėmes pašalinkite kempine arba minkštu šepetėliu.
- ☞ Smarkiai prilipusius nešvarumus išvalykite prekybos vietose įsigijama neutralia plovimo priemone.
- ☞ Neplaukite šlapiuoju būdu! Neskalkbkite skalbyklėje!

Nuvalykite švairiu vandeniu ir palaukite, kol išdžius.

Važiuoklę, pasirenkamąją apšvietimo įrangą ir ratus galima drėgnai nuvalyti švelnia valymo priemone. Paskui kruopščiai nusausininkite.

- ☞ Patikrinkite, ar važiuoklė nepažeista korozijos, ar nėra kitokių pažeidimų.
- ☞ Plastikines dalis valykite tik šiltu vandeniu ir neutraliu valikliu arba skystu muilu.

Daugiau informacijos apie valymą ir priežiūrą rasite paspaudę skirtuką < *Information center* > (Informacijos centras) mūsų interneto puslapyje:

< www.meyra.com >.

Dengiamasis sluoksnis

Paviršius apdirbtas aukštos kokybės medžiagomis, todėl užtikrinama optimali apsauga nuo korozijos.

- ☞ Jei dengiamasis sluoksnis būtų subraižytas ar pažeistas, šias vietas galite pataisyti iš platintojo įsigijamu dažų pieštuku.

Judančias dalis sutepus nedideliu alyvos kiekiu jos ilgiau veiks tinkamai.

Dezinfekavimas

Jei vienu gaminiu naudojasi keli asmenys (pvz., globos namuose), prieš naudojant kitam asmeniui privaloma nuvalyti prekybos vietose įsigijama dezinfekavimo priemone.

- ☞ Prieš pradėdant dezinfekuoti reikia nuvalyti pagalvėles ir rankenas.
- ☞ Apipurkšti arba nuvalyti galima patikrintomis ir patvirtintomis dezinfekavimo priemonėmis.

Informacijos apie patikrintas ir patvirtintas dezinfekavimo priemones bei metodus gali pateikti nacionalinė sveikatos priežiūros įstaiga.

- ☞ Tam tikromis aplinkybėmis naudojamos dezinfekavimo priemonės gali pakenkti paviršiams, todėl ilgo naudojimo konstrukcinių dalių tinkamo veikimo laikas bus apribotas.
- ☞ Reikia atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktas naudojimo nuorodas.

REMONTO DARBAI

Remonto darbus leidžiama atlikti tik platintojui.

Remontas

Norėdami atlikti remonto darbus, galite pasitikėti vietoje dirbančiu platintoju ir kreiptis į jį. Jis yra instrukuotas, kaip atlikti šiuos darbus.

Priežiūra

Jei Jums kiltų klausimų arba prireiktų pagalbos, kreipkitės į savo platintoją. Jis pakonsultuos, atliks priežiūros ir remonto darbus.

Atsarginės dalys

Atsarginių dalių galite įsigyti tik iš platintojo. Prireikus suremontuoti naudokite tik originalias atsargines dalis!

- ☞ Naudojant kitų gamintojų konstrukcines dalis gali atsirasti trikių.

Atsarginių dalių sąrašą su atitinkamais prekių numeriais ir brėžiniais turi platintojas.

Kad būtų pristatytos tinkamos atsarginės dalys, bet kuriuo atveju reikia nurodyti atitinkamą neįgaliojo vežimėlio serijos Nr. (SN)! Jis nurodytas identifikacinėje plokštelėje.

Platintojui bet koku būdu suremontavus neįgaliojo vežimėlį, jis privalo pridėti papildomą informaciją, pvz., neįgaliojo vežimėlio naudojimo instrukcijoje pateikti montavimo / valdymo nuorodas, bei nurodyti remonto datą ir duomenis apie užsakytas atsargines dalis.


Taip vėliau užsakant atsargines dalis bus išvengta netinkamų dalių užsakymo.

Nuorodos, jei nenaudojama ilgesnį laiką

Ruošiantis nenaudoti ilgesnį laiką, nereikia imtis jokių specialių priemonių. Tačiau būtina laikytis laikymo temperatūros.

- ☞ Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. *Techniniai duomenys, 43 psl.*

UTILIZAVIMAS

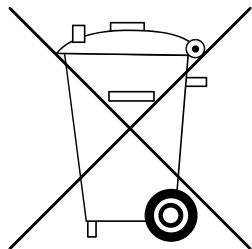

Utilizuoti reikia pagal galiojančias atitinkamas įstatymų galios nuostatas.

Miesto / savivaldybės administracijoje pasiteiraukite apie vietoje veikiančias utilizavimo įmones.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA


Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei neįgaliojo vežimėlio priežiūros ir techninės priežiūros darbai atliekami netinkamai arba neatliekami.

Techninės priežiūros darbai

Toliau pateiktas techninės priežiūros planas – tai techninės priežiūros darbų atlikimo gairės.

- ☞ Techninės priežiūros plane pateikti ne visi darbai, kuriuos būtina atlikti naudojant neįgaliojo vežimėlį.
- ☞ Atliekant patikros arba techninės priežiūros darbus visada kyla pavojus netikėtai susižaloti patiems arba sužaloti kitus asmenis. – Patikros ir techninės priežiūros darbus reikia atlikti labai atsargiai.

Techninės priežiūros planas

KADA	KAS	PASTABA
Prieš pradėdant važiuoti	Bendroji informacija Patikrinti, ar tinkamai veikia.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją.
Prieš pradėdant važiuoti	Tikrinimas, ar tinkamai veikia stabdžių sistema. Iki galo paspauskite stabdžių svirtį.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją. Stumiant stabdomieji ratai negali suksti. Jei jie sukasi, kreipkitės į įgaliotas specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų.
Prieš pradėdant važiuoti	Spaudžiamojo stabdžio nusidėvėjimo tikrinimas. Pastumkite stabdymo svirtį į šoną.	Atliekama savarankiškai arba tai atlieka padėjėjas. Didėjant stabdymo svirties laisvumui, nedelsdami kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!
Prieš pradėdant važiuoti (jei yra)	Oro slėgio padangose tikrinimas. Padangų pripildymo slėgis:  Žr. skaitykite sk. <i>Padangų pripildymo slėgis naudojant pneumatines padangas</i> , 43 psl..	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją. Tam naudokite rankinį manometrą.
Prieš pradėdant važiuoti	Padangų profilio tikrinimas.	Patikra apžiūrint atliekama savarankiškai. Nusidėvėjus padangos profiliui arba pastebėjus padangos pažeidimą būtina kreiptis į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų.

KADA	KAS	PASTABA
Prieš pradėdant važiuoti	Tikrinimas, ar nepažeisti nugaros srities vamzdžiai ir rėmo vamzdžiai.	Tikrinama savarankiškai arba tai atlieka padėjėjas. Atsiradus deformacijai arba įtrūkimų virintinių siūlių srityje, nedelsdami kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!
Ypač prieš važiuojant tame soje (jei yra)	Apšvietimo tikrinimas. Patikrinkite, ar tinkamai veikia apšvietimo ir signalų sistema bei atšvaitai.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją.
Kas 8 savaites (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)	Ant toliau nurodytų konstrukcinių dalių užlašinkite kelis lašus alyvos. – Judančios fiksatoriaus dalys. – Stabdymo svirties guoliai.	Atliekama savarankiškai arba pasikvietus į pagalbą padėjėją. Prieš sutepant alyva nuo konstrukcinių dalių reikia nuvalyti senos alyvos likučius. Atkreipkite dėmesį, kad alyvos perteklius nepatektų į aplinką (pvz., ant Jūsų drabužių).
Kas 8 savaites (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)	Tikrinimas, ar visos srieginės jungtys stripai priveržtos.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją.
Kas 6 mėnesius (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)	Patikrinkite – švarumą, – bendrąją būklę.	Žr. „Valymas“. Žr. „Remontas“.
Gamintojo rekomendacija: kas 12 mėnesių (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)	Saugos patikra – Neįgaliojo vežimėlis.	Atlieka platintojas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Visi skyriuje < *Techniniai duomenys* > pateikti duomenys yra susiję su standartine konstrukcija.

Bendrasis ilgis priklauso nuo varančiųjų ratų padėties ir dydžio.

Jei nenurodyta kitaip, matmenys buvo skaičiuojami naudojant 610 mm (24") \emptyset varančiuosius ratus.

Plotis skaičiuojamas esant 15 mm atstumui iki stumiamojo ratlankio.

Matmens paklaida ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Neįgaliojo vežimėlio matmenų santrumpos:

SA = sėdėjimo aukštis

SP = sėdėjimo plotis

SG = sėdėjimo gylis

AA = atlošo aukštis

Maks. naudotojo svorio apskaičiavimas:

Leistinas bendras svoris apskaičiuojamas sudedant neįgaliojo vežimėlio tuščiąjį svorį ir didžiausią leistiną naudotojo (asmens) svorį.

Maks. leistiną naudotojo svorį sumažina papildomas vėliau primontuotų dalių arba bagažo svoris.

Pavyzdys:

Vairuotojas nori kartu vežtis 5 kg sveriantį bagažą. Tuomet maks. naudotojo svoris sumažėja 5 kg.

Padangų pripildymo slėgis nau- dojant pneumatines padangas

Didžiausias galimas padangos pripildymo slėgis nurodytas ant atitinkamos padangos.

Vairuojamojo rato padangos pripildymo slėgis

Standartas:

2,5–3,5 bar = 36–50 psi

Varančiojo rato padangos pripildymo slėgis

Standartas:

3,0–4,0 bar = 44–58 psi

Labai mažo pasipriešinimo važiuojant padangos:

6 bar = 87 psi


Aukštas slėgis:

8 bar = 116 psi

Taikyti standartai

Neįgaliojo vežimėlis atitinka šį standartą:

- EN 12183: 2014
- ISO 7176-8: 2014
- ISO 7176 -19: 2008

 Saugumo bandymas, kurio metu neįgaliojo vežimėlis buvo pritvirtintas transporto priemonės saugos diržų sistema, buvo įvertintas pagal D priede nurodytus patikros metodus.

Mūsų naudojamų konstrukcinių grupių ir komponentų atsparumas degimui atitinka EN 1021-2 standarto reikalavimus.

Modelio „2.360 Smart F“ duomenys pagal ISO standartą

	min.	maks.
Bendras ilgis su kojų atrama	880 mm	1030 mm
Bendras plotis (didesnio nei 700 mm pločio neįgaliojo vežimėlis nepritaikytas transportuoti traukiniu)	500 mm	720 mm
Bendra masė	– kg	160 kg
Naudotojo masė (su apkrova)	– kg	150 kg
Sunkiausios dalies masė	7,4 kg	– kg
Esamas sėdėjimo gylis	380 mm	500 mm
Esamas sėdėjimo plotis	320 mm	520 mm
Ilgis sulanksčius	880 mm	1030 mm
Plotis sulanksčius	270 mm	320 mm
Aukštis sulanksčius	700 mm	1050 mm
Sėdimą plotą aukštis ties priekiniu kraštu (be sėdynės pagalvėlės)	430 mm	510 mm
Sėdėjimo kampas	2,5°	15°
Nugaros atlošo kampas	90°	100°
Nugaros juostos aukštis	250 mm	500 mm
Pakojis iki sėdynės (blauzdos ilgis)	360 mm	480 mm
Statinis stabilumas važiuojant nuokalne	–°	6°
Statinis stabilumas važiuojant įkalne	–°	6°
Statinis stabilumas šonine kryptimi	–°	6°
Dinaminis stabilumas važiuojant įkalne	–°	6°
Kampas ties kojų atrama ir sėdimuoju paviršiumi	105°	105°
Porankio aukštis nuo sėdimą paviršiaus	170 mm	245 mm
Nugaros atlošas iki porankio priekinio krašto	250 mm	310 mm
Stumiamojo ratlankio skersmuo	540 mm	540 mm
Ašies horizontalioji padėtis	40 mm	100 mm
Kliūčių įveikimas (Nuo 40 mm tik vežant lydinčiam asmeniui)	0 mm	100 mm
Mažiausias posūkio spindulys (normatyvinė rekomendacija pagal ISO – 1000 mm)	1200 mm	– mm

Modelio „2.360 Smart F“ duomenys pagal ISO standartą

	min.	maks.
Pasukimo sritis	– mm	1300 mm

Kiti modelio „2.360 Smart F“ techniniai duomenys

	min.	maks.
Ilgis be kojų atramos	800 mm	950 mm
Bendras aukštis	700 mm	1050 mm
Sėdynės pagalvėlės storis	30 mm	60 mm
Ilgis be kojų atramos, varantieji ratai (Atraminiai ratukai nuimti arba pasukti po sėdyne)	730 mm	880 mm
Apkrova	– kg	10 kg
Tuščiasis svoris	9,5 kg	17 kg
Transportuojamas svoris (be pagalvėlių, varančiųjų ratų)	7,4 kg	10,4 kg
Sėdynės pagalvėlės svoris	0,9 kg	– kg
Varančiųjų ratų svoris (1 vienetas)	1,9 kg	– kg

Vairuojamasis ratas

ø 100 mm (4")	Ištisinė guminė juosta
ø 125 mm (5")	Ištisinė guminė juosta
ø 142 mm (5½")	Ištisinė guminė juosta

Varantysis ratas

ø 610 mm (24 x 1 3/8")	Oras, PU
ø 596 mm (24 x 1")	Oras, PU

Stūmimo rankenos aukštis

Kodas 502 (reguliuojama nuosekliai)	855 mm	1095 mm
-------------------------------------	--------	---------

Klimatiniai duomenys

Aplinkos temperatūra	nuo –20 °C iki +50 °C
Laikymo temperatūra	nuo –30 °C iki +60 °C

Modelio „2.370 Smart S“ duomenys pagal ISO standartą

	min.	maks.
Bendras ilgis su kojų atrama	880 mm	1030 mm
Bendras plotis (didesnio nei 700 mm pločio neįgaliojo vežimėlis nepritaikytas transportuoti traukiniu)	500 mm	720 mm
Bendra masė	– kg	161 kg
Naudotojo masė (su apkrova)	– kg	150 kg
Sunkiausios dalies masė	6,5 kg	9,5 kg
Esamas sėdėjimo gylis	380 mm	500 mm
Esamas sėdėjimo plotis	320 mm	520 mm
Ilgis sulanksčius	880 mm	1030 mm
Plotis sulanksčius	270 mm	320 mm
Aukštis sulanksčius	700 mm	1050 mm
Sėdimosios ploto aukštis ties priekiniu kraštu (be sėdynės pagalvėlės)	390 mm	540 mm
Sėdėjimo kampas	0°	15°
Nugaros atlošo kampas	90°	100°
Nugaros juostos aukštis	250 mm	500 mm
Pakojis iki sėdynės (blauzdos ilgis)	270 mm	490 mm
Statinis stabilumas važiuojant nuokalne	–°	6°
Statinis stabilumas važiuojant įkalne	–°	6°
Statinis stabilumas šonine kryptimi	–°	6°
Dinaminis stabilumas važiuojant įkalne	–°	6°
Kampas ties kojų atrama ir sėdimuoju paviršiumi	105°	111°
Porankio aukštis nuo sėdimosios paviršiaus	210 mm	260 mm
Nugaros atlošas iki porankio priekinio krašto	250 mm	310 mm
Stumiamojo ratlankio skersmuo	490 mm	540 mm
Ašies horizontalioji padėtis	40 mm	100 mm
Kliūčių įveikimas (Nuo 40 mm tik vežant lydinčiajam asmeniui)	0 mm	100 mm
Mažiausias posūkio spindulys (normatyvinė rekomendacija pagal ISO – 1000 mm)	1200 mm	– mm

Modelio „2.370 Smart S“ duomenys pagal ISO standartą

	min.	maks.
Pasukimo sritis	– mm	1300 mm

Kiti modelio „2.370 Smart S“ techniniai duomenys

	min.	maks.
Ilgis be kojų atramos	680 mm	820 mm
Bendras aukštis	700 mm	1050 mm
Sėdynės pagalvėlės storis	30 mm	60 mm
Ilgis be kojų atramos, varantieji ratai (Atraminiai ratukai nuimti arba pasukti po sėdyne)	530 mm	670 mm
Apkrova	– kg	10 kg
Tuščiasis svoris	10,5 kg	18 kg
Transportuojamas svoris (be pagalvėlių, varančiųjų ratų)	6,5 kg	9,5 kg
Sėdynės pagalvėlės svoris	0,9 kg	– kg
Varančiųjų ratų svoris (1 vienetas)	1,9 kg	– kg

Vairuojamasis ratas

ø 100 mm (4")	Ištisinė guminė juosta
ø 125 mm (5")	Ištisinė guminė juosta
ø 142 mm (5½")	Ištisinė guminė juosta
ø 180 mm (7")	PU

Varantysis ratas

ø 610 mm (24 x 1 3/8")	Oras, PU
ø 596 mm (24 x 1")	Oras, PU
ø 550 mm (22 x 1")	Oras, PU

Stūmimo rankenos aukštis

Kodas 502 (reguliuojama nuosekliai)	855 mm	1095 mm
-------------------------------------	--------	---------

Klimatiniai duomenys

Aplinkos temperatūra	nuo –20 °C iki +50 °C
Laikymo temperatūra	nuo –30 °C iki +60 °C

Plovimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė

(simboliai atitinka Europos standartą)



Švelnaus skalbimo ciklas. Aukščiausia skalbimo temperatūra nurodyta °C.



Normalaus skalbimo ciklas. Aukščiausia skalbimo temperatūra nurodyta °C.



Skalbti rankomis



Nebalinti.



Negalima džiovinti džiovyklėje.




Nelyginti.




Nevalyti cheminiu būdu.

Prie neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė

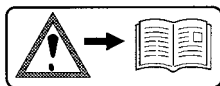

Dėmesio!

Perskaitykite naudojimo instrukciją ir pridėtus dokumentus.

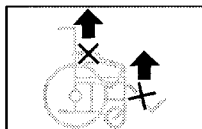

Nekelkite neįgaliojo vežimėlio už porankių arba kojų atramos. Negalima nešti už nuimamųjų dalių.

Achtung

Bremse nachstellen.

Ident.-Nr. 8390658

Dėmesio

Pareguliuoti stabdžius.

Achtung

Erhöhte Kippgefahr auf Steigung / Gefälle besonders in Verbindung mit kurzem Radstand.

Ident.-Nr. 205674400

Dėmesio

Didesnis pavojus pakrypti važiuojant įkalnėmis / nuokalnėmis, ypač esant trumpesnei ratų bazei.



Gaminio **negalima** naudoti kaip sėdynės transporto priemonėje.



Nuoroda dėl pavojaus prisipausti. – Nekiškite rankų.

Identifikacinėje plokštelėje pateiktų simbolių reikšmė



Gamintojas



Užsakymo numeris



Serijos numeris



Pagaminimo data



Leist. naudotojo svoris



Leist. bendras svoris



Leist. ašių apkrova



Leist. įkalnė



Leist. nuokalnė

max. ... km/h

Leist. didžiausias greitis



Gaminį galima naudoti kaip sėdynę transporto priemonėje.



Maks. leist. naudotojo svoris, jei gaminį leidžiama naudoti kaip sėdynę transporto priemonėje.



Gaminio **negalima** naudoti kaip sėdynės transporto priemonėje.



Medicinos produktas

PATIKROS PATVIRTINIMAS

Neįgaliojo vežimėlio duomenys:

Modelis:

Važtaraščio Nr.:

Serijos Nr. (SN):

Rekomenduojama saugos patikra po 1 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 2 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 3 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 4 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 5 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

ATSAKOMYBĖ UŽ TRŪKUMUS / GARANTIJA

Nesilaikant naudojimo instrukcijos, netinkamai atliekant techninės priežiūros darbus bei be mūsų sutikimo atlikus techninių pakeitimų ir patobulinimų (pirmontavus dalis) netenkama teisės teikti pretenzijas dėl atsakomybės už gaminio trūkumus bei reikalauti garantijos suteikimo.

Remdamiesi mūsų Bendrosiomis sandorių sudarymo sąlygomis mes prisiimame atsakomybę už šio gaminio trūkumus ir prireikus suteikiame nurodytą bei sutartą garantiją. Norėdami pateikti pretenzijų dėl atsakomybės už trūkumus arba garantijos suteikimo, kreipkitės į savo platintoją ir pateikite jam šį ATSAKOMYBĖS UŽ TRŪKUMUS / GARANTIJOS SUTEIKIMO SKIRSNĮ bei nurodykite reikiamus duomenis – modelio pavadinimą, važtaraščio Nr., pristatymo datą ir serijos numerį (SN).

Serijos numeris (SN) nurodytas identifikacinėje plokštelėje.

Kad atsakomybės už gaminio trūkumus arba garantijos suteikimo pretenzijos būtų priimtoms, bet kuriuo atveju gaminyje turėjo būti naudojamas pagal paskirtį, platintojas turėjo naudoti originalias atsargines dalis bei turėjo būti reguliariai atliekama techninė priežiūra ir patikra.

Garantija nesuteikiama paviršiaus pažeidimams, ratų padangoms, pažeidimams dėl atsilaisvinusių varžtų ar veržlių bei dažnai atliekant montavimo darbus nusidėvėjusioms tvirtinimo angoms.

Taip pat garantija nesuteikiama atsiradus pavaros ir elektronikos pažeidimams, kai žala padaroma netinkamai valant garų srauto prietaisais arba tyčia ar netyčia sušlapinus komponentus.

Nepriimame pretenzijų už gaminio trūkumus ir nesuteikiame garantijos triktims, kurios atsirado dėl spinduliuotės šaltinio, pavyzdžiui, didelę spinduliuojamąją galią skleidžiančių mobiliojo ryšio telefonų, didelio atkūrimo tikslumo sistemų ir kitų trukdžių, kurių vertės neatitinka standartinių specifikacijų.

Ši naudojimo instrukcija yra gaminio sudedamoji dalis, todėl ją reikia perduoti kitam naudotojui arba savininkui.

Norėdami įvertinti mūsų gaminius, tai galite padaryti mūsų < *Information center* > (Informacijos centro) srityje < *Priežiūra po pateikimo rinkai* >, apsilankę mūsų interneto svetainėje < www.meyra.com >.

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus, siekdami patobulinti gaminius.



Šis gaminytis atitinka EB direktyvą 93/42/EEB ir nuo 2021-05-25 įsigaliojusius reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos produktų reikalavimus.

Atsakomybės už trūkumus / garantijos skirsnis

Užpildykite! Jei reikia, nukopijuokite ir nusiųskite kopiją savo platintojui.

Atsakomybė už trūkumus / garantija

Modelio pavadinimas:

Važtaraščio Nr.:

SN (žr. identifikacinę plokštelę):

Pristatymo data:

Platintojo spaudas:

Patikros patvirtinimas norint perduoti

Neįgaliojo vežimėlio duomenys:

Serijos Nr. (SN):

Modelis:

Važtaraščio Nr.:

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Jūsų platintojas

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf

VOKIETIJA



Tel +49 5733 922 - 311

Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
