



NAUDOJIMO VADOVAS

TA IQ RWD
TA IQ FWD
TA IQ MWD



Šis gaminy s atitinka Reglamento (ES) 2017/745
dėl medicinos priemonių reikalavimus.

*inspire
joy of life*

Turinys

Simboliai	7
Įvadas	7
Modeliai	7
Indikacijos / kontraindikacijos	7
Pristatymas ir gavimas	8
Naudokite tik pagal paskirtį	8
Naudojimas	8
Reguliavimas	9
Naudojimas su kitų gamintojų gaminiais	9
Kai elektriniu neįgaliųjų vežimėliu naudojasi kitas asmuo	9
Gaminio naudojimo trukmė	10
Pagrindinė padėtis	10
Apžvalga	11
Modelis TA IQ RWD	11
Modelis TA IQ FWD	12
Modelis TA IQ MWD	13
Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio tvarkymas ir priežiūra	14
Vežimėlio tvirtinimas	14
Veikimo patikrinimas	14
Važiavimo charakteristikos	14
Stabdžiai	14
Darbinis stabdys	14
Vežimėlio stabdžių įjungimas	14
Avarinis stabdymas	14
Stovėjimo stabdys	14
Stabdžių įjungimas	15
Stabdžių atleidimas	15
Pagrindiniai visų elektros funkcijų jungikliai	16
Važiavimo / stūmimo režimas	17
Vežimėlio nustatymas stūmimo režimu	17
Vežimėlio nustatymas važiavimo režimu	18

Paruošimas naudoti	19
Apžiūra prieš važiavimą	21
Akumulatoriaus įkrovimas	21
Valdymo modulio padėtis	23
Funkcijų aprašymas	23
Pasukite valdymo modulį į porankio pusę.	23
Porankio padėtis	23
Užrakto funkcijos tikrinimas	23
Kojų atramos	24
Centralizuota kojų atrama	24
Elektroninis aukščio reguliavimas	25
Elektroninis pėdų atramos atlenkimas	25
Pėdų atramos aukščio reguliavimas	26
Dviguba kojų atrama	26
Pėdų atramos	26
Pėdų atramų sulankstymas	26
Kojų atramos perkėlimas į šoną	27
Kojų atramų grąžinimas į pradinę padėtį	27
Elektroninis kojų atramos kampo reguliavimas	28
Porankiai	29
„Rocker“ porankiai	29
Porankių atlenkimas	29
Porankių nulenkimas	29
Porankio užrakto funkcija	30
Porankio užrakto funkcijos tikrinimas	30
Atlenkiamas porankis	30
Porankių atlenkimas	30
Porankių nulenkimas	30
Pasukamas porankis	31
Porankio pasukimas link vežimėlio	31
Porankio pasukimas tolyn nuo vežimėlio	31
Nuleidžiamas laikiklis	31
Valdymo modulio nuleidimas	31


Nugaros atrama	32
Elektroniniu būdu reguliuojama nugaros atrama	32
Nugaros pagalvėlė	32
Mechaniškai reguliuojama nugaros atrama	33
Kampo reguliavimas dujiniais amortizatoriais	33
Rankinė nugaros atramos konfigūracija	34
Sėdynė	35
Sėdynės pagalvėlės	35
Sėdėjimo patogumo reguliavimas	35
Sėdynės krėslas	36
Elektroninio sėdynės krėslu reguliavimas	36
Sėdynės pakėlimas	37
Galvos atrama	38
Galvos atramos reguliavimas	38
Galvos atramos naudojimas neįgaliųjų transporto priemonėse	38
Krepšių tvirtinimas	38
Saugos diržas	39
Šviesos	40
Pervežimas ir gabenimas	41
Pakrovimas / iškrovimas	41
Ramos ir keltuvai	41
Asmeninis vežimas motorinėmis transporto priemonėmis	42
Vežimėlio tvirtinimas gabenti	42
„Dahl“ tvirtinimo sistema	43
Padangos	43
Techninė priežiūra	43
Priežiūra	43
Aptarnavimo planas	44
Pagrindinis saugiklis	46
Šviesos	47
Šviesų veikimas	47
Trikčių šalinimas	48

Pagrindinės saugos priemonės	49
Lydintieji asmenys	49
Išlipimas iš elektrinio neįgaliųjų vežimėlio	50
Daiktų pakėlimas	50
Važiavimas nuolydžiais arba stačiais keliais	50
Manevravimas per kliūtis	50
Elektros sistema	51
Vežimas viešuoju transportu	51
Važiavimas viešuosiuose keliuose	52
Valymas	52
Apdoroti paviršiai	53
Dezinfekcija	53
Remontas	54
Surinkimas	54
Priežiūra	54
Atsarginės dalys	54
Ilgalaikio laikymo atsargumo priemonės	54
Šalinimas	54
Naudojimo vadovas platintojams	55
Važiavimo charakteristikų programavimas	55
Techniniai duomenys	56
Pneumatinių padangų oro slėgis	56
Veikimo nuotolis	56
Važiavimo charakteristikos važiuojant nuolydžiais	56
Taikomi standartai	57
TA IQ RWD modelio specifikacijos, atitinkančios ISO 7176-15 standartą	58
Papildomi techniniai TA IQ RWD modelio duomenys	60
TA IQ FWD modelio specifikacijos, atitinkančios ISO 7176-15 standartą	62
Papildomi techniniai TA IQ FWD modelio duomenys	64
TA IQ MWD modelio specifikacijos, atitinkančios ISO 7176-15 standartą	66
Papildomi techniniai TA IQ MWD modelio duomenys	68
Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio ženklų paaiškinimas	70
Simbolių ant vardinės plokštelės paaiškinimas	71
Skalbimo nurodymų simbolių paaiškinimas	72

PRIEŽIŪROS DOKUMENTACIJA	73
Garantija	74
Garantijos įrodymas	75
Priežiūros dokumentai parduodant ar perduodant	75

SIMBOLIAI

Visada būtina laikytis spalvotame fone esančių saugos priemonių!

-  Šis simbolis reiškia atsargumo priemonę arba rekomendaciją.
- [] Nurodo vaizdo numerį.
- () Nurodo funkcinį vaizdo komponentą.

JVADAS

Prieš pirmą kartą naudodamiesi vežimėliu perskaitykite šį vadovą ir atidžiai laikykitės nurodymų.


Jei vežimėliu naudosis vaikai ar paaugliai, prieš pradėdami naudotis vežimėliu, jie kartu su tėvais ar globėjais turėtų perskaityti šį vadovą.

Šis naudojimo vadovas parengtas taip, kad galėtumėte mėgautis elektriniu neįgaliųjų vežimėliu ir išvengti nelaimingų atsitikimų.

-  Kadangi vežimėlio priedai gali skirtis nuo jūsų tikrojo modelio,

įtraukti skyriai su parinktimis, kurios gali būti nesusijusios su jūsų konkrečiu vežimėliu. Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio užsakymo formoje pateikiamas galimų priedų ir dalių sąrašas.

Mūsų svetainėje regos negalią turintiems naudotojams galima rasti PDF failų su papildoma informacija apie mūsų gaminius: www.ta-service.dk.

-  Jei turite klausimų, kreipkitės į platintoją.

Regėjimo negalią turintys naudotojai gali paprašyti pagalbininko garsiai perskaityti dokumentų tekstą.

Naujienas apie gaminių saugą ir galimus mūsų gaminių grąžinimus rasite mūsų svetainėje: www.ta-service.dk.

Mūsų elektriniai neįgaliųjų vežimėliai atitinka techninius ir teisės aktuose nustatytus medicinos priemonių reikalavimus. Tačiau, jei vis dėlto įvyko rimtas įvykis, rašykite mums el. pašto adresu ta-service@ta-service.dk ir kreipkitės į Danijos vaistų agentūrą.

MODELIAI

Šis naudojimo vadovas taikomas šiems modeliams:

- Modelis TA IQ RWD
- Modelis TA IQ FWD
- Modelis TA IQ MWD

INDIKACIJOS / KONTRAINDIKACIJOS

Jei naudojant šį elektrinį neįgaliųjų vežimėlį atsiranda alerginių reakcijų, paraudimų ir (arba) opų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Kad išvengtumėte kontaktinės alergijos, rekomenduojame vežimėliu naudotis tik dėvint drabužius.

Daugybė jūsų elektrinio neįgaliųjų vežimėlio funkcijų leidžia juo naudotis net ir tada, kai judėjimas ir vaikščiojimas labai ar smarkiai sutrikę dėl apatinių galūnių struktūrinių ir (arba) funkcinų sužalojimų (įskaitant amputaciją, traumą, raumenų ir kaulų sistemos ir (arba) nervų, raumenų ir kaulų sistemos judėjimo sutrikimus, pvz:

- paralyžius
- galūnių netekimas (kojos amputacija)
- galūnių defektai ir (arba) deformacijos
- sąnarių kontraktūros / sąnarių traumos
- arba kitos sąlygos

Be to, pirkdami konkretų gaminį turėtumėte atsižvelgti į neįgalaus asmens fizinę ir psichinę būklę, amžių, gyvenimo namuose sąlygas ir asmenines aplinkybes.

Bet kokį pirkinį kiekvienu konkrečiu atveju turėtų įvertinti ir patvirtinti kvalifikuotas medicinos specialistas (medicinos priemonių ar reabilitacijos konsultantas ir pan.) ir pritaikyti jį prie konkrečių aplinkybių, susijusių su asmens sveikatos istorija. Be to, asmenys, turintys bet kurią iš kontraindikacijose aprašytų problemų ir (arba) būklių, tam tikrais atvejais gali patirti psichinių, emocinių ar fizinį sunkumą naudodamiesi bet kuriuo iš išvardytų modelių.

Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio negalima naudoti, jei:

- yra kognityvinių apribojimų arba intelekto sutrikimų, dėl kurių neįmanoma savarankiškai naudotis vežimėliu;
 - yra aklių ar silpnaregių kasdienės veiklos apribojimų, kai regos priemonės ar kiti pagalbiniai prietaisai negali kompensuoti negalios;
 - asmenys vartoja vaistus, kurie turi neigiamos įtakos gebėjimui valdyti vežimėlį (pirmiausia pasitarkite su gydytoju arba vaistininku);
 - yra būklių, dėl kurių asmuo negali savarankiškai valdyti vežimėlio;
 - yra sunkūs pusiausvyros ir (arba) jutimo sutrikimai;
 - negalima sėdėti.
- ☞ Apie šiuos ir kitus su elektriniu neįgaliųjų vežimėliu susijusius pavojus teiraukitės gydytojo, terapeuto arba įgalioto platintojo.

PRISTATYMAS IR GAVIMAS

Visi gaminiai gamykloje griežtai kontroliuojami ir pakuojami į specialias kartonines dėžes.

- ☞ Nepaisant to, prašome, kad gavę elektrinį neįgaliųjų vežimėlį iš karto apžiūrėtumėte, ar jis nebuvo pažeistas gabenant – pageidautina, kol kurjeris vis dar yra.
- ☞ Pasilikite vežimėlio pakuotę, jei vėliau prireiktų grąžinti vežimėlį.

NAUDOKITE TIK PAGAL PASKIRTĮ

Jūsų elektrinis neįgaliųjų vežimėlis sukurtas taip, kad pagerintų jūsų savarankišką judėjimą tiek uždarose patalpose, tiek lauke.

NAUDOJIMAS

Nenaudokite vežimėlio be sumontuotų kojų atramų ir porankių!

Vežimėlis skirtas tik sėdinčiam asmeniui vežti – jis neskirtas atlaikyti ar vežti kitokias tempimo ar gravitacijos jėgas.

Elektrinį neįgaliųjų vežimėlį galima naudoti tik ant tvirto, lygaus paviršiaus toliau nurodytomis sąlygomis:

- Uždarose patalpose (pvz., butuose arba ambulatorijose ir (arba) gyvenamosiose įstaigose)
- Lauke (pvz., asfaltuoti parko takai)
- Niekada nelaikykite vežimėlio ekstremalioje temperatūroje ar pavojingose aplinkos sąlygose, pvz., stiprioje saulės šviesoje, dideliame šaltyje ar sūriame vandenyje.

- Smėlis, dulkės, purvas ar kitos dalelės gali patekti į judančias dalis, todėl jos gali nustoti veikti.

Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis turi daugybę parinkčių, leidžiančių jį pritaikyti prie savo fizinių reikalavimų ir poreikių.

Pagal nacionalines taisykles gali būti draudžiama vežimėlį vežti autobusais, traukiniais, lėktuvais ar sraigtasparniais.

- ☞ Norėdami sužinoti apie visus apribojimus, kreipkitės į konkretų vežėją.
- ☞ Prieš išvykdami pasiteiraukite oro linijų bendrovės apie konkrečias vežimo sąlygas ir bagažo reikalavimus, taikomus jūsų kilmės šalyje ir atostogų kelionės vietoje.

Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis turi būti naudojamas griežtai laikantis specifikacijų ir apribojimų, nurodytų *Techniniai duomenys 56* puslapyje.

REGULIAVIMAS

Užtikrinkite, kad bet kokius reguliavimo, konfigūravimo ar remonto darbus atliktų tik įgaliotasis platintojas.

Elektrinį neįgaliųjų vežimėlį galima reguliuoti, kad jis atitiktų individualius kūno matmenis. Prieš pradėdami naudoti vežimėlį, įgaliotasis platintojas turėtų jį sureguliuoti ir supažindinti jus su jo funkcijomis. Reguluojant atsižvelgiama ir į jūsų fizinius apribojimus, ir į aplinką, kurioje pirmiausia naudosite vežimėlį. Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, kad esate patenkinti, kaip veikia vežimėlis.

Jei platintojas peržiūri (atnaujina) arba iš esmės pakeičia jūsų elektrinį neįgaliųjų vežimėlį nenaudodamas originalių gamintojo dalių, tai gali būti laikoma vežimėlio perpardavimu. Tai reiškia, kad jūsų platintojui gali

tekti iš naujo įvertinti pardavimo sąlygas ir atlikti naują rizikos analizę.

- ☞ Siekiant užtikrinti geriausią vežimėlio veikimą, rekomenduojame reguliariai tikrinti vežimėlio reguliavimą, taip pat atlikti naują patikrinimą, jei atsirastų ilgalaikių sutrikimų ir (arba) negalios pokyčių. Vaikams ir paaugliams ypač rekomenduojama koreguoti kas 6 mėnesius.
- ☞ Rekomenduojame reguliariai tikrintis sveikatą, kad galėtumėte aktyviai naudotis vežimėliu viešajame transporte.

NAUDOJIMAS SU KITŲ GAMINTOJŲ GAMINIAIS

Apskritai bet koks elektrinio neįgaliųjų vežimėlio sujungimas su gamintojo nepateiktomis sudedamosiomis dalimis yra esminis vežimėlio pakeitimas. Kreipkitės į įgaliotąjį platintoją ir sužinokite, ar gamintojas patvirtino šį derinį.

KAI ELEKTRINIŲ NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIU NAUDOJASI KITAS ASMUO

Vežimėlio modulinė konstrukcija leidžia jį pritaikyti naujam naudotojui. Prieš pradėdami naudoti vežimėlį naujam asmeniui, visada reikia atlikti išsamią apžiūrą.

- ☞ Reikalingos higienos priemonės, kurios turi būti vykdomos pagal patvirtintą higienos planą, turi apimti dezinfekciją.

Įgaliotojo platintojo aptarnavimo ir techninės priežiūros vadove pateikiama informacija apie pakartotinį jūsų vežimėlio naudojimą ir pritaikymą.

GAMINIO NAUDOJIMO TRUKMĖ

Apskaičiuota, kad vidutinė gaminio naudojimo trukmė turėtų būti 5 metai, jei gaminys naudojamas pagal paskirtį ir laikomasi visų techninės priežiūros ir aptarnavimo reikalavimų. Gaminio naudojimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo, aplinkos, kurioje jis naudojamas, ir priežiūros. Atsarginėmis dalimis galite prailginti jo naudojimo laiką. Paprastai atsarginių dalių galima įsigyti dar iki 5 metų po to, kai modelis buvo nustotas gaminti.

- ☞ Šis nurodytas numatomas naudojimo laikas nelaikomas garantijos laikotarpio išraiška.

PAGRINDINĖ PADĖTIS

Važiuojant nuo kalno, į kalną arba per kliūtis, sėdynės aukščio, atlošo kampo ir sėdynės posvyrio nustatymai visada turi būti pagrindinė padėtyje.

Bazinė padėtis apibrėžiama taip:

- Jei to nesilaikoma, kyla pavojus, kad vežimėlis apvirs.
- Sėdynės pasvirimas horizontalioje padėtyje (bet ne daugiau kaip 10°)
- Mažiausias sėdynės aukštis

APŽVALGA

Modelis TA IQ RWD

Apžvalgoje pateikiamos pagrindinės elektrinio neįgaliųjų vežimėlio sudedamosios dalys ir valdikliai.

Nr. Pavadinimas

- (1) Galvos atrama
- (2) Nugaros atrama
- (3) Porankis
- (4) Sėdynės pagalvėlė
- (5) Pėdų atrama
- (6) Sukamieji ratukai
- (7) Važiavimo / stūmimo režimo svirtis
- (8) Užrakinama porankio rankena
- (9) Varantieji ratai
- (10) Valdymo modulis
- (11) Priekinės šviesos
- (12) Vardinė plokštėlė
- (13) Galinės šviesos
- (14) Elektronikos dangtelis



Modelis TA IQ FWD

Apžvalgoje pateikiamos pagrindinės elektrinio neįgaliųjų vežimėlio sudedamosios dalys ir valdikliai.

Nr. Pavadinimas

- (1) Galvos atrama
- (2) Nugaros atrama
- (3) Porankis
- (4) Sėdynės pagalvėlė
- (5) Blauzdų atrama
- (6) Pėdų atrama
- (7) Varantieji ratai
- (8) Priekinės šviesos
- (9) Užrakinama porankio rankena
- (10) Valdymo modulis
- (11) Važiavimo / stūmimo režimo svirtis
- (12) Vardinė plokštėlė
- (13) Sukamieji ratukai
- (14) Elektronikos dangtelis
- (15) Galinės šviesos



Modelis TA IQ MWD

Apžvalgoje pateikiamos pagrindinės elektrinio neįgaliųjų vežimėlio sudedamosios dalys ir valdikliai.

Nr. Pavadinimas

- (1) Galvos atrama
- (2) Nugaros atrama
- (3) Porankis
- (4) Sėdynės pagalvėlė
- (5) Blauzdų atrama
- (6) Pėdų atrama
- (7) Priekiniai sukamieji ratukai
- (8) Važiavimo / stūmimo režimo svirtis
- (9) Užrakinama porankio rankena
- (10) Varantieji ratai
- (11) Valdymo modulis
- (12) Priekinės šviesos
- (13) Vardinė plokštėlė
- (14) Galinės šviesos
- (15) Galiniai sukamieji ratukai
- (16) Elektronikos dangtelis



ELEKTRINIO NEJGALIŲJŲ VEŽIMĖLIO TVARKYMAS IR PRIEŽIŪRA


Vežimėlio tvirtinimas

Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis turi būti pritvirtintas taip, kad netyčia nenuriedėtų:

1. Perkelkite abiejose pusėse esančias važiavimo / stūmimo režimo svirtis į važiavimo nustatymą.
2. Išjunkite vežimėlį naudodami valdymo modulį.

Veikimo patikrinimas

Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio veikimą ir saugą reikia patikrinti kiekvieną kartą prieš pradedant jį naudoti.

 Žr. šio vadovo skyrių *Apžiūra prieš važiavimą*.

Važiavimo charakteristikos

Vežimėlio važiavimo kryptį ir greitį (iki nustatytos didžiausios greičio ribos) galite valdyti vairasvirte.

STABDŽIAI

Visada atsargiai ir laiku stabdykite, ypač kai važiuojate link žmonių arba leidžiatės nuo kalno!


Darbinis stabdys

Elektros varikliai veikia kaip mechaniniai stabdžiai, sklandžiai stabdantys vežimėlį be jokio kratymo, kol jis sustoja.

Vežimėlio stabdžių įjungimas


Norėdami švelniai stabdyti vežimėlį, lėtai pastumkite vairasvirtę atgal į pradinę padėtį (neutralią).

Avarinis stabdymas

 Norėdami staigiau sustabdyti vežimėlį, pastumkite vairasvirtę į priešingą pusę.

Stovėjimo stabdys

Stovėjimo stabdžiai veikia tik tada, kai važiavimo / stūmimo režimo svirtis, kuria valdomi abu varikliai, pastumiama į važiavimo padėtį.

 Stovėjimo stabdžiai atsilaisvina automatiškai, kai tik panaudojama vairasvirtė.

Stabdžių įjungimas

Vežimėlio negalima stumti, kai įjungti stabdžiai.

Norėdami įjungti stabdžius, pastumkite abiejose pusėse esančias važiavimo / stūmimo režimo svirtis maždaug 45° kampu link vežimėlio važiuoklės ir nustatykite į važiavimo (vertikalia) padėtį [1].

- ☞ Šios svirtys yra skirtos tam, kad jas valdytų lydintis asmuo.



Stabdžių atleidimas

Į elektrinį neįgaliųjų vežimėlį ir iš jo galima persėsti tik išjungus vežimėlį, kai abiejose pusėse esančios važiavimo / stūmimo režimo svirtys yra važiavimo padėtyje!

Priešingu atveju, netyčia palietus vairasvirte (maitinimo ir (arba) vairavimo svirtį), vežimėlis gali pajudėti. Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus!

Norėdami atleisti stabdžius, abiejose pusėse esančias važiavimo / stūmimo režimo svirtis pastumkite maždaug 45° kampu link amortizatorių į stūmimo padėtį [2].

- ☞ Šios svirtys yra skirtos tam, kad jas valdytų lydintis asmuo.



Pagrindiniai visų elektros funkcijų jungikliai

Visuose „TA Service“ vežimėliuose, pagamintuose po 2021-05-26, standartiškai įrengtas pagrindinis visų elektrinių funkcijų jungiklis, dar vadinamas „Flight“ rinkiniu [3].

Išėmę raktą iš „Flight“ rinkinio galite nutraukti vežimėlio maitinimą [4].

Ši papildoma saugos funkcija, išjungianti maitinimo šaltinį, naudinga vežant vežimėlį lėktuvu arba apsaugant jį nuo vagystės.



Važiavimo / stūmimo režimas

Elektrinį neįgaliųjų vežimėlį galima nustatyti stūmimo režimu tik jei norima atlikti tam tikrą manevrą arba įvykus avarinei situacijai. Tai reikėtų daryti tik lygioje vietovėje, kai vežimėlis stabiliai stovi.

- ☞ Nustačius stūmimo režimą yra išjungiami elektromagnetiniai stabdžiai.
 - Todėl vežimėlį galima stabdyti tik perjungus į važiavimo režimą.
- ☞ Manevruodami vežimėlį laikykitės už nugaros atramos porankių.

Vežimėlio nustatymas stūmimo režimu

1. Išjunkite vežimėlį naudodami valdymo modulį. Jei vežimėlis įjungiamas, kai svirtis nukreipta į stūmimo padėtį, ekrane pasirodo klaidos pranešimas ir pasigirsta garsinis signalas.
 - ☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.
2. Atleiskite stabdžius [1].
 - ☞ Vadovaukitės *Stabdžių atleidimas* 15 puslapyje pateiktais nurodymais.

Dabar vežimėlį galima stumti.



Vežimėlio nustatymas važiavimo režimu

1. Įjunkite stabdžius [2].
 - ☞ Vadovaukitės *Stabdžių įjungimas* 15 puslapyje pateiktais nurodymais.
2. Įjunkite valdymo modulį.
 - ☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.

Dabar su elektriniu neįgaliųjų vežimėliu galima važiuoti.



PARUOŠIMAS NAUDOTI

Atlikite toliau nurodytus nuoseklius veiksmus, kad paruoštumėte elektrinį neįgaliųjų vežimėlį naudoti.

➤ Prieš pirmąją kelionę naudodami valdymo modulį įkraukite akumuliatorius.

1. Baikite pasiruošimą važiuoti.

Perjunkite svirtis į pavaros režimą [1], kad įjungtumėte variklius.


➤ Žr. *Stabdžių įjungimas* 15 puslapyje.

2. Patikrinkite lydžio saugiklio (2) padėtį.

➤ Lydžiusis saugiklis (2) turi būti nuspaustas.




3. Patikrinkite valdymo modulio padėtį.
- ☞ Važiuodami įprastu režimu, valdymo modulį judinkite į priekį ir į vidų, kol jis nusistovės sustojimo padėtyje [3].
4. Įjunkite valdymo modulį.
 - ☞ Nuspauskite valdymo modulio įjungimo / išjungimo mygtuką (4).
 - ☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.

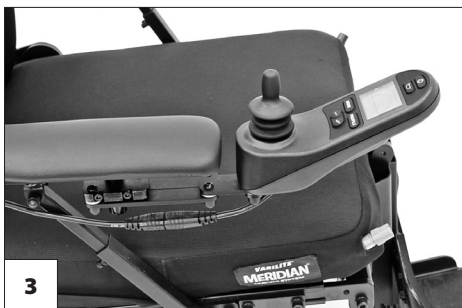

Apžiūra prieš važiavimą

Prieš pradėdami važiuoti, turėtumėte patikrinti:

- ☞ akumuliatoriaus įkrovos lygį;
- ☞ didžiausio greičio nustatymo konfigūraciją;
- Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.

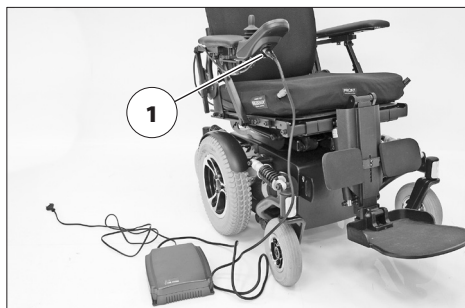

Akumuliatoriaus įkrovimas

Nedėkite į lizdą jokių daiktų, išskyrus akumuliatoriaus įkroviklio kištuką! – Trumpojo jungimo pavojus!

Akumuliatoriai turi būti įkraunami tik sausoje aplinkoje.

Kadangi akumuliatoriaus įkroviklyje yra pavojingos elektros srovės, atsargiai saugokite jį nuo karščio, drėgmės, vandens, pusrų ar lašančių skysčių ir smūgių. – Trumpojo jungimo ir gyvybei pavojingų sužalojimų pavojus!

Įsitinkite, kad aplink įkroviklį yra pakankamai vietos orui cirkuliuoti (neuždenkite jo), kad išsisklaidytų susidariusi šiluma. – Gaisro pavojus!

Įkraudami akumuliatorius padėkite įkroviklį ant tvirto paviršiaus.

Įkraudami niekada nepadėkite akumuliatoriaus įkroviklio ant vežimėlio sėdynės.

- ☞ Įkraudami visada laikykitės akumuliatoriaus įkroviklio naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

1. Pastatykite vežimėlį saugioje vietoje.
 - ☞ Vadovaukitės *Vežimėlio tvirtinimas* 14 puslapyje pateiktais nurodymais.
2. Įkiškite įkroviklio kištuką į valdymo modulio lizdą (1).

3. Įjunkite akumuliatoriaus įkroviklį / įjunkite akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo laidą į atitinkamą lizdą.
 - ☞ Dabar prasidėjo įkrovimo procesas.
 - ☞ Akumuliatorius nebus įkraunamas, jei bus išjungtas lydusis saugiklis (2)!
4. Baigę įkrovimo procesą, atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį nuo elektros tinklo ir ištraukite įkroviklio kištuką iš valdymo modulio lizdo.



Valdymo modulio padėtis

Važiudami įprastai, valdymo modulį passtumkite į priekį ir į vidų [1].

Funkcijų aprašymas

Visi modulio mygtukai ir simboliai išsamiai aprašyti naudojimo vadovo skyriuje *Valdymo modulis*.

Pasukite valdymo modulį į porankio pusę.

Nedėkite plaštakų ir (arba) rankų tarp komponentų. – Suspaudimo pavojus!

Pasukama svirtis [1] leidžia perkelti valdymo modulį šalia porankių [2],

pavyzdžiui, suteikiant jums galimybę

– privažiuoti arčiau stalo.

Porankio padėtis

Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus, jei porankiai lieka vertikaloje padėtyje arba atsukti atgal!

Važiavimo režimu porankiai turi būti atlenkti ir užfiksuoti [3].

Užrakto funkcijos tikrinimas

Patikrinkite, ar užraktai veikia, nesmarkiai patraukdami už porankio.

- Vadovaukitės *Porankio užrakto funkcijos tikrinimas* 30 puslapyje pateiktais nurodymais.



KOJŲ ATRAMOS

Prieš perkelti į elektrinį neįgaliųjų vežimėlį, jis turi būti pritvirtintas, kad netyčia nepajudėtų.

☞ Vadovaukitės *Vežimėlio tvirtinimas* 14 puslapyje pateiktais nurodymais.

Centralizuota kojų atrama

Kad būtų lengviau įlipti į vežimėlį ir iš jo išlipti, galima atlenkti vieną [1] arba dvi [2] pėdų atramas [3]+[4].

- ☞ Neprispauskite pirštų!
- ☞ Prieš pradėdami važiuoti, pėdų atramą (-as) vėl nulenkite žemyn [1].



Elektroninis aukščio reguliavimas

Kai naudojate kojų atramą, laikykite rankas atokiau nuo judančių dalių. – Suspaudimo pavojus!

Jei pėdas pastatysite ant pėdų atramos, kol kojų atrama dar nėra visiškai nusileidusi, kyla suspaudimo pavojus!

Įsitikinkite, kad kojų atramos turi pakankamą išilginę prošvaisą!

☞ Pritvirtintos kojų atramos gali pažeisti grindų dangą ar kitus paviršius!

Naudojant valdymo modulį elektroniniu būdu galima reguliuoti tiek kojų atramos ilgį ir kampą, tiek tik jos ilgį [1]+[2].

☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.

Elektroninis pėdų atramos atlenkimas

Niekada nelieskite ir nereguliuokite reguliavimo mechanizmo, kai pėdų atrama sulankstoma, nes gali kilti suspaudimo pavojus!

Visada žinokite, kur yra jūsų pėdos, kai pėdų atrama sulankstoma, nes gali kilti susižeidimo pavojus!

Pėdų atramą (-as) galima pakelti arba nuleisti elektroniniu būdu, naudojant valdymo modulį. Prieš statydami ant pėdų atramos pėdas įsitikinkite, kad pėdų atrama yra visiškai nusileidusi, t. y. šios funkcijos niekada nenaudokite pėdų atramos kampui reguliuoti (žr. [3]+[4]).

☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.



Pėdų atramos aukščio reguliavimas

Reguliuodami pėdų atramos (-ų) aukštį, niekada nelieskite ir nereguliuokite reguliavimo mechanizmo arba pėdų atramos (-ų) apačios. – Suspaudimo pavojus!

Įsitinkite, kad kojų atrama ir pėdų atrama (-os) turi pakankamą išilginę prošvaisą!

☞ Atlenkus kojų atramą arba pėdų atramą (-as), gali būti pažeistos grindų dangos arba kiti paviršiai!

Valdymo modulių pakelkite ir nuleiskite kojų atramą į reikiamą aukštį [1].

☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.

Dviguba kojų atrama

Padalytų kojų atramų [2] kampą galima reguliuoti elektroniniu būdu. Jas taip pat galima pasukti į šoną arba visiškai nuimti.

Pėdų atramos

Kad būtų lengviau įlipti į vežimėlį ir iš jo išlipti, pėdų atramas (4) galima atlenkti [3] ir (arba) kojų atramas pasukti į šonus.



☞ Neprisipauskite pirštų!

– Nuimkite abi pėdas nuo pėdų atramų.

☞ Prieš pradėdami važiuoti, pėdų atramas vėl nulenkite žemyn [2].

Pėdų atramų sulankstymas

Prieš sulankstydami pėdų atramas visada nukelkite pėdas [3].

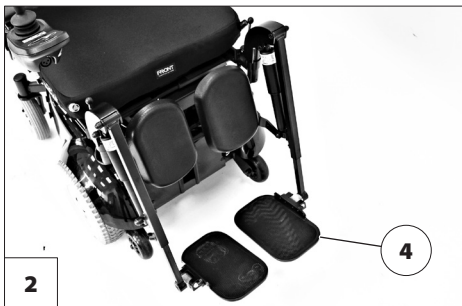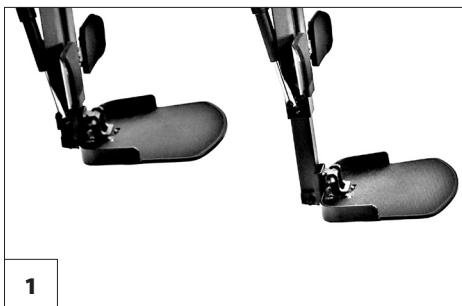

Kojų atramos perkėlimas į šoną

Kojų atramas galima pasukti į šonus, kad būtų lengviau perkelti į elektrinį neįgaliųjų vežimėlį ar iš jo arba kad galėtumėte privažiuoti prie, pavyzdžiui, spintos, lovos, vonios ar pan. [1].

- Atlenkite pėdų atramas, kad būtų galima pasukti kojų atramas.
 - ☞ Vadovaukitės *Pėdų atramos 26* puslapyje pateiktais nurodymais.
- Tada pastumkite atitinkamą fiksavimo svirtį (2) atgal ir pasukite atitinkamą kojų atramą į šoną [1].



Kojų atramų grąžinimas į pradinę padėtį

Norėdami grąžinti kojų atramas į pradinę padėtį, pasukite jas į priekį, kol aiškiai išgirsite, kaip jos nusileidžia į vietą [3].

- ☞ Kai išgirsite, kad kojų atramos pasuktos iki galo, patikrinkite, ar fiksavimo mechanizmas užsifiksavo.
- ☞ Toliau vadovaukitės *Pėdų atramos 26* puslapyje pateiktais nurodymais.



Elektroninis kojų atramos kampo reguliavimas

Kai naudojate kojų atramą, laikykite rankas atokiau nuo judančių dalių. – Suspaudimo pavojus!

Valdymo modulių padidinkite [1] arba sumažinkite [2] kojų atramos kampą iki tinkamo lygio.

☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.



PORANKIAI

Nenaudokite porankių [1] vežimėliui nešti ar kelti.

Važiuoti su vertikaliai arba atgal atlenktu porankiu yra pavojinga [4]!

„Rocker“ porankiai

Porankių atlenkimas

Norėdami atlenkti porankį, nuspauskite užrakto mygtuką (2). Tai leidžia porankį pakelti į viršų [3].

- ⚠ Jei porankis atlenkiamas atgal [4], padidėja nelaimingų atsitikimų pavojus, ypač manevruojant su vežimėliu!

Porankių nulenkimas

Norėdami nulenkti porankį, lenkite jį iki užrakto mygtuko [5], kol išgirsite, kaip užraktas (2) užsifiksuoja.

- ⚠ Įsitikinkite, kad rankos ir kitos kūno dalys yra atokiai nuo tarpo tarp porankio ir užrakto mygtuko!



Porankio užrakto funkcija

Kyla suspaudimo pavojus, kai porankis užfiksuojamas užrakto mygtuku!

Važiavimo režimu porankiai turi būti pasukti į priekį ir žemyn [1].

Porankio užrakto funkcijos tikrinimas

Patikrinkite, ar užraktai veikia, nesmarkiai patraukdami už porankio.

- Vadovaukitės *Porankių nulenkimas* 29 puslapyje pateiktais nurodymais.
- Nustatę, kad užrakto mygtukas užsifiksavo, patraukę už porankio įsitikinkite, kad užraktas veikia tinkamai.

Atlenkiamas porankis

Porankių atlenkimas

Norėdami atlenkti porankį, pastumkite jį atgal [3].

- Jei vežimėlis valdomas su atgal atlenktu porankiu [3], padidėja nelaimingų atsitikimų pavojus, ypač manevruojant!

Porankių nulenkimas

Lenkite porankius žemyn iki atraminio varžto [2].

- Įsitikinkite, kad rankos ir kitos kūno dalys yra atokiai nuo porankio ir vietos tarp porankio ir atraminio varžto!



Pasukamas porankis

Pasukdami porankį atgal į pagrindinę padėtį, laikykite rankas atokiai nuo aplinkinės srities, nes gali kilti suspaudimo pavojus!

Porankio pasukimas link vežimėlio

1. Norėdami pasukti porankį link vežimėlio [2], atlaisvinkite priveržimo rankenėlę (1).
2. Vėl priveržkite rankenėlę (1), kai atramą [2] įstatysite į vietą.

☞ Padidėja nelaimingų atsitikimų pavojus, ypač manevruojant!

Porankio pasukimas tolyn nuo vežimėlio

1. Norėdami pasukti porankį į šoną [3], atlaisvinkite priveržimo rankenėlę (1).

☞ Padidėja nelaimingų atsitikimų pavojus, ypač manevruojant!



Nuleidžiamas laikiklis

Kai valdymo modulis keliamas arba nuleidžiamas, visada laikykite rankas ir kitas kūno dalis atokiai nuo aplinkinės zonos, nes gali kilti suspaudimo pavojus!

Valdymo modulio nuleidimas

Norėdami nuleisti valdymo modulį [4], pastumkite fiksavimo svirtį (5) į priekį.

☞ Norėdami grąžinti valdymo modulį į pradinę padėtį, atsargiai traukite jį į viršų, kol išgirsite, kaip užsifiksuoja fiksavimo svirtis.

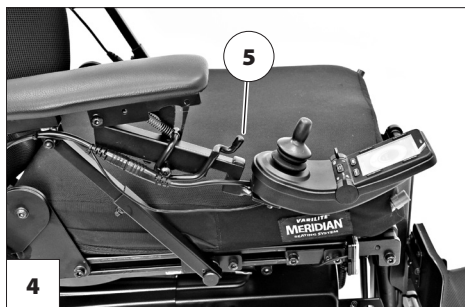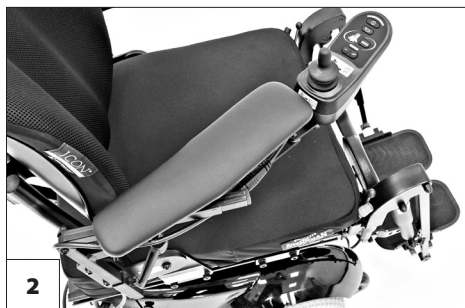

NUGAROS ATRAMA

Reguliuodami nugaros atramą visada įsitinkinkite, kad elektrinis neįgaliųjų vežimėlis stovi ant lygaus paviršiaus. Priešingu atveju kyla pavojus, kad vežimėlis nuokalnėje apvirs!

Elektroniniu būdu reguliuojama nugaros atrama

Nugaros atramą [1] galima reguliuoti elektroniniu būdu.

☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.

Nugaros pagalvėlė

Nugaros pagalvėlė pritvirtinta „Velcro“ juosta prie nugaros atramos rėmo ir gali būti nuimama valyti ar techninei priežiūrai atlikti [2].

☞ Išsamesnės informacijos rasite atskiruose dokumentuose, skirtuose nugaros pagalvėlėms.




Mechaniškai reguliuojama nugaros atrama

Kampo reguliavimas dujiniais amortizatoriais

Nugaros atramos [1] kampas yra reguliuojamas [2]+[3].

1. Patraukite žemyn dujinio amortizatoriaus fiksavimo svirtį (4), kad sureguliuotumėte nugaros atramos kampą.
2. Kai svirtis (4) yra atrakintoje padėtyje, pastumkite nugaros atramą į reikiamą kampą.
3. Atleiskite svirtį (4), kad užfiksuotumėte nugaros atramą vietoje.

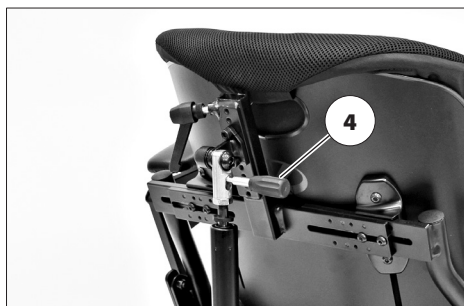

Rankinė nugaros atramos konfigūracija

Nugaros atramos kampas yra reguliuojamas [1]+[2].

1. Ištraukite reguliavimo varžtą (3), kad nustatytumėte nugaros atramos kampą.
 2. Šiek tiek ištraukę reguliavimo varžtą (3) pastumkite nugaros atramą į norimą kampą.
 3. Norėdami užfiksuoti nugaros atramą, įstumkite reguliavimo varžtą (3) į skylę, kad nugaros atrama būtų tinkamiausia-me aukštyje.
- ☞ Stumkite nugaros atramą tol, kol išgirsite, kaip užsifiksuoja reguliavimo varžtas (3).
 - ☞ Įsitikinkite, kad nugaros atrama yra užfiksuota.



SĖDYNĖ

Sėdynės pagalvėlės



Sėdynės pagalvėlė [1] yra pritvirtinta prie pagrindo „Velcro“ juosta ir yra nuimama [2].

Po valymo ar techninės priežiūros sėdynės pagalvę uždėkite atgal ir pritvirtinkite [1] „Velcro“ užsegimu.

Sėdėjimo patogumo reguliavimas

Atidarant ir uždarant vožtuvus (3) galima reguliuoti oro slėgį, kad būtų patogiau.

- 📖 Išsamesnės informacijos rasite atskiruose dokumentuose apie sėdynių pagalvėles.

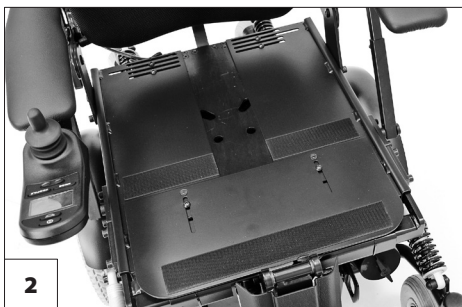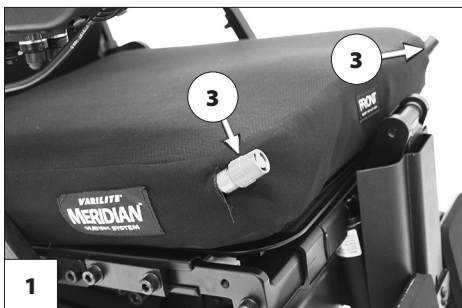

Sėdynės pakėlimas

Prieš reguliuodami sėdynės aukštį, įsitinkite, kad aplinkui nėra kliūčių, nes gali kilti pavojus susižeisti!

Nelieskite ir nesilieskite prie sėdynės apačios prieš reguliuojant sėdynės aukštį arba jį reguliuojant, nes gali kilti suspaudimo pavojus!

Sėdynės pakėlimą galima reguliuoti tik tada, kai vežimėlis saugiai pastatytas ant lygaus paviršiaus.

Nenuleiskite kojų atramos (-ų), kai sėdynė yra keliama!

Tai gali pažeisti grindų paviršių ir kojų atramas, kai sėdynė yra nuleidžiama.

Sėdynės pakėlimą [1] galima reguliuoti valdymo moduliui.

- ☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.
- ☞ Pakėlus sėdynę iš pagrindinės padėties, sėdynės pasvirimas ribojamas iki 14°, o pakėlus sėdynę daugiau kaip 6 cm, vežimėlio greitis ribojamas!
- ☞ Kai sėdynė grįžta į pagrindinę padėtį, šis greičio apribojimas automatiškai panaikinamas.



GALVOS ATRAMA

Galvos atrama yra visiškai nuimama, o jos aukštį ir kampą galima reguliuoti.

Galvos atramos reguliavimas

Norėdami reguliuoti galvos atramos aukštį arba ją nuimti, atlaisvinkite [2] priveržimo rankenėlę (1).

Galvos atramos naudojimas neįgaliųjų transporto priemonėse

Ši galvos atrama yra patvirtinta vežti motorizuotose neįgaliųjų transporto priemonėse!

KREPŠIŲ TVIRTINIMAS

Prie galvos atramos laikiklio galima pritvirtinti dvigubą kabliuką (3), ant kurio galima pakabinti, pavyzdžiui, krepšį.




SAUGOS DIRŽAS

Įsitikinkite, kad po diržu nejstrigo jokių daiktų! Taip išvengiama nemalonaus spaudimo.

Papildomai įrengti saugos diržą gali tik įgaliotasis remonto centras.

Diržo negalima naudoti kaip apsaugos sistemos, skirtos naudotojui ar vežimėliui pritvirtinti vežant motorine transporto priemone.

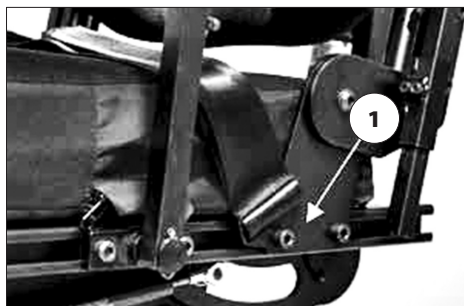

Diržas yra prisuktas prie vežimėlio išorinės dalies 8 mm varžtais (1).

Saugos diržas skirtas stabilizuoti jūsų sėdėjimo poziciją ir neleisti jums išvirsti iš vežimėlio į priekį.

Kai prisegate saugos diržą, traukite abu galus į priekį ir įkiškite juos į sagtį, kol išgirsite garsų spragtelėjimą.

Norėdami atsegti saugos diržą, paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir patraukite diržo galus vieną nuo kito.

- ☞ Saugos diržą galima atlaisvinti ir jis neturi būti per daug įtemptas.

ŠVIESOS

Jei elektrinis neįgaliųjų vežimėlis naudojamas lauke arba viešuosiuose keliuose, jame turėtų būti įrengta LED apšvietimo sistema (1)+(2).

Šviesas galima valdyti per valdymo modulį.

- ☞ Žr. naudojimo vadovo skyrių *Valdymo modulis*.
- ☞ Jei matomumas prastas, ypač tamsoje, reikėtų įjungti šviesas, kad geriau matytumėte ir būtumėte lengviau pastebimi.
- ☞ Įsitinkinkite, kad priekinių šviesų, posūkių signalų, galinių šviesų ir atšvaitų neuždengia laisvi drabužiai ar kiti prie vežimėlio pritvirtinti daiktai.



PERVEŽIMAS IR GABENIMAS

Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio negalima kelti už nugaros atramos, kojų atramų, porankio ar apmušalų!

Gabendami laikykite sėdynės aukštį ir posvirį pagrindinėje padėtyje!


Prieš keldami elektrinį neįgaliųjų vežimėlį, visada jį išjunkite!

Bet kokias dalis, kurios buvo išmontuotos pakrauti, reikia laikyti saugioje vietoje ir prieš važiuojant atsargiai vėl surinkti.

Gabenant nuimamas dalis nereikia imtis jokių specialių atsargumo priemonių (pvz., tvirtinimo atraminuose taškuose).

Norint sutaupyti vietos, gabenant transporto priemonėmis gali prireikti imtis šių priemonių:

- Atlenkite pėdų atramą arba nuimkite kojų atramas.
- Sureguliuokite nugaros atramą.

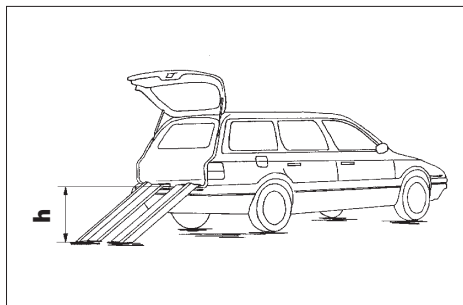

Pakrovimas / iškrovimas

Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio svoris sumažėja, kai pašalinami nuimami komponentai.

Vežimėlį galima pakrauti ir iškrauti naudojant rampą arba keltuvaž.

Ramos ir keltuvai

Būtinai vadovaukitės rampos ar keltuvažo naudojimo vadovo nurodymais.

Atkreipkite dėmesį į gaminio gamintojo specifikacijas.

Didžiausias nurodytas rampos krovinio aukštis turi būti didesnis už aukštį (h) nuo konkrečios transporto priemonės krovimo paviršiaus iki žemės.

Ramos arba keltuvažo keliamoji galia turi būti didesnė už elektrinio neįgaliųjų vežimėlio leistiną bendrą svorį.

Asmeninis vežimas motorinėmis transporto priemonėmis

Vežant keleivius motorine transporto priemone, sėdynės aukštį ir posvirį laikykite pagrindinėje padėtyje!

Ant elektrinio neįgaliųjų vežimėlio esančioje vardinėje plokštelėje nurodyta, ar vežimėlis yra patvirtintas kaip automobilio sėdynė, skirta vežti motorine transporto priemone.

- Daugiau apie tai skaitykite *Simbolių ant vardinės plokštelės paaiškinimas* 71 puslapyje.
- Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai, kurie nėra patvirtinti kaip automobilinės sėdynės, skirtos vežti motorine transporto priemone, žymimi papildomu lipduku. Daugiau informacijos rasite *Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio ženklų paaiškinimas* 70 puslapyje.



Vežimėlio tvirtinimas gabenti

Dabar elektrinį neįgaliųjų vežimėlį reikia pritvirtinti prie tvirtinimo taškų.

- Kiekvienas iš keturių tvirtinimo taškų pažymėtas simboliu [1]+[2].
- Žr. vadovo skyrių *Elektrinių transporto priemonių saugos priemonės ir bendrieji naudojimo nurodymai*. Šį dokumentą ir kitą naudingą informaciją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.ta-service.dk.
- Vežant keleivius motorine transporto priemone, vežimėlio saugos diržų sistema turi būti naudojama kaip apsaugos priemonė.


„Dahl“ tvirtinimo sistema

Jei elektriniame neįgaliųjų vežimėlyje įrengta „Dahl“ tvirtinimo sistema, skirta saugiai vežti, vadovaukitės tvirtinimo sistemos naudojimo vadove pateiktais nurodymais.

Pagal ISO 7176-19, keleivius leidžiama vežti tik su šiomis keleivių apsaugos sistemomis:

- Keturių taškų apsaugos sistema pagal ISO 10542.
- „Dahl“ tvirtinimo stotis MK II.
- „Dahl VarioDock“.

Informacijos apie surinkimą ir naudojimą žr. konkrečios apsaugos sistemos gamintojo naudojimo vadove.

 Šis dokumentas pridedamas prie visų apsaugos sistemų.

Įvairių apsaugos sistemų dokumentaciją taip pat galite rasti spustelėję nuorodas po gaminių antraštėmis mūsų svetainėje www.ta-service.dk.

PADANGOS


Padangos pagamintos iš gumos mišinio, todėl ant kai kurių paviršių (įskaitant sintetines, medines ar parketines grindis, kilimus ir (arba) kilimines dangas bei grindų dangas) gali likti pėdsakų, kuriuos sunku arba neįmanoma pašalinti. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią paviršiaus žalą, atsiradusią dėl nusidėvėjimo ar cheminių reakcijų su padangomis.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Netinkama ar aplaidi transporto priemonės priežiūra ir aptarnavimas riboja gamintojo atsakomybę.

Priežiūra

Šiame priežiūros plane pateikiamos vežimėlio priežiūros gairės.

 Priežiūros plane nenurodoma, kiek iš tikrųjų laiko truks transporto priemonei reikalingi darbai.

Aptarnavimo planas

KADA	KAS	KOMENTARAS
Prieš važiuojant	Apskritai: patikrinkite, ar tinkamai veikia.	Patikrinimą atlikite vieni arba kartu su pagalbininku.
	Elektromagnetinio stabdžio tikrinimas Pastumkite abiejose pusėse esančias važiavimo / stūmimo režimo svirtis į padėtį „drive“ (važiavimas).	Patikrinimą atlikite vieni arba kartu su pagalbininku. Jei elektrinį neįgaliųjų vežimėlį galima stumti, stabdžius reikia skubiai remontuoti įgaliotose remonto dirbtuvėse. – Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus,
ypač vairuojant naktį!	Šviesos Įsitikinkite, kad šviesos ir atšvaitai veikia neprikaištingai.	Patikrinimą atlikite vieni arba kartu su pagalbininku.
Kas 2 savaites (priklausomai nuo bendros ridos)	Patikrinkite oro slėgį padangose. Padangų slėgis:  Žr. <i>Techniniai duomenys</i> 56 puslapyje.	Patikrinimą atlikite vieni arba kartu su pagalbininku. Naudokite padangų slėgio matuoklį.
	Reguliavimo varžtai, varžtų rinkiniai Įsitikinkite, kad visi varžtai ir varžlės yra priveržti.	Patikrinimą atlikite vieni arba kartu su pagalbininku. Priveržkite visus atsilaisvinusius varžtus. Prireikus apsilankykite įgaliotose remonto dirbtuvėse.
Kas 2 mėnesius (priklausomai nuo bendros ridos)	Patikrinkite padangų protektorių nusidėvėjimą. Mažiausias protektoriaus gylis = 1 mm	Atlikite vizualinę apžiūrą vieni arba kartu su pagalbininku. Kreipkitės į įgaliotąsias remonto dirbtuves, kad suremontuotų arba pakeistų susidėvėjusias ar sugadintas padangas.

KADA	KAS	KOMENTARAS
<p>Kas 6 mėnesius (priklausomai nuo to, kaip dažnai naudojamas vežimėlis)</p>	<p>Patikrinkite:</p> <ul style="list-style-type: none"> – švarą; – bendrą būklę. 	<p>Žr. <i>Valymas</i> 52 puslapyje. Atlikite tai vieni arba kartu su pagalbininku.</p>
<p>Gamintojo rekomendacija: kas 12 mėnesių (priklausomai nuo to, kaip dažnai naudojamas vežimėlis)</p>	<p>Patikrinkite:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transporto priemonę; – akumuliatoriaus įkroviklį. 	<p>Atlieka platintojas.</p>

Pagrindinis saugiklis

Lydžiojo saugiklio apsaugos nuo gedimo mygtukas turi būti nuspaustas.

Pagrindinį saugiklį sudaro lydusis saugiklis (1), kuris iššoka esant srovės perkrovai.

Jei saugiklis (1) iššoka, jį reikia vėl įstumti.

- ☞ Jei saugiklis ir toliau suveikia, nuvežkite transporto priemonę į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad būtų įvertinta problemos priežastis.
- ☞ Žr. *Techniniai duomenys* 56 puslapyje.



Šviesos

Lemputės (1) + (2) yra ilgaamžės LED lemputės.

- ☛ Sugedusi LED lemputė turi būti nedelsiant remontuojama įgaliotose remonto dirbtuvėse.

Šviesų veikimas

Šviesos turi būti sureguliuoti taip, kad apatinis šviesos spindulio kraštas būtų maždaug 3 metrų atstumu prieš vežimėlį, kai sėdynė yra pakreipta žemyn pagrindinėje padėtyje.

- ☛ Prireikus apsilankykite įgaliotose remonto dirbtuvėse ir atlikite reguliavimą.



Trikčių šalinimas

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Prijungus valdymo modulį, nešviečia baterijos indikatorius.	Akumuliatoriaus saugiklis sugedęs arba netinkamai sumontuotas.	Pakeiskite sugedusį saugiklį / išvalykite kontaktus ir tinkamai jį įdėkite.
	Maitinimo kištukas neįsikįs į maitinimo šaltinį.	Apžiūrėkite jungtis.
Kai vežimėlis įjungiamas, akumuliatoriaus indikatorius mirksi ir pasigirsta garsinis signalas.	Vienas arba abu varantieji varikliai nustatyti stūmimo režimu.	Perkelkite abiejose pusėse esančias važiavimo / stūmimo režimo svirtis į važiavimo padėtį.
	Netinkamai prijungta varančiųjų variklių jungtis.	Apžiūrėkite jungtis.
	Elektronikos problema.	Turi būti remonuojama įgaliotose remonto dirbtuvėse. Stūmimo režimas Važiavimo / stūmimo režimo svirtis važiavimo padėtyje.
	Kiti veikimo gedimai	Žr. valdymo modulio naudojimo vadovo skyrių „Trikčių šalinimas“.
Neveikia šviesos.	Sugedusi LED lemputė	Leiskite įgaliotoms remonto dirbtuvėms atlikti remontą ir (arba) pakeitimą.
	Sugedęs valdymo arba apšvietimo modulis	Leiskite įgaliotoms remonto dirbtuvėms atlikti remontą ir (arba) pakeitimą.

PAGRINDINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

Šios saugos priemonės yra ištrauka iš *Saugos priemonių ir bendrųjų naudojimo nurodymų*, kuriuos galima rasti mūsų interneto svetainėje www.ta-service.dk.

Nekiškite pirštų į atvirus vežimėlio rėmo vamzdžius (pvz., kai nuimtos kojų atramos arba atlenktas porankis), nes kyla pavojus susižeisti!

Naudodamiesi elektriniu neįgaliųjų vežimėliu, ypač sustoję arba važiuodami kylančiu / žemėjančiu šlaitu, laikykitės saugios sėdėjimo pozicijos. Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus!

Kad sėdėjimo pozicija būtų saugi, nugarą turi būti tiesiai su nugaros pagalvėle, o dubuo turi būti visiškai priglautas prie sėdynės galo.

Persėsti iš vežimėlio galima tik nuožulnioje vietovėje ir tik būtinais atvejais, padedant lydinčiam asmeniui ir (arba) asistentui! Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus!

Pakreipimą galima reguliuoti tik tada, kai elektrinis neįgaliųjų vežimėlis stovi ant lygaus, horizontalaus paviršiaus. Priešingu atveju kyla pavojus, kad vežimėlis nuokalnėje apvirs!

Jei nugaros atramos kampas reguliuojamas, padidėja apvirtimo pavojus.

Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad sėdynės posvyris nėra nustatytas netinkamai ir kad jis leidžia sėdėti saugioje pozicijoje.

Prieš ir per kelionę įsitikinkite, kad tarpas tarp kojų atramos (-ų) turi pakankamą išilginę prošvaisą. Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus!

Naudodamiesi elektriniu neįgaliųjų vežimėliu neturėtumėte rūkyti.

Tiesioginiuose saulės spinduliuose sėdynės užvalkalas (pagalvėlė), porankių pagalvėlės, kojų atramos ir rankenos (svirtys) gali įkaisti iki aukštesnės nei 41 °C temperatūros. Tai gali sužeisti neapsaugotą odą! Stovėkite pavėsyje, kad elektrinio neįgaliųjų vežimėlio paviršiai neįkaistų.

Krepšio laikiklis (priedas), kurį galima pritvirtinti prie galvos atramos laikiklio, susideda iš specialių kabliukų, ant kurių galima pakabinti, pvz., krepšį. Didžiausia leistina bendra krepšio kabliukų apkrova yra 5 kg.

Į vežimėlį įsėskite / iš vežimėlio išlipkite tik tada, kai jis yra išjungtas, o važiavimo / stūmimo režimo svirtis yra važiavimo padėtyje; priešingu atveju, netyčia palietus vairasvirtę, vežimėlis gali pajudėti! Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus!

Lydintieji asmenys

Prieš padėdamas jums, jus lydintis asmuo turėtų būti informuotas apie visas pavojingas situacijas. Visos sudedamosios dalys, kurias jus lydintis asmuo valdo vežimėlyje, turi būti patikimai pritvirtintos.

Išlipimas iš elektrinio neįgaliųjų vežimėlio

Privažiuokite su vežimėliu kuo arčiau tos vietos, kurioje planuojate išlipiti iš vežimėlio.

- ☞ Būtina laikytis su tuo susijusių atsargumo priemonių, nurodytų *Vežimėlio tvirtinimas* 14 puslapyje *Kojų atramos* 24 puslapyje ir *Porankių atlenkimas* 29 puslapyje.
- ☞ Rekomenduojame, kad kas nors jums padėtų išlipiti iš vežimėlio.

Daiktų pakėlimas

Venkite lenkti viršutinę kūno dalį į priekį, į šoną ar atgal, ypač kai keliate ar padedate sunkius daiktus. Gali kilti elektrinio neįgaliųjų vežimėlio apvirtimo pavojus, ypač jei sėdynės plotis yra siauras, o sėdynės aukštis (sėdynės pagalvėlės) – didelis!

Važiavimas nuolydžiais arba stačiais keliais

Kai kelio nuolydis viršija tam tikrą ribą, vežimėlio stabilumas, stabdymas ir vairavimas dėl sumažėjusio sukibimo pablogėja ir padidėja apvirtimo pavojus.

- ☞ Žr. *Techniniai duomenys* 56 puslapyje.

Niekada nesilenkite į apatinę šlaitų ir kelių dangos pusę arba kelius su nuolydžiu.

Visada į kalnus ir nuo jų važiuokite nedideliu greičiu.

Važiuokite tinkamu greičiu, kai važiuojate į kalną arba nuo kalno.

Venkite perjungti į stūmimo režimą, kai kykate į šlaitą arba leidžiatės nuo jo. Automatiniai stabdžiai neveikia, kai vežimėlis veikia stūmimo režimu.

Venkite stumti vežimėlį į šlaitą arba nuo jo.

Važiuojant posūkiuose arba sukant šlaitu aukštyn ar žemyn kyla pavojus apvirtti.

Venkite važiuoti į viršų ar žemyn nuolydžiais, kurie yra prastai padengti. Net ir nedidelis ledas, vandens, samanų ar dumblių kiekis ant kelio gali lemti, kad vežimėlis praras sukibimą su keliu ir nekontroliuojamai paslys. Tokiais atvejais nedelsdami perjunkite vairasvirtę į neutralią padėtį.

Važiuojant nuo kalno stabdymo jėga yra gerokai mažesnė, nei važiuojant lygiu keliu, o jei kelio sąlygos prastesnės (pvz., šlapia dangą, sniegas, žvyras, purvas), ji dar labiau sumažėja. Atsargiai ir kontroliuodami stabdykite, kad išvengtumėte pavojingo slydimo ir vežimėlio kontrolės praradimo.

Kad išvengtumėte pavojingo staigaus sustojimo, artėdami prie kalno apačios, įsitinkinkite, kad pėdų atrama (-os) yra pakankamai aukštai, kad nesiliestų su žeme.

Kelio dangos su šoniniu nuolydžiu (pvz., šaligatviai su nuolydžiu iš abiejų pusių) gali lemti vežimėlio pasislinkimą link apatinės dangos pusės. Jūs arba jus lydintis asmuo galite tai kompensuoti vairuodami priešinga kryptimi.

Manevravimas per kliūtis

Galimybė vežimėlį manevruoti per kliūtis, be kita ko, priklauso nuo kelio dangos nuolydžio ir kojų atramos padėties.

Manevruoti per kliūtį yra pavojinga! Gali kilti pavojus vežimėliui apvirtti!

Manevravimas per kliūtį – tai ypatinga pavojaus situacija, kai reikia atsizvelgti į daugybę įvairių saugos priemonių, pvz., šlaitus ir važiuojamąją dangą su šoniniais nuolydžiais.

Kiek įmanoma apvažiuokite kliūtis, pavyzdžiui, kelio įtrūkimus ar griovelius, geležinkelio bėgius, kanalizacijos dangčius ar kitus kelyje esančius pavojus.

Per mažesnes kliūtis, pvz., atbrailas ir (arba) kraštas, visada važiuokite lėtai ir tiesiu kampu (90°). Važiuokite į priekį ir priartėkite prie kliūtis per maždaug 0,5 m atstumą, kad priekinės ir galinės padangos vienu metu pervaziuotų per kliūtį. Jei to nepadarysite, vežimėlis gali apvirsti ir galite iš jo iškristi!

Laikykitės saugaus atstumo iki nuokalnių, laiptų, šlaitų, pylimų ir t. t., kad turėtumėte pakankamai erdvės reaguoti, stabdyti ir pasukti.

Jei įmanoma, pasikvieskite vieną ar daugiau pagalbininkų, kad pakeltų jus iš vežimėlio ir nuneštų į paskirties vietą.

Važiuodami per laiptelį (pvz., šaligatvio bortelį) galite lengvai iškristi iš vežimėlio, jei pėdų atrama (-os) ir kojų atrama atsitrenks į kelio dangą. Būkite itin atidūs kirsdami geležinkelio bėgius. Galite atsitiktinai nukrypti nuo savo kurso!

Įprastais elektriniais neįgaliųjų vežimėliais neįmanoma saugiai judėti laiptais.

Elektros sistema

Klaidingos ir (arba) netinkamos važiavimo charakteristikų modifikacijos gali turėti įtakos vežimėliui ir jo saugai. Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus!


Niekada negalima gadinti vežimėlio elektrinės valdymo sistemos.

Jei elektrinis neįgaliųjų vežimėlis elgiasi keistai arba važiuoja nekontroliuojamai, nedelsdami perjunkite vairasvirtę į neutralią padėtį ir (arba) išjunkite vežimėlį.

Vežimas viešuoju transportu

Jūsų elektrinis neįgaliųjų vežimėlis nėra skirtas vežti keleivius viešojo transporto priemonėmis. Gali būti apribojimų. Rekomenduojame naudoti sėdynę, pritvirtintą prie viešojo transporto priemonės.

Jei vis dėlto neišvengiama vežti vežimėlyje sėdint, būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- Naudokitės viešojo transporto įmonės neįgaliesiems skirta vieta.
 - Prieš pastatydami vežimėlį įsitinkinkite, kad laikotės vežimo įmonės taisyklių.
 - Pastatykite vežimėlį rezervuotoje vietoje taip, kad jis būtų atsuktas važiavimo kryptimi.
 - Vežimėlis turi būti pastatytas rezervuotoje vietoje taip, kad atlošas būtų prigudęs prie atraminės konstrukcijos.
 - Viena vežimėlio pusė taip pat turėtų būti atremta į nejudančią konstrukciją, kad vežimėlis nenuslystų per avariją ar staigiai stabdant.
 - Įsitinkinkite, kad varikliai nustatyti į važiavimo padėtį ir kad įjungtas stovėjimo stabdys.
-  Vadovaukitės *Stovėjimo stabdys* 14 puslapyje pateiktais nurodymais.

Važiavimas viešuosiuose keliuose

Laikykitės visų nacionalinių taisyklių, taikomų važiuojant viešaisiais keliais, ir teiraukitės įgaliotojo platintojo apie visus reikiamus priedus.

Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis gali būti pristatomas su papildomomis šviesomis. Sistemą sudaro 2 priekinės šviesos, 2 galinės šviesos ir tvirtinimo laikikliai.

Esant blogam matomumui arba naktį rekomenduojame įrengti šviesas ir važiuoti su įjungtomis šviesomis, kad pagerintumėte matomumą ir būtumėte lengviau pastebimi.

- ☞ Važiuodamas viešaisiais keliais vairuotojas yra atsakingas už vežimėlio funkcinę ir eksploatacinę saugą.
- ☞ Važiuodami viešaisiais keliais visada laikykitės visų galiojančių kelių eismo taisyklių.
- ☞ Jei važiuojate naktį, rekomenduojame dėvėti ryškius, matomus drabužius, kad būtumėte lengviau pastebimi.
- ☞ Venkite važiuoti važiuojamąja kelio dalytimi ir dviračių takais, kai važiuojate naktį.
- ☞ Įsitikinkite, kad šviesų neuždengia laisvi drabužiai ar kiti prie vežimėlio pritvirtinti daiktai.

VALYMAS

Prieš pradėdami valyti, visada išjunkite elektrinį neįgaliųjų vežimėlį.

Nejoniniai plovikliai, tirpikliai ir ypač alkoholis gali reaguoti su sintetinėmis dangomis.

Niekada neplaukite elektrinio neįgaliųjų vežimėlio ir neplaukite jo slėgiu. Gali kilti trumpojo jungimo pavojus!

Prie pagalvėlių ir užvalkalų paprastai pridėdami valymo nurodymai (priežiūros etiketė).

☞ Vadovaukitės *Skalbimo nurodymų simbolių paaiškinimas* 72 puslapyje pateiktais nurodymais.

Kitais atvejais taikomos šios atsargumo priemonės:

- ☞ Valykite pagalvėles šiltu vandeniu ir skalbimo skysčiu.
- ☞ Dėmes galima pašalinti kempine arba minkštu šepetėliu.
- ☞ Įsisenėjusioms dėmėms pašalinti naudokite įprastą ploviklį.
- ☞ Jei vežimėlyje įrengta „Varilite“ nugaros sistema, sėdynės užvalkalą ir nugaros pagalvėlę galima skalbti skalbyklėje. Vykdykite nurodymus.

Po plovimo sudrėkinkite švariu vandeniu ir palikite išdžiūti.

Važiuoklę ir ratus nuvalykite švelniu valikliu, tada kruopščiai išdžiovinkite.

- ☞ Patikrinkite, ar rėmas nėra pažeistas korozijos ir kitų pažeidimų.
- ☞ Sintetines medžiagas galima valyti tik šiltu vandeniu ir neutraliu plovikliu arba skalbimo muilu.
- ☞ Jei naudojate įprastą sintetinį ploviklį, laikykitės gamintojo nurodymų.

Prieš važiuojant šviesos visada turėtų būti švarios, taip pat reikia patikrinti, ar jie tinkamai veikia.

☞ Visada saugokite elektrinius komponentus nuo vandens ir drėgmės!

- Purškiamas vanduo gali pažeisti elektroniką ir valdymo modulį.

Reikėtų naudoti vandenyje tirpius, silikono neturinčius ploviklius ir valymo priemones.

☞ Vadovaukitės gaminio gamintojo nurodymais.

Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiui, tirpiklių, kietų šepetėlių ir pan.

Išsamesnės informacijos apie valymą ir priežiūrą rasite mūsų svetainėje www.ta-service.dk.

Apdoroti paviršiai

Išskirtinė vežimėlio paviršiaus danga užtikrina geriausią įmanomą apsaugą nuo korozijos.

Retkarčiais sutepkite judančias dalis nedideliu kiekiu tepimo alyvos, taip pagerinsite jų veikimą.

Dezinfekcija

Jei gaminį naudoja keli asmenys (pvz., globos įstaigoje), reikėtų naudoti įprastas dezinfekcines medžiagas.

☞ Prieš dezinfekuodami nuvalykite pagalvėles ir rankenas / svirteles.

☞ Leidžiama purkšti ir šluostyti patvirtintomis, pripažintomis dezinfekcinėmis medžiagomis.

Informacijos apie išbandytas, pripažintas dezinfekcines medžiagas ir dezinfekcijos procedūras galima gauti iš nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros institucijos.

☞ Dezinfekcinės medžiagos gali pažeisti tam tikrus paviršius ir ilginiui pabloginti komponentų veikimą.

☞ Vadovaukitės gaminio gamintojo nurodymais.

REMONTAS

Iš esmės remontą turėtų atlikti tik įgalioti platintojai.

Surinkimas

Galite visiškai pasitikėti savo platintoju, kuris atlieka remontą. Jis buvo instrukuotas, kaip atlikti šį darbą.

Priežiūra

Jei turite klausimų ar reikia pagalbos, kreipkitės į platintoją, kuris jums patars ir atliks priežiūrą bei remontą.

Atsarginės dalys

Atsarginių dalių galima įsigyti tik iš platintojo. Atliekant remontą galima naudoti tik originalias atsargines dalis!

- Kitų gamintojų komponentai gali sukelti gedimus.

Jūsų platintojas turi atsarginių dalių sąrašą su atitinkamais dalių numeriais ir schemomis.

Norėdami užtikrinti, kad gausite tinkamas atsargines dalis, visada nurodykite teisingą elektrinio neįgalųjų vežimėlio serijos numerį (SN)! Šį numerį rasite ant vardinės plokštelės.

Techninės priežiūros centrui atliekant bet kokius vežimėlio remonto darbus, turi būti pateikta papildoma informacija, pavyzdžiui, surinkimo ir naudojimo informacija iš naudojimo vadovo, taip pat turi būti pažymėta bet kokių pakeitimų data ir perduota užsakant atsargines dalis.


Taip bus išvengta netikslių užsakymų, kai atsarginės dalys užsakomos vėliau.

Ilgalaikio laikymo atsargumo priemonės

Jei vežimėlis nebus naudojamas ilgesnį laiką, būtina imtis šių atsargumo priemonių:

- Bent kartą per mėnesį 16 valandų kraukite akumuliatorius.
- Būtina užtikrinti nustatytą laikymo temperatūrą.
 - Vadovaukitės *Techniniai duomenys* 56 puslapyje pateiktais nurodymais.

ŠALINIMAS

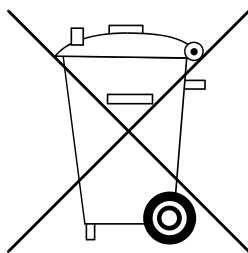

Vežimėlis turi būti šalinamas pagal galiojančias nacionalines taisykles.

Kreipkitės į savo savivaldybę, kad sužinotumėte informaciją apie vietinį aplinkosaugos perdirbimo centrą.

Naudojimo vadovas platintojams

Mūsų svetainėje www.ta-service.dk rasite šio elektrinio neįgaliųjų vežimėlio aptarnavimo ir techninės priežiūros vadovą, kuriame pateikiama ši informacija:

1. Konfigūracija, kurią galima atlikti naudojant įrankius.
2. Nuoseklūs svarbių remonto darbų procedūrų veiksmų aprašymai.
3. Pastabos apie konkrečių modelių pakeitimus.
4. Kasmetinio patikrinimo kontrolinis sąrašas.

Tai apima privalomus funkcinius patikrinimus ir nurodymus, susijusius su

tikrinimo darbais.

☞ Tačiau sąrašas neapima faktinės priežiūros, kurios reikia transporto priemonei.

Tinkamai atlikę kasmetinį patikrinimą, pažymėkite atliktą patikrinimą naudojimo vadove.

Papildomų tikrinimo dokumentų šabloną prireikus galima nukopijuoti iš aptarnavimo ir techninės priežiūros vadovo. Jei jis naudojamas, jis turėtų būti pridėtas prie naudojimo vadovo.

Važiavimo charakteristikų programavimas

Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio važiavimo charakteristikas galima konfigūruoti naudojant programavimo įrenginį.

☞ Žr. *Aptarnavimo ir techninės priežiūros vadovą*.

Vežimėlio važiavimo charakteristikos turėtų būti nuolat pritaikomos prie konkretaus naudotojo poreikių ir įgūdžių lygio.

☞ Programavimas turi būti pritaikytas naudotojui. Reikia atsižvelgti į asmens refleksus, bendrą sveikatos būklę ir fizinės bei protinės galimybes. Šiuo atveju gali būti labai naudinga pasikonsultuoti su naudotojo gydytoju arba terapeutu.

☞ Bet koks gamintojo numatytųjų programavimo nuostatų pakeitimas gali padidinti nelaimingų atsitikimų pavojų.

☞ Galimas apvirtimo pavojus!

TECHNINIAI DUOMENYS

Visa skyriuje *Techniniai duomenys* pateikta informacija taikoma standartiniam modeliui.

Matavimo paklaidos ± 15 mm, $\pm 2^\circ$

Didžiausio leistino naudotojo svorio apskaičiavimas:

Bendrąją keliamąją galią galima apskaičiuoti prie didžiausio leistino naudotojo svorio pridėjus tuščio elektrinio neįgaliųjų vežimėlio svorį.

Papildomas svoris dėl papildomų dalių ar bagažo sumažina didžiausią leistiną naudotojo svorį.

Pavyzdys:

Naudotojas nori pasiimti 5 kg sveriantį bagažą. Dėl to didžiausias leistinas naudotojo svoris sumažėja 5 kg.

Pneumatinių padangų oro slėgis

Didžiausias oro slėgis nurodytas abiejose padangos pusėse.

Oro slėgis – sukamieji ratukai

Standartinis:

2,0 barai = 29 psi

Oro slėgis – varantieji ratai

Standartinis:

3,0–4,0 barai = 44–58 psi

Veikimo nuotolis

Mūsų nurodyti nominalūs duomenys yra realūs, jei visiškai laikomasi ISO 7176-4 standarto.

Veikimo nuotolis labiausiai priklauso nuo šių veiksnių:

- akumuliatoriaus būklės;
- naudotojo svorio;
- važiavimo greičio;
- elgesio važiuojant;
- kelių būklės;
- važiavimo sąlygų;
- aplinkos temperatūros.

Veikimo nuotolį labiausiai riboja:

- dažnas važiavimas ant rampų;
- nepakankamai įkrauti akumuliatoriai;
- žema aplinkos temperatūra (pvz., žiema);
- dažnas važiavimas ir stabdymas (pvz., prekybos centruose);
- senstantys sulfatuoti akumuliatoriai;
- staigūs priverstiniai vairavimo manevrai;
- sumažintas važiavimo greitis (ypač pėsčiųjų greitis).

Praktikoje veikimo nuotolis, kurį paprastai galima pasiekti įprastomis sąlygomis, paprastai sumažėja 40–80 %, palyginti su var-dine verte.

Važiavimo charakteristikos važiuojant nuolydžiais

Saugumo sumetimais vežimėlį ant nuolydžių, viršijančių leistinas ribas, aukštyn ir žemyn galima eksploatuoti tik be vairuotojo (pvz., ant rampų)!

Taikomi standartai

Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis atitinka šiuos standartus:

- EN 12184: 2014
- ISO 7176-8: 2014
- ISO 7176-19: 2008
 - ☞ Susidūrimo bandymai, kai vežimėlis buvo prijungtas prie transporto priemonės apsaugos sistemos, buvo atliekami pagal D priede nurodytus bandymų metodus.
- ISO 10542-5: 2008

Susidūrimo bandymas buvo atliktas ir patvirtintas su šiomis apsaugos sistemomis:
- Keturių taškų apsaugos sistema pagal ISO 10542.
- „Dahl“ tvirtinimo stotis MK II.
- „Dahl VarioDock“.
 - ☞ Prie gaminių pridedami atitinkami gaminio dokumentai.
 - ☞ Buvo įvertinta „Dahl“ tvirtinimo sistemos gabenimo sauga.

Pagal standartą EN 12184 šie modeliai priskiriami B tipo klasei.

Mūsų moduliai ir komponentai atitinka EN 1021-2 standarto reikalavimus dėl atsparumo degumui.

TA IQ RWD modelio specifikacijos, atitinkančios ISO 7176-15 standartą

	maž.	didž.
Gabaritinis ilgis (matuojamas esant 0° sėdynės posvyriui)	940 mm	1060 mm
Gabaritinis plotis	630 mm	720 mm
Bendras svoris		300 kg
Naudotojo svoris (įskaitant naudingąją apkrovą)		140 kg
Naudotojo svoris, kai gaminys naudojamas sėdėti motorinėje transporto priemonėje („Dahl“ tvirtinimo sistema, išbandyta susidūrimo metu pagal ISO 7176-19 standartą)		136 kg
Sunkiausias dalies svoris		26 kg
Faktinis sėdynės gylis	250 mm	590 mm
Faktinis sėdynės plotis „IQ Junior“	370 mm 250 mm	550 mm 300 mm
Sėdynės paviršiaus aukštis ties priekiniu kraštu (be sėdynės pagalvėlės) su 0° sėdynės posvyriui	380 mm	680 mm
Elektroninis sėdynės kampas	0°	45°
Elektroninis sėdynės pakėlimas		300 mm
Mechaninės nugaros atramos kampas (matuojama pagal vertikalią padėtį nuo sėdynės plokštės)	80°	165°
Elektroninės nugaros atramos kampas (matuojama pagal vertikalią padėtį nuo sėdynės plokštės)	80°	165°
Nugaros atramos aukštis	540 mm	665 mm
Sėdynės kojų atramos (šlaunų ilgis, matuojamas be sėdynės pagalvėlės)	370 mm	580 mm
Statinis stabilumas važiuojant nuo kalno	19,6°	19,6°
Statinis stabilumas važiuojant į kalną	14,3°	19,6°
Statinis stabilumas į šonus	13,0°	19,6°
Dinaminis stabilumas važiuojant į kalną		10°
Kampas – kojų atramos / sėdynės paviršius	90°	180°
Porankio aukštis nuo sėdimosios dalies paviršiaus (be sėdynės pagalvėlės)	185 mm	285 mm
Nugaros atrama iki priekinio porankio krašto	370 mm	475 mm
Kliūčių prošvaisa		80 mm
Mažiausias posūkio spindulys (matuojama esant 0° sėdynės posvyriui)	650 mm	
Bandomojo manekeno svoris (ISO 7176-8)		140 kg

	maž.	didž.
Didžiausias važiavimo į priekį greitis (priklauso nuo įrangos)	6 km/h	12 km/h
Mažiausias stabdymo kelias važiuojant didžiausiu greičiu	2810 mm	
Veikimo nuotolis (važiuojant 6 km/h greičiu) (priklauso nuo akumuliatoriaus talpos)		40 km
Veikimo nuotolis (važiuojant 10 km/h ir 12 km/h greičiu) (priklauso nuo akumuliatoriaus talpos)		35 km
Ašis, horizontali padėtis	– mm	– mm

Papildomi techniniai TA IQ RWD modelio duomenys

	maž.	didž.
Triukšmo lygis		70 dB(A)
IP klasė		IPX4
Mažiausias posūkio spindulys	1150 mm	
Pavaros valdiklio išėjimas		24 V / 120 A
Variklio galia		2 x 350 W
Pagrindinis saugiklis		80 A
Šviesos (papildoma įranga)		24 V LED tipas
Naudingoji apkrova		5 kg
Priekinės ašies slėgis (didžiausias leistinas)		150 kg
Galinės ašies slėgis (didžiausias leistinas)		200 kg
Išilginė prošvaiva		70 mm
Tuščias svoris (su akumulatoriais)	150 kg	160 kg
Tuščias svoris (be akumuliatorių)	99 kg	109 kg
Gabaritinis aukštis	930 mm	1100 mm

Gabenimo matmenys

Ilgis (be kojų atramų)	820 mm	
Plotis	630 mm	720 mm
Aukštis <small>(atlošas užlenktas ant sėdynės, sėdynės pagalvėlė nuimta nuo sėdynės plokštės ir padėta ant nugaros atramos viršutinės dalies)</small>	700 mm	

Termodinaminiai duomenys

Aplinkos temperatūros diapazonas	nuo -20 °C iki +50 °C
Laikymo temperatūra su akumulatoriais	nuo -20 °C iki +50 °C

Sukamieji ratukai

200x50 mm skersmens (8 col.)	Padangos, daugiausia 2,0 barai (29 psi / 200 kPa) atsparūs pradūrimui
------------------------------	---

	maž.	didž.
<u>Varantieji ratai</u>		
364x75 mm skersmens (14x3,5 col.)	Padangos, daugiausia 2,5 barai (36 psi / 250 kPa) atsparūs pradūrimui	
<u>Akumuliatoriai</u>		
2 x 12 V 75 Ah (5 h) / 80 Ah (20 h)	Uždari, nereikalaujantys priežiūros	
Didžiausi akumuliatoriaus matmenys (lxPxA)	260x168x215 mm	
Įkrovimo srovė		8 A

TA IQ FWD modelio specifikacijos, atitinkančios ISO 7176-15 standartą

	maž.	didž.
Gabaritinis ilgis (matuojamas esant 0° sėdynės posvyriui)	985 mm	1100 mm
Gabaritinis plotis	630 mm	720 mm
Bendras svoris		300 kg
Naudotojo svoris (įskaitant naudingąją apkrovą)		140 kg
Naudotojo svoris, kai gaminys naudojamas sėdėti motorinėje transporto priemonėje („Dahl“ tvirtinimo sistema, išbandyta susidūrimo metu pagal ISO 7176-19 standartą)		136 kg
Sunkiausias dalies svoris		26 kg
Faktinis sėdynės gylis	250 mm	590 mm
Faktinis sėdynės plotis „IQ Junior“	370 mm 250 mm	550 mm 300 mm
Sėdynės paviršiaus aukštis ties priekiniu kraštu (be sėdynės pagalvėlės) su 0° sėdynės posvyriu	380 mm	680 mm
Elektroninis sėdynės kampas	0°	45°
Elektroninis sėdynės pakėlimas		300 mm
Mechaninės nugaros atramos kampas (matuojama pagal vertikalią padėtį nuo sėdynės plokštės)	80°	165°
Elektroninės nugaros atramos kampas (matuojama pagal vertikalią padėtį nuo sėdynės plokštės)	80°	165°
Nugaros atramos aukštis	540 mm	665 mm
Sėdynės kojų atramos (šilaujų ilgis, matuojamas be sėdynės pagalvėlės)	370 mm	580 mm
Statinis stabilumas važiuojant nuo kalno	15,9°	19,6°
Statinis stabilumas važiuojant į kalną	19,6°	19,6°
Statinis stabilumas į šonus	13,5°	19,0°
Dinaminis stabilumas važiuojant į kalną		10°
Kampas – kojų atramos / sėdynės paviršius	90°	180°
Porankio aukštis nuo sėdimosios dalies paviršiaus (be sėdynės pagalvėlės)	185 mm	285 mm
Nugaros atrama iki priekinio porankio krašto	370 mm	475 mm
Kliūčių prošvaisa		100 mm
Bandomojo manekeno svoris (ISO 7176-8)		140 kg
Didžiausias važiavimo į priekį greitis (priklauso nuo įrangos)	6 km/h	12 km/h

	maž.	didž.
Mažiausias stabdymo kelias važiuojant didžiausiu greičiu	2620 mm	
Veikimo nuotolis (važiuojant 6 km/h greičiu) <small>(priklauso nuo akumuliatoriaus talpos)</small>		40 km
Veikimo nuotolis (važiuojant 10 km/h ir 12 km/h greičiu) <small>(priklauso nuo akumuliatoriaus talpos)</small>		35 km
Ašis, horizontali padėtis	– mm	– mm

Papildomi techniniai TA IQ FWD modelio duomenys

	maž.	didž.
Triukšmo lygis		70 dB(A)
IP klasė		IPX4
Mažiausias posūkio spindulys	1170 mm	
Pavaros valdiklio išėjimas		24 V / 120 A
Variklio galia		2 x 350 W
Pagrindinis saugiklis		80 A
Šviesos (papildoma įranga)		24 V LED tipas
Naudingoji apkrova		5 kg
Priekinės ašies slėgis (didžiausias leistinas)		200 kg
Galinės ašies slėgis (didžiausias leistinas)		150 kg
Išilginė prošvaiva		70 mm
Tuščias svoris (su varomaisiais akumuliatoriais)	150 kg	160 kg
Tuščias svoris (be varomųjų akumuliatorių)	99 kg	109 kg
Gabaritinis aukštis	930 mm	1100 mm

Gabenimo matmenys

Ilgis (be kojų atramų)	820 mm	mm
Plotis	630 mm	720 mm
Aukštis, su standartiniais apmušalais <small>(atlošas užlenktas ant sėdynės, sėdynės pagalvėlė nuimta nuo sėdynės plokštės ir padėta ant nugaros atramos viršutinės dalies)</small>	700 mm	mm

Termodinaminiai duomenys

Aplinkos temperatūros diapazonas	nuo -20 °C iki +50 °C
Laikymo temperatūra su varomaisiais akumuliatoriais	nuo -20 °C iki +50 °C

Sukamieji ratukai

200x50 mm skersmens (8 col.)	Padangos, daugiausia 2,0 barai (29 psi / 200 kPa) atsparūs pradūrimui
------------------------------	---

	maž.	didž.
<u>Varantieji ratai</u>		
364x75 mm skersmens (14x3,5 col.)	Padangos, daugiausia 2,5 barai (36 psi / 250 kPa) atsparūs pradūrimui	
<u>Akumuliatoriai</u>		
2 x 12 V 75 Ah (5 h) / 80 Ah (20 h)	Uždari, nereikalaujantys priežiūros	
Didžiausi akumuliatoriaus matmenys (lxPxA)	260x168x215 mm	
Įkrovimo srovė		8 A

TA IQ MWD modelio specifikacijos, atitinkančios ISO 7176-15 standartą

	maž.	didž.
Gabaritinis ilgis (matuojamas esant 0° sėdynės posvyriui)	985 mm	1100 mm
Gabaritinis plotis	630 mm	720 mm
Bendras svoris		305 kg
Naudotojo svoris		140 kg
Naudotojo svoris, kai gaminys naudojamas sėdėti motorinėje transporto priemonėje („Dahl“ tvirtinimo sistema, išbandyta susidūrimo metu pagal ISO 7176-19 standartą)		136 kg
Sunkiausias dalies svoris		26 kg
Faktinis sėdynės gylis	250 mm	590 mm
Faktinis sėdynės plotis „IQ Junior“	370 mm 250 mm	550 mm 300 mm
Sėdynės paviršiaus aukštis ties priekiniu kraštu (be sėdynės pagalvėlės) su 0° sėdynės posvyriu	380 mm	680 mm
Elektroninis sėdynės kampas	0°	45°
Elektroninis sėdynės pakėlimas		300 mm
Mechaninės nugaros atramos kampas (matuojama pagal vertikalią padėtį nuo sėdynės plokštės)	80°	165°
Elektroninės nugaros atramos kampas (matuojama pagal vertikalią padėtį nuo sėdynės plokštės)	80°	165°
Nugaros atramos aukštis	540 mm	665 mm
Sėdynės kojų atramos (šilaujų ilgis, matuojamas be sėdynės pagalvėlės)	370 mm	580 mm
Statinis stabilumas važiuojant nuo kalno	13,8°	19,6°
Statinis stabilumas važiuojant į kalną	14,7°	19,6°
Statinis stabilumas į šonus	14,6°	16,1°
Dinaminis stabilumas važiuojant į kalną		10°
Kampas – kojų atramos / sėdynės paviršius	90°	180°
Porankio aukštis nuo sėdimosios dalies paviršiaus (be sėdynės pagalvėlės)	185 mm	285 mm
Nugaros atrama iki priekinio porankio krašto	370 mm	475 mm
Kliūčių prošvaisa		80 mm
Bandomojo manekeno svoris (ISO 7176-8)		140 kg
Didžiausias važiavimo į priekį greitis (priklauso nuo įrangos)	6 km/h	12 km/h

	maž.	didž.
Mažiausias stabdymo kelias važiuojant didžiausiu greičiu	2800 mm	
Veikimo nuotolis (važiuojant 6 km/h greičiu) <small>(priklauso nuo akumuliatoriaus talpos)</small>		40 km
Veikimo nuotolis (važiuojant 10 km/h ir 12 km/h greičiu) <small>(priklauso nuo akumuliatoriaus talpos)</small>		35 km
Ašis, horizontali padėtis	– mm	– mm

Papildomi techniniai TA IQ MWD modelio duomenys

	maž.	didž.
Triukšmo lygis		70 dB(A)
IP klasė		IPX4
Mažiausias posūkio spindulys	1150 mm	
Pavaros valdiklio išėjimas		24 V / 120 A
Variklio galia		2 x 350 W
Pagrindinis saugiklis		80 A
Šviesos (papildoma įranga)		24 V LED tipas
Naudingoji apkrova		5 kg
Priekinės ašies slėgis (didžiausias leistinas)		105 kg
Galinės ašies slėgis (didžiausias leistinas)		210 kg
Išilginė prošvaiva		70 mm
Tuščias svoris (su varomaisiais akumuliatoriais)	155 kg	165 kg
Tuščias svoris (be varomųjų akumuliatorių)	104 kg	114 kg
Gabaritinis aukštis	930 mm	1100 mm

Gabenimo matmenys

Ilgis (su atraminiais ratukais, be kojų atramų)	880 mm	
Plotis	630 mm	720 mm
Aukštis, su standartiniais apmušalais <small>(atlošas užlenktas ant sėdynės, sėdynės pagalvėlė nuimta nuo sėdynės plokštės ir padėta ant nugaros atramos viršutinės dalies)</small>	700 mm	

Termodinaminiai duomenys

Aplinkos temperatūros diapazonas	nuo -20 °C iki +50 °C
Laikymo temperatūra su varomaisiais akumuliatoriais	nuo -20 °C iki +50 °C


Sukamieji ratukai

200x50 mm skersmens (8 col.)	Padangos, daugiausia 2,0 barai (29 psi / 200 kPa) atsparūs pradūrimui
------------------------------	---

	maž.	didž.
<u>Varantieji ratai</u>		
364x75 mm skersmens (14x3,5 col.)	Padangos, daugiausia 2,5 barai (36 psi / 250 kPa) atsparūs pradūrimui	


<u>Varantieji akumulatoriai</u>		
2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 80 Ah (20 h)	Uždari, nereikalaujantys priežiūros	
Didžiausi akumulatoriaus matmenys (lxPxA)	260x168x215 mm	
Įkrovimo srovė	8 A	

Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio ženklų paaiškinimas

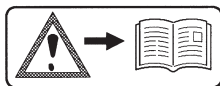

Dėmesio!

Perkaitykite naudojimo vadovą ir pridedamus dokumentus.

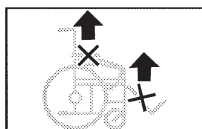

Nekelkite elektrinio neįgaliųjų vežimėlio už porankių ar kojų atramų.

Nekelkite vežimėlio už jokių nuimamų dalių.




Važiavimo režimas



Stūmimo režimas



Vežimėlį stumkite tik lygiu paviršiumi.

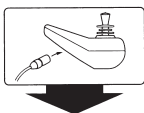

Informacija apie įkrovimo kištuką



Šis elektrinis neįgaliųjų vežimėlis **nėra** patvirtintas naudoti kaip motorinės transporto priemonės sėdynė.



Išpėjimas dėl suspaudimo pavojaus. Nedėkite plaštakų ir (arba) rankų tarp komponentų.



Eksplotavimas viešojo transporto priemonėse. Išjunkite arba įjunkite 1 važiavimo programą.



Didžiausias leistinas naudotojo svoris, jei patvirtinta naudoti kaip motorinės transporto priemonės sėdynė.

Simbolių ant vardinės plokštelės paaiškinimas



Gamintojas



Užsakymo numeris



Serijos numeris



Pagaminimo data



Leistinas naudotojo svoris



Leistinas bendras svoris



Leistinas ašies slėgis



Leistinas nuolydis aukštyn



Leistinas nuolydis žemyn

max. ... km/h

Didžiausias leistinas greitis



Gaminys patvirtintas naudoti kaip automobilio sėdynė.



Didžiausias leistinas naudotojo svoris, jei patvirtinta naudoti kaip motorinės transporto priemonės sėdynė.



Gaminys **nėra** patvirtintas naudoti kaip automobilio sėdynė.



Medicinos priemonė

Skalbimo nurodymų simbolių paaiškinimas

(simboliai atitinka Europos standartus)



Skalbkite švelniu skalbimo ciklu didžiausioje nurodytoje temperatūroje (°C).



Skalbkite įprastu ciklu didžiausioje nurodytoje temperatūroje (°C).



Galima skalbti tik rankomis.



Nebalinkite.



Netinka naudoti džiovyklėje.



Nelyginkite.



Nevalykite sausuoju būdu.

PRIEŽIŪROS DOKUMENTACIJA

Transporto priemonių duomenys:

Modelis:

Pakuotės lapo Nr:

Serijinis Nr. (SN):

**Rekomenduojamas saugos patikrinimas: 1 metai
(ne vėliau kaip po 12 mėnesių)**

Specializuoto prekybininko antspaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kitas saugos patikrinimas po 12 mėnesių

Data: _____

**Rekomenduojamas saugos patikrinimas: 2 metai
(ne vėliau kaip po 12 mėnesių)**

Specializuoto prekybininko antspaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kitas saugos patikrinimas po 12 mėnesių

Data: _____

**Rekomenduojamas saugos patikrinimas: 3 metai
(ne vėliau kaip po 12 mėnesių)**

Specializuoto prekybininko antspaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kitas saugos patikrinimas po 12 mėnesių

Data: _____

**Rekomenduojamas saugos patikrinimas: 4 metai
(ne vėliau kaip po 12 mėnesių)**

Specializuoto prekybininko antspaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kitas saugos patikrinimas po 12 mėnesių

Data: _____

**Rekomenduojamas saugos patikrinimas: 5 metai
(ne vėliau kaip po 12 mėnesių)**

Specializuoto prekybininko antspaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kitas saugos patikrinimas po 12 mėnesių

Data: _____

GARANTIJA

Bet koks naudojimo vadovo nesilaikymas arba neprofesionaliai atlikti techninės priežiūros darbai, ypač susiję su techniniais pakeitimais ir papildymais (sumontuotomis dalimis) be mūsų aiškaus sutikimo, ne tik panaikina šią garantiją, bet ir mūsų bendrąją atsakomybę už gaminį.

Gaminiui suteikiama 2 metų garantija.

Tačiau akumulatoriams ir įkrovikliui suteikiama 1 metų garantija.

Garantinis laikotarpis prasideda nuo įsigijimo datos.

Dėl bet kokių garantinių reikalavimų kreipkitės į savo platintoją ir pateikite šį GARANTIJOJOS ĮRODYMO pažymėjimą kartu su visa reikiama informacija apie modelį, pakuotės lapo numerį, pristatymo datą ir serijos numerį (SN).

Serijos numeris (SN) nurodytas vardinėje plokštelėje.

Garantinių reikalavimų pripažinimas priklauso nuo tinkamo gaminio naudojimo, originalių atsarginių dalių, įsigytų iš įgaliotojo platintojo, naudojimo ir įprastos techninės priežiūros bei patikros atlikimo.

Garantija netaikoma paviršiaus pažeidimams, ratų vidiniams vamzdžiams ar padangoms, pažeidimams dėl atsilaisvinusių veržlių ar varžtų arba dėl pakartotinio vežimėlio surinkimo pažeistoms kiaurymėms ir varžtų skylėms.

Taip pat garantija netaikoma variklių ar elektronikos pažeidimams, atsiradusiems dėl neprofesionalaus valymo garais arba dėl tyčinio ar atsitiktinio komponentų poveikio vandeniu.

Neprisiimama jokia atsakomybė už defektus ar gedimus, atsiradusius dėl spinduliuotės šaltinių, pavyzdžiui, didelės spartos mobiliųjų telefonų, stereoaparaturės ir kitų galingų triukšmo šaltinių ar trukdžių, viršijančių standartinės specifikacijas.

Šis naudojimo vadovas turi būti perduotas bet kuriam naujam gaminio savininkui ar naudotojui.

Norėdami įvertinti mūsų gaminius, apsilankykite mūsų svetainėje www.ta-service.com.

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus, kad galėtume patbulinti gaminį.

Garantijos įrodymas

Užpildykite! Jei reikia, galite daryti kopijas ir nusiųsti platintojui.

Garantija

Modelio pavadinimas:

Pakuotės lapo Nr:

SN (žr. vardinę plokštelę):

Pristatymo data:

Platintojo antspaudas:

Priežiūros dokumentai parduodant ar perduodant

Transporto priemonių duomenys:

Serijinis Nr. (SN):

Modelis:

Pakuotės lapo Nr:

Specializuoto prekybininko antspaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kitas saugos patikrinimas po 12 mėnesių

Data: _____



Gamintojas:

📍 TA Service A/S
Centervej Syd 2
DK-4733 Tappernøje
Danija

✉ ta-service@ta-service.dk
T: +45 56 72 57 77
www.ta-service.dk

Platintojas

Vietos platintojus rasite
www.ta-service.dk