

# Track Wheel

## Naudotojo vadovas (LT)



Track Wheel C2/A2  
(Dvipusio tvirtinimo, anglies pluošto arba  
aliuminio)



TrackWheel C1/A1  
(Centrinio tvirtinimo, anglies pluošto arba  
aliuminio pluošto)

## **TURINYS**

- 1 Bendra informacija**
- 2 Paskirtis ir įprastas naudojimas**
- 3 Netinkamas naudojimas**
- 4 Saugos įspėjimai**
- 5 Utilizavimas**
- 6 Etiketė**
- 7 Transportavimas**
- 8 Garantija**
- 9 Valymas ir dezinfekavimas**
- 10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas**
- 11 Pakartotinis naudojimas**
- 12 Techniniai duomenys**
- 13 Produkto aprašymas**
  - 13.1 Komplektuojamos dalys**
  - 13.2 Apžvalga**
  - 13.3 Funkcijos**
- 14 Track Wheel paruošimas naudojimui**
- 15 Kaip naudoti**

## 1. Bendra informacija

*Gerbiamas kliente,*

Dėkojame, kad pasirinkote **"Track Wheel"**.

Šiame naudotojo vadove pateikiamas medicinos prietaiso aprašymas ir svarbūs nurodymai, užtikrinantys teisingą ir saugų gaminio naudojimą. Atidžiai perskaitykite šį vadovą. Ypač svarbu perskaityti saugos reikalavimus ir jų laikytis. **REHA-SENSE®** nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminių specifikacijas ir funkcijas.

Jei turite klausimų, kreipkitės į savo pardavėją arba tiesiogiai į **REHA-SENSE®**. Kontaktiniai duomenys pateikti paskutiniame šio vadovo puslapyje.

## 2. Tikslas ir įprastas naudojimas

**"Track Wheel"** yra priedas, skirtas prijungti prie rankinio neįgaliojo vežimėlio. Pakėlus priekinius ratukus, naudojami tik galiniai vežimėlio ratai ir **"Track Wheel"**.

Didesnis priekinis ratas leidžia naudotojams lengviau judėti nelygiu paviršiumi. Tai labai padidina naudotojo savarankiškumą ir važiavimo lankstumą. Be to, jis sumažina pasipriešinimą riedėjimui, todėl važiavimas tampa komfortiškesnis.

## 3. Netinkamas naudojimas

Bet koks naudojimas, neatitinkantis šiame naudotojo vadove pateikto aprašymo. Tai taip pat apima techninę specifikaciją.

## 4. Saugos įspėjimai

### Pirmą kartą naudodami „Track Wheel“



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Naudotojas turi būti perskaitęs ir supratęs vadovą bei žinoti, kaip veikia **"Track Wheel"**.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Prieš pradėdami naudoti Track Wheel, įvertinkite savo įgūdžius ir nuspręskite, ar jums reikia asistento. Norėdami nuspręsti, ar jums reikia asistento, taip pat turėtumėte paprašyti eksperto nuomonės, kad galėtumėte ja remtis. Jei savo vertinimą grindžiate tik savo suvokimu, galite susižaloti jūs arba aplinkiniai žmonės.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Praktikuokite važiavimą ant lygaus pagrindo saugioje aplinkoje kartu su padėjėju, kol įsitikinsite, kaip jis veikia. Jei važiuosite viešaisiais keliais, nors ir nežinote, kaip naudotis **"Track Wheel"**, galite susižeisti jūs arba kiti aplinkiniai žmonės.

### Vairavimas



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Nepamirškite, kad dėl „Track Wheel“ vežimėlio priekis gali būti ilgesnis, kad nesužeistumėte savęs ar aplinkinių.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Nepamirškite, kad „Track Wheel“ nėra skirtas žaidimams ar sportui, bet yra pagalbinė priemonė, padedanti lengviau judėti į priekį, pvz., ant sniego, smėlio, žolės ir pan.

**Atkreipkite dėmesį! Prieš naudodami „Track Wheel“ patikrinkite padangų slėgį.**

## Valymas



„Track Wheel“ tinkamai valomas suslėgtu oru arba sausu plastikiniu šepetėliu ir drėgna šluoste. Jei jis nešvarus, naudokite švelnų ploviklio tirpalą. Nuvalykite minkštu skudurėliu ir išdžiovinkite ore.



Nenaudokite korozinių ar abrazyvinių valymo priemonių.

**Atkreipkite dėmesį!** „Track Wheel“ tinkamai dezinfekuojamas naudojant šluostę su alkoholiu.

## Kita



Labai svarbu, kad po montavimo visi varžtai būtų tinkamai priveržti.


## 5. Utilizavimas

Kai „Track Wheel“ atitarnauja ir turi būti atiduotas į metalo laužą, kreipkitės į vietos valdžios institucijas, kad gautumėte informacijos apie perdirbimą, ir laikykitės jų nurodymų.

Taip pat galite susisiekti su pardavėju dėl „Track Wheel“ perdirbimo.

## 6. Etiketė

Tai gaminio etiketės pavyzdys, jis yra ant gaminio.
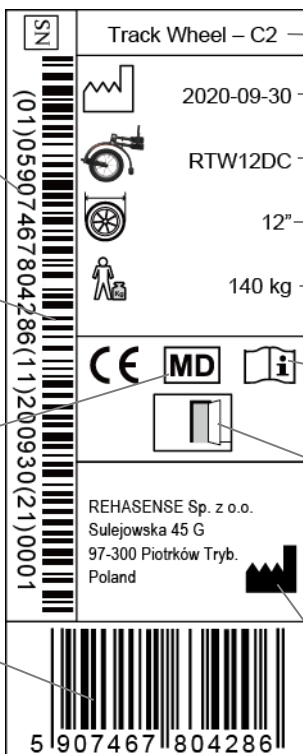
|                                              |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Serijos numeris pagal GS1 standartą (UDI-DI) |  | Produkto pavadinimas        |
| EAN brūkšninis kodas - GS1 128               |                                                                                     | Pagaminimo data             |
|                                              |                                                                                     | Prekės numeris              |
|                                              |                                                                                     | Rato dydis                  |
|                                              |                                                                                     | Maksimalus naudotojo svoris |
| Medicinos prietaisas                         |                                                                                     | Susipažinkite su UM         |
|                                              |                                                                                     | Galima naudoti lauke        |
| EAN 13 brūkšninis kodas pagal GS1            |                                                                                     | Gamintojas                  |

## 7. Transportas

### Viešasis transportas



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Keliaudami viešuoju transportu nelaikykite „Track Wheel“ pritvirtinto ant kojų atramos. Pakabinkite "Track Wheel" ratuką ant transportavimo laikiklio.



#### **Laikymas ir**

### transportavimas

#### **ĮSPĖJIMAS!**

Naudokite diržus, kad užtikrintumėte saugų „Track Wheel“ transportavimą.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Niekada nevežkite "Track Wheel", prijungto prie neįgaliojo vežimėlio.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Padėkite „Track Wheel“ taip, kad transportuojant nebūtų pažeistos jokios dalys.

## 8. Garantija

### Informacija apie garantiją

- Gamintojas suteikia gaminiui 24 mėnesių garantiją nuo įsigijimo datos.
- Per šį laikotarpį visi medžiagų ar dalių defektai, atsiradę dėl gamybos defektų ar netinkamų medžiagų naudojimo, bus nemokamai sutaisyti arba pakeisti.
- Garantija netaikoma padangų pažeidimams, atsiradusiems dėl nusidėvėjimo naudojimo metu. Garantija netaikoma ir kitoms „Track Wheel“ dalims, kurios įprastai dėvisi naudojimo metu.
- Garantija netaikoma visiems mechaniniams defektams ir sugadinimams, atsiradusiems dėl netinkamo, gamintojo nenumatyto naudojimo.
- Dėl neleistinų „Track Wheel“ pakeitimų ir modifikacijų prarandama garantija.
- Atsiradus defektų ar pažeidimų, naudotojas turėtų nedelsdamas informuoti tiekėją.

### Atsakomybės sritis

- Garantija neapima transportavimo išlaidų.
- Garantija netaikoma sužalojimams ar kitiems nuostoliams, galimai susijusiems su šio gaminio gedimu.
- Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl negalėjimo naudotis gaminiu.
- Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl netinkamo ar neteisingo šio naudotojo vadovo supratimo.

### Produkto modifikacijos ir papildomai sumontuoti elementai

- Šis apibrėžimas taikomas bet kokiems gaminiams, kurie buvo modifikuoti ir kurie skiriasi nuo šiame vadove pateiktos informacijos arba prie gaminio pritvirtinti papildomi, gamintojo nepateikti elementai. Jei naudotojas, neturėdamas raštiško gamintojo leidimo, pirmiau nurodytu būdu modifikavo prietaisą, jis nebeatitinka esminių CE reikalavimų ir jam nebus taikoma garantija.
- Jei turite klausimų ar abejonių dėl modifikacijų, prieš atlikdami pakeitimus kreipkitės į gamintoją. imtis bet kokių veiksmų.

## 9. Valymas ir dezinfekavimas

### Rėmas

Rėmas turėtų būti valomas drėgnu skudurėliu arba švelniu plovikliu. Po to jį reikia nuvalyti sausu skuduru. Rėmas turėtų būti reguliariai tikrinamas, kad būtų rasti dažų pažeidimai, kurie gali sukelti koroziją. Pastebėję matomų rėmo pažeidimų (įtrūkimų, dažymo defektų ir pan.), kreipkitės į vietinį pardavėją dėl diagnostikos ir techninės priežiūros.

### Dezinfekcija

Dėl dezinfekavimo kreipkitės į pardavėją, kad įsitikintumėte, jog dezinfekciją atlieka profesionalūs darbuotojai. Tačiau individualiam naudojimui rekomenduojame naudoti visuotinai prieinamas dezinfekavimo priemones be chloro ir fenolio. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo dezinfekavimo priemonių naudojimo.

## 10. Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Naudotojas negali savarankiškai remontuoti ar aptarnauti „Track Wheel“.

Naudotojas negali savarankiškai nuimti ir siųsti „Track Wheel“ dalis pardavėjui remontuoti. Jei reikalingas remontas, kreipkitės į prekybos atstovą, net jei gedimas yra nedidelis.

Jei dalys pažeistos arba jų trūksta, nedelsdami kreipkitės į pardavėją. Pateikite „Track Wheel“ pardavėjui, kad šis pakeistų arba suremontuotų dalis.

Dėl įprastos techninės priežiūros, remonto ar aptarnavimo visada kreipkitės į pardavėją. Jei „Track Wheel“ neremontuojamas arba montuojant naudojamos ne visos dalys, gali būti padaryta žala naudotojui, jo aplinkoje esantiems asmenims arba turtui.

Remontui ir techninei priežiūrai atlikti pardavėjas naudoja atsarginių dalių katalogą ir kitus dokumentus. Ši dokumentacija nėra prieinama naudotojams ir visuomenei.

### Pradūrimai



#### **ĮSPĖJIMAS!**

"Track Wheel" rato padanga yra tokios pat konstrukcijos kaip dviračio padanga. Todėl paprastai šio gaminio padangas pradurti ir pakeisti galima dviračių dirbtuvėse. Jei neturite galimybės naudotis dviračių dirbtuvėmis, kreipkitės į pardavėją.

### **Dažniausiai pasitaikančios problemos ir jų sprendimai**

Jei pastebėjote kokių nors gaminio veikimo sutrikimų, nenaudokite jo - kreipkitės į vietinę pardavimo vietą arba tiekėjo aptarnavimo skyrių. Gamintojas negarantuoja veikimo teisingumo, jei naudojamos neoriginalios dalys.

## 11. Pakartotinis naudojimas

Šį medicinos prietaisą gali pakartotinai naudoti kitas naudotojas, jei pirminiam naudotojui jo nebereikia. Prieš pakartotinai panaudojant prietaisą, jį turi atidžiai patikrinti ir dezinfekuoti įgalioti pardavėjo techniniai darbuotojai.

Reikėtų patikrinti šiuos elementus:

- konstrukcijos standumas,
- varžtų ir veržlių priveržimas,
- ratų ir rutulinių guolių būklė,
- efektyvumas ir kitų dalių būklė.

Jei kuris nors iš šių elementų yra suplyšęs arba sulūžęs, jį reikia pakeisti naujomis dalimis. Kiekvienam naujam prietaiso naudotojui ypač rekomenduojama sumontuoti naujus ratus. Visi atsipalaidavę varžtai ir veržlės turi būti priveržti. Gaminys turi būti kruopščiai išvalytas ir dezinfekuotas.




#### **ĮSPĖJIMAS!**

Draudžiama pakartotinai naudoti gaminį, jei rėmas sulenktas arba sulūžęs. Kiekvienas naujas naudotojas turi gauti prietaisą su pridėtu šiuo naudotojo vadovu.

## 12. Techniniai duomenys

Techniniai duomenys gali skirtis priklausomai nuo atnaujinimų. Jei nenurodyta kitaip, visi matavimai pateikiami milimetrais (mm), jei matuojamas atstumas, ir kilogramais (kg), jei matuojamas svoris.

|                                                                          | Track Wheel                                      |                                           |                                                   |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                          | C2 (Dvipusis rėmo tvirtinimas, Anglies pluoštas) | A2 (Dvipusis rėmo tvirtinimas, Aliuminis) | C1 (Centrinis rėmo tvirtinimas, Anglies pluoštas) | A1 (Centrinis rėmo tvirtinimas, Aliuminis) |
| Bendras ilgis - mm                                                       | 570                                              | 570                                       | 670                                               | 670                                        |
| Bendras plotis - mm                                                      | 250                                              | 250                                       | 80                                                | 80                                         |
| Bendras aukštis - mm                                                     | 440                                              | 440                                       | 360                                               | 360                                        |
| Bendras svoris - kg                                                      | 5.17                                             | 5.36                                      | 2.65                                              | 2.87                                       |
| Ratų dydis - coliai                                                      | 12"                                              | 12"                                       | 12"                                               | 12"                                        |
| Oro slėgis padangoje - BAR                                               | 2.5                                              | 2.5                                       | 2.5                                               | 2.5                                        |
| Kampo reguliavimo diapazonas (neįgaliųjų vežimėlio kojų atramos kampui)  | 60°-110°                                         | 60°-110°                                  | 75°-95°                                           | 75°-95°                                    |
| Plotį reguliuojantis diapazonas - mm                                     | 300                                              | 300                                       | —                                                 | —                                          |
| Aukščio reguliavimo diapazonas - mm (nuo grindų iki prispaudimo apačios) | 210 + (0-50, 110, 125, 140)                      | 210 + (0-50, 110, 125, 140)               | —                                                 | —                                          |
| Atstumo reguliavimo diapazonas - mm                                      | —                                                | —                                         | Žr. toliau pateiktą matricos sąrašą               |                                            |
| Vamzdžių skersmens diapazonas - mm                                       | D19-40                                           | D19-40                                    | D15-32                                            | D15-32                                     |
| SWL - kg                                                                 | 140                                              | 140                                       | 140                                               | 140                                        |
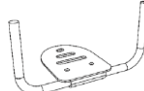
|  <b>Prispaudimo žnyplių matrica - centrinio tvirtinimo Track Wheel</b> |                                |                                                                                     |                                |                                  |                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Prispaudimo žnyplių parinktys                                                                                                                           |                                |                                                                                     |                                | Neįgaliųjų vežimėlio kojų atrama |                                                                |                                                                         | Keletas tinkamų neįgaliųjų vežimėlių pavyzdžių                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| Galinis                                                                                                                                                 | Prekės numeris                 | Priekyje                                                                            | Prekės numeris                 | Kojų atramos tipas               | Kojų atramos vamzdžio skersmuo                                 | Gylio diapazonas - mm                                                   | Modelio pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kojų atramų pavyzdžiai                                                                |
|                                                                      | EBX01A<br>(Numatytoji reikšmė) |  | EBX02A<br>(Numatytoji reikšmė) | Apvalus vamzdis                  | φ 15 - 25 mm                                                   | ø15 vamzdis : 108 - 168 ø19 vamzdis : 105 - 165 ø25 vamzdis : 102 - 162 | <b>Rehasense:</b> ICON 60;<br><b>Wolturnus:</b> WS/WSSL/TUKAN/HAWK;<br><b>Sunrise Medical:</b> Argon: Quickie Nitrum/Quickie Krypton R/Quickie Argon;<br><b>"Invacare":</b> K-serija/Kuschall KSL; Ki<br><b>mobility:</b> Ethos/Rogue XP/Rogue/Tsunami;<br><b>"Permobil":</b> Ti Lite/Progeo; |  |
|                                                                                                                                                         |                                |  | EBX02B<br>(Papildoma)          |                                  | φ 25 - 32 mm                                                   | ø25 vamzdis : 102 - 162 ø28 vamzdis : 99 - 159 ø32 vamzdis : 96 - 156   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|                                                                      | EBX01B<br>(Papildoma)          |  | EBX02A<br>(Numatytoji reikšmė) |                                  | φ 15 - 25 mm                                                   | ø15 vamzdis : 95 - 155 ø19 vamzdis : 93 - 153 ø25 vamzdis : 90 - 150    | <b>"Invacare":</b> K serija (senojo stiliaus su apvaliu vamzdžiu)/K serija attract (senojo stiliaus su apvaliu vamzdžiu)/XLT (senojo stiliaus su apvaliu vamzdžiu);<br><b>RGK:</b> Sub 4;                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                         |                                |  | EBX02B<br>(Papildoma)          |                                  | φ 25 - 32 mm                                                   | ø25 vamzdis : 90 - 150 ø28 vamzdis : 87 - 147 ø32 vamzdis : 85 - 145    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|                                                                      | EBX01C<br>(Papildoma)          |  | EBX02A<br>(Numatytoji reikšmė) | Plokštė                          | Kojų atramos plokštės laikiklio skersmens diapazonas : ≤25     | ø22 laikiklis : 107 - 167 ø25 laikiklis : 103 - 163                     | <b>"Permobil":</b> Ti Lite;<br><b>"Sunrise Medical":</b> Argon/Argon2/Helium/Platform; <b>Ki mobility:</b> Quickie Nitrum/Quickie Krypton R/Quickie Argon/Argon2/Helium/Platform; <b>Ki mobilumas:</b> Ethos/Rogue XP/Rogue/Tsunami;                                                          |  |
|                                                                                                                                                         |                                |  | EBX02B<br>(Papildoma)          |                                  | Kojų atramos plokštės laikiklio skersmens diapazonas : 25 - 32 | ø25 laikiklis : 103 - 163 ø32 laikiklis : 100 - 160                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |

## 13. Produkto aprašymas

Kad naudotojams būtų lengviau važiuoti, mūsų "Track Wheel" sistema siūlo sprendimus, kaip pritaikyti tiek standaus rėmo neįgaliųjų vežimėlį, tiek sulankstomą neįgaliųjų vežimėlį. Ji puikiai pritaikoma visų dydžių rinkoje esantiems vežimėliams.

Vienas iš pagrindinių privalumų - lengvas tvirtinimas, kuris padeda lengvai ir greitai prijungti.

Siūlome dvipusį ir centrinį tvirtinimą, tiek anglies pluošto, tiek aliuminio lydinio rėmo variantus.

### 13.1 Pristatymo apimtis

„Track Wheel“ komplektą sudaro šie elementai:

1. Track Wheel ratas
2. Vartotojo vadovas


### 13.2 Apžvalga

„Track Wheel“ iš esmės sudaro šios dalys.

#### C2/A2 (Dvipusis tvirtinimas, CF/Alu)



### C1/A1 (Centrinis tvirtinimas, CF/Alu)

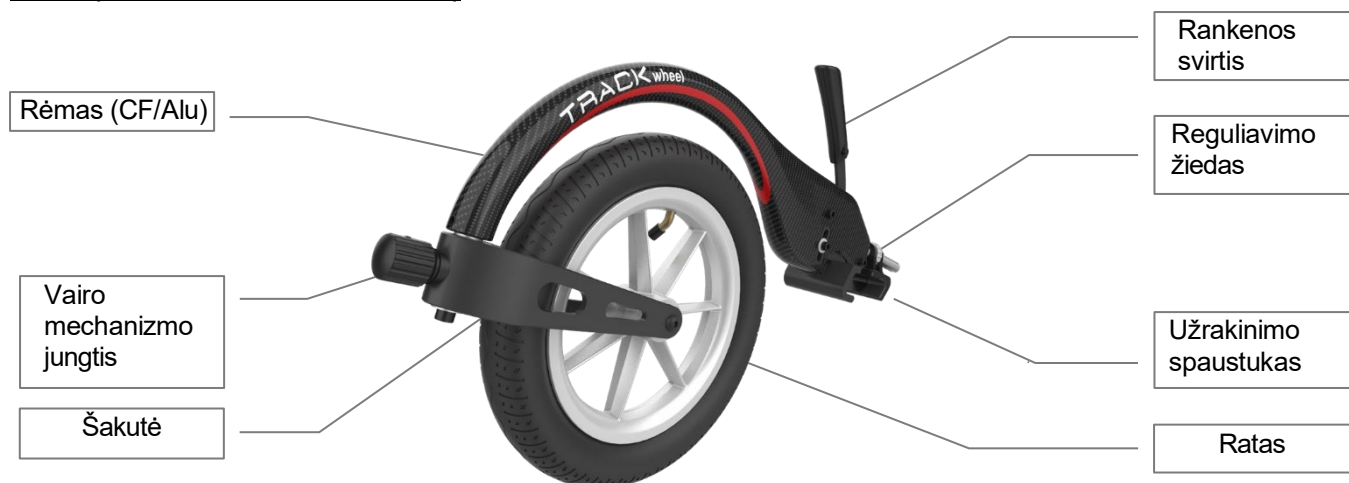

### 13.3 Funkcijos

Neįgaliųjų vežimėlį paverskite trirate transporto priemone:

- Lengviau įveikti kelkraščius ir nelygius kelius.
- Mažina pasipriešinimą riedėjimui.
- Standžių ir suglaudžiamų neįgaliųjų vežimėlių montavimo sprendimai - pritaikomi įvairiems dydžiams
  - Dvipusio tvirtinimo rankena - tvirtinama prie suglaudžiamo rėmo vežimėlių priekinių šoninių rėmų
  - Centrinio tvirtinimo rankena - tinka prie standaus rėmo vežimėlių pėdų atramos konstrukcijų.
  - Pagaminta iš aliuminio arba anglies pluošto kompozitinių medžiagų.
- Ergonomiškas elegantiškas dizainas padeda gyventi estetiškai.
- Pakelti į viršų - Track Wheel pasisuka iš priekio į galą, kad pakeltų ratukus nuo žemės.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Atkreipkite dėmesį, kad "Track Wheel" ratukas turėtų būti montuojamas tik ant sutvirtintos kojų atramos.

#### **Track Wheel nustatymas**

### C2/A2 (Dvipusio tvirtinimo rankenos, CF/Alu)



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Dvipusio tvirtinimo spaustukas tvirtinamas prie standaus tipo arba suglaudžiamų vežimėlių priekinio šoninio rėmo.



Skirtas montuoti su skirtingo skersmens neįgaliųjų vežimėlių kojų atramų vamzdžiais.



Kaip sureguliuoti spaustuko plotį:

- Sureguliuokite nurodytus varžtus.
- Pritvirtinę prie neįgaliųjų vežimėlio kojų atramos, ją priveržkite.

## Sureguliuokite Track Wheel, kad jis tiktų jūsų vežimėliui.

Reguliuojama 4 plokštumomis, kad būtų pasiektas geriausias suderinamumas.



Track Wheel reguliavimas:

- Pradžiai sureguliuokite nurodytus varžtus.

## Sureguliuokite spaustuko kampą.



- Atlaisvinkite varžtą.
- Sureguliuokite spaustuko kampą.
- Užveržkite varžtus.

### Pasukite aplink ilgąją ašį.




- Atlaisvinkite varžtą.
- Sureguliuokite spaustuko kampą.
- Užveržkite varžtus.

### Sureguliuokite aukštį.




- Atlaisvinkite varžtą naudodami šešiakampį raktą.
- Sureguliuokite aukštį.
- Užveržkite varžtus.

### Sureguliuokite plotį.

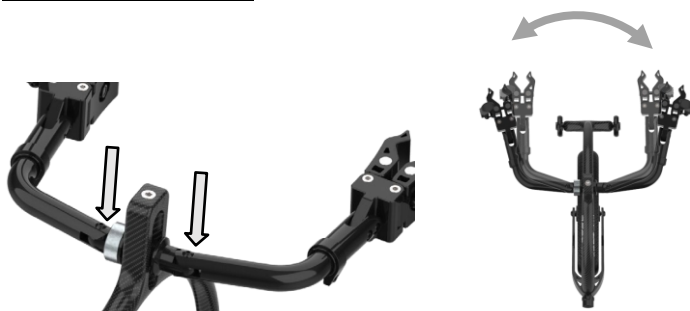

- Atlaisvinkite varžtą.
- Sureguliuokite plotį.
- Užveržkite varžtus.

## Pakeiskite rankeną ilgesne versija.

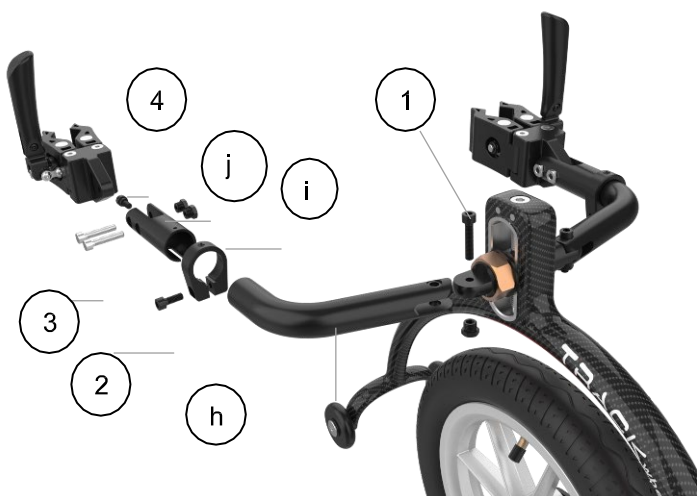

- Išimkite varžtus (1) ir (2).
- Išsukite du varžtus (3), kad atlaisvintumėte spaustuką; iš anksto nustatytas šių dviejų varžtų sukimo momentas yra 5 Nm. Tai kartotinis procesas, kurio metu reikia ištraukti spaustuką, kad būtų galima pasiekti varžtą (4).
- Išsukite varžtą (4), iš anksto nustatytas sukimo momentas yra 6 Nm.
- Pakeiskite rankeną (h) ilgesne versija ir sumontuokite ją su fiksavimo apvadu (i) ir spaustuvo svirtimi (j).
- Užveržkite varžtą (4) 6 Nm sukimo momentu.
- Užveržkite varžtą (2) 14 Nm sukimo momentu.
- Sureguliuokite spaustuvą ir priveržkite jį dviem varžtais (3), rekomenduojamas sukimo momentas - 25 Nm.
- Sureguliuokite ilgesnę svirtį ir priveržkite ją varžtu (1), rekomenduojamas sukimo momentas - 25 Nm.
- Tą patį atlikite ir kitoje pusėje.

## C1/A1 (Centrinio tvirtinimo rankena, CF/Alu)

### ĮSPĖJIMAS!

Vienos rankos modelis daugiausia skirtas **standaus tipo** neįgaliųjų vežimėliams, spaustukas tvirtinamas prie vežimėlio pėdų atramos.




Montuodami vežimėlį ir pritaikydami jį naudojimui, pirmiausia pasukite ratą į priekį, kaip parodyta toliau, reikia atlikti tris reguliavimus:



- Spaustuvo anga, kad tilptų į kojos atramą - spaustuvo plotis turi būti toks, kad spaustukas galėtų vos priglusti prie kojos atramos; taip užtikrinama, kad spaustukas saugiai priglus prie kojos atramos.
- Rato aukštis iki žemės - siekiama, kad Track Wheel visiškai prisiliestų prie žemės, nepakeldamas priekinių vežimėlio ratų.
- Vairo jungties slopinimas - vairo jungtyje galima reguliuoti rato pasipriešinimą rėmo sukimui.


## Griebtuvo pločio reguliavimas pagal pėdos plokštelę.

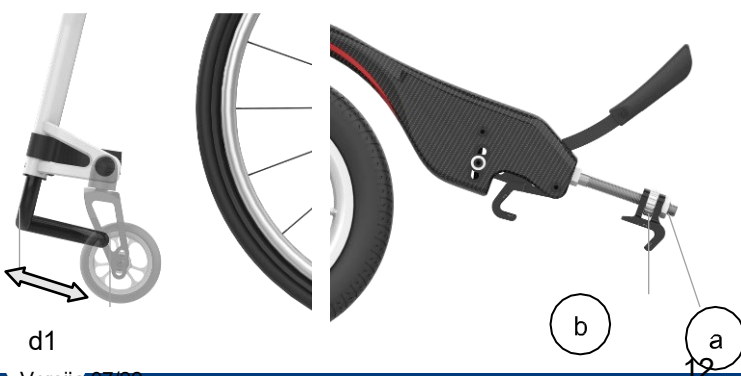


- Išmatuokite atstumą (d) nuo priekinio iki galinio pėdų atramos kraštų,
- Atlaisvinkite fiksavimo veržlę (a) ir pasukite reguliavimo žiedą (b) taip, kad tarpas tarp spaustukų būtų d1 plus 5 mm.
- Uždėkite spaustuvą ant pėdų atramos ir perkeltite spaustuvo svirtį į fiksavimo padėtį (c). Naudotojas turėtų valdyti jėgą, reikalingą spaustukui užfiksuoti, bet vis tiek užtikrinti saugų fiksavimo

ryšį. Tikslus reguliavimas atliekamas įsukant arba išsukant reguliavimo žiedą (b).

- Galutinai priveržkite fiksavimo varžlę (a), kad ji netyčia neatsilaisvintų.

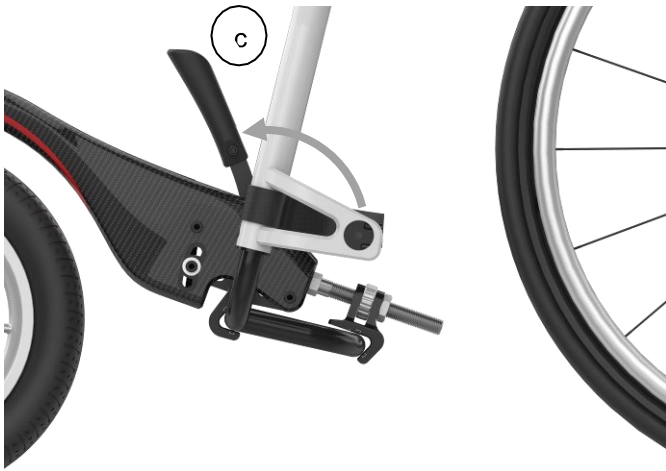

### Track Wheel aukščio reguliavimas.

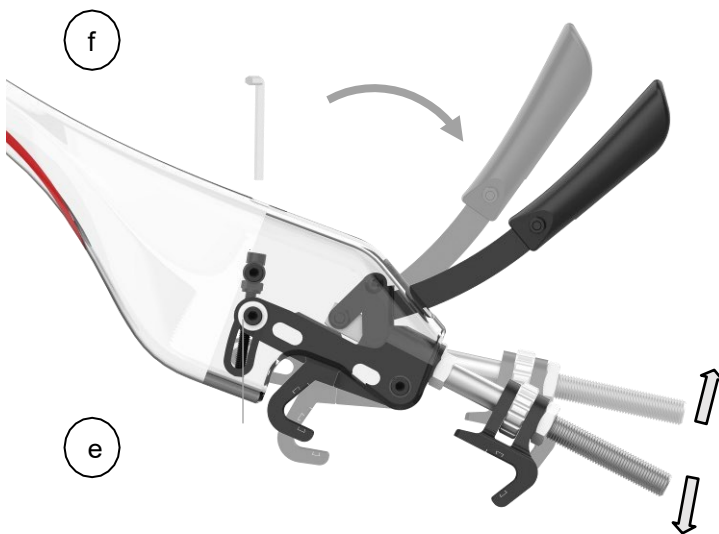

- Tinkamas aukštis yra toks, kad ratas tvirtai liestųsi su žeme, kad vežimėliui judant į priekį jis galėtų pasukti ratą "atgal".
- Tai atliekama:
  - i. Atlaisvinkite du fiksavimo varžtus (e), iš anksto nustatytas sukimo momentas yra 2 Nm. Sukite kampo reguliavimo varžtą (f) pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte ratą (d), arba prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte ratą (d).
  - ii. Tai kartotinis procesas, kurio metu spaustuvo svirtį reikia patraukti atgal, kad būtų galima pasiekti kampo reguliavimo varžtą (f).
  - iii. Patvirtinus, vėl priveržkite fiksavimo varžtus (e) rekomenduojamu 6 Nm sukimo momentu.


**Atkreipkite dėmesį! Didžiausias tinkamo vamzdžio skersmuo ir prispaudimo atstumas nurodyti Techniniuose**

### duomenyse (12 skyrius). Vairo jungties reguliavimas.13




- Norėdami padidinti pasipriešinimą sukimuisi, pasukite vairo jungties rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.
- Norėdami sumažinti pasipriešinimą, sukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.


### Pakeiskite galinį spaustuvą nauja versija.

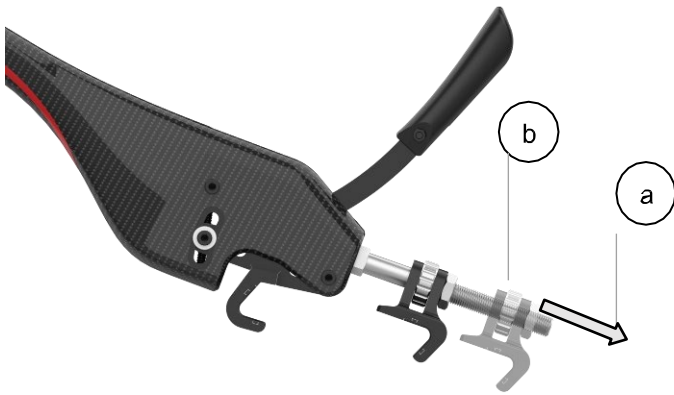

- Išimkite fiksavimo veržlę (a) ir pasukite reguliavimo žiedą (b), kad ištrauktumėte galinį spaustuvą.
- Sumontuokite reguliavimo žiedą (b) su nauju galiniu spaustuviu į perjungimo mechanizmą, tada priveržkite fiksavimo veržlę (a) rekomenduojamu 20 Nm sukimo momentu.

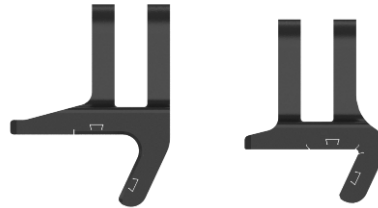

### Pakeiskite priekinį spaustuvą nauja versija.

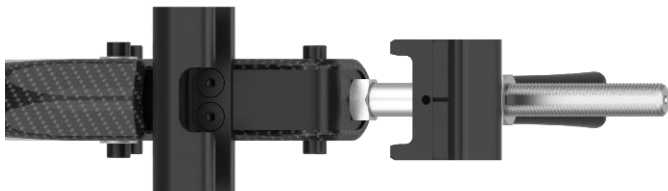

- Pasukite žemyn į viršų.
- Atlaisvinkite fiksavimo varžtą (g), pakeiskite jį nauju priekiniu spaustuviu ir priveržkite.



### Rato keitimas

Tiek centrinio tvirtinimo, tiek dvipusio tvirtinimo versijos.





- Atlaisvinkite varžtą (1).
- Atlaisvinkite varžtą (2), kad šakės ir rato sąranka būtų atskirta nuo rėmo.
- Atlaisvinkite varžtus (3) ir (4).
- Nuimkite šakę nuo rato.
- Pakeiskite ratą nauju, priveržkite varžtus (3) ir (4), rekomenduojamas sukimo momentas - 8 Nm.

## 15. Kaip naudoti



### ĮSPĖJIMAS!

Naudotojas turi būti perskaitęs ir supratęs vadovą bei suprasti, kaip veikia "Track Wheel".

#### Dvipusio tvirtinimo, CF/Alu

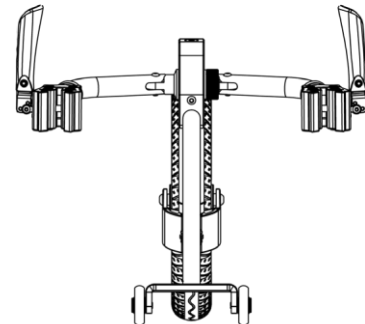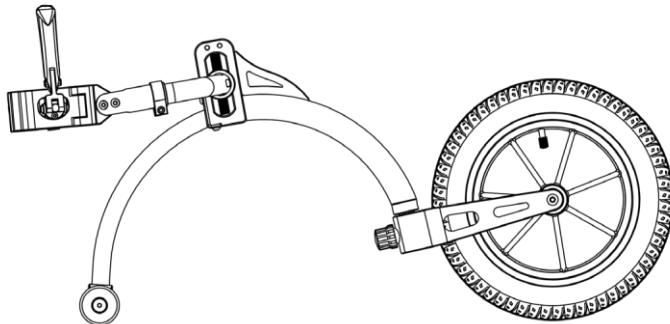


#### Prieš nustatydami

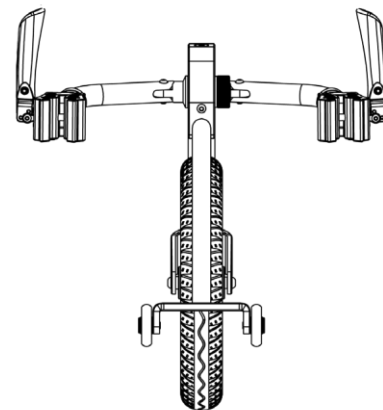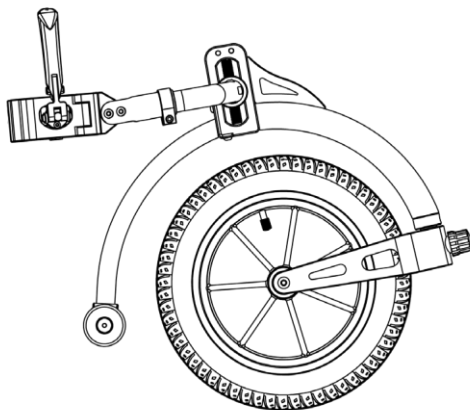


#### Po sąrankos

#### Centrinio tvirtinimo, CF/Alu

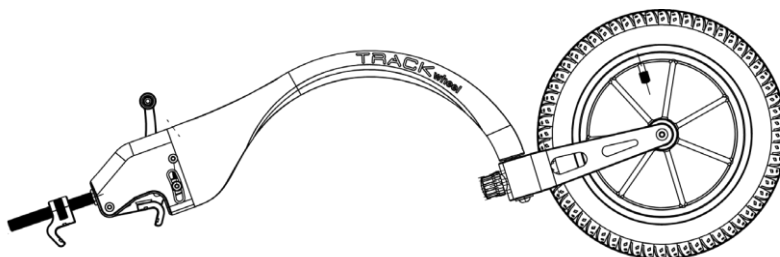


#### Prieš nustatydami

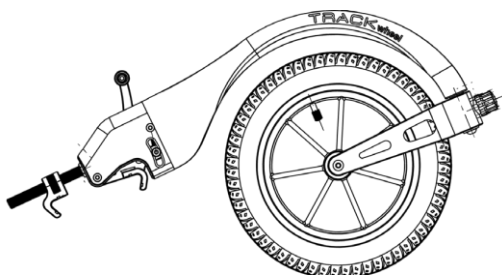

### Po sąrankos

**Atkreipkite dėmesį! Prieš nustatant, visi ratai turi būti ant žemės, o Track Wheel - išorinėje padėtyje.**

**Atkreipkite dėmesį! Po nustatymo, kai naudotojas stumia vežimėlį, Track Wheel automatiškai pasisuka į vidų, tuo pačiu metu vežimėlio priekiniai ratukai ir Track Wheel atraminis ratas pakyla nuo žemės. Priekinių ratukų prošvaisa nuo žemės paviršiaus yra maždaug 40 mm (ji gali skirtis dėl skirtingo kojų atramų ir kojų atramos pakabos kampo).**

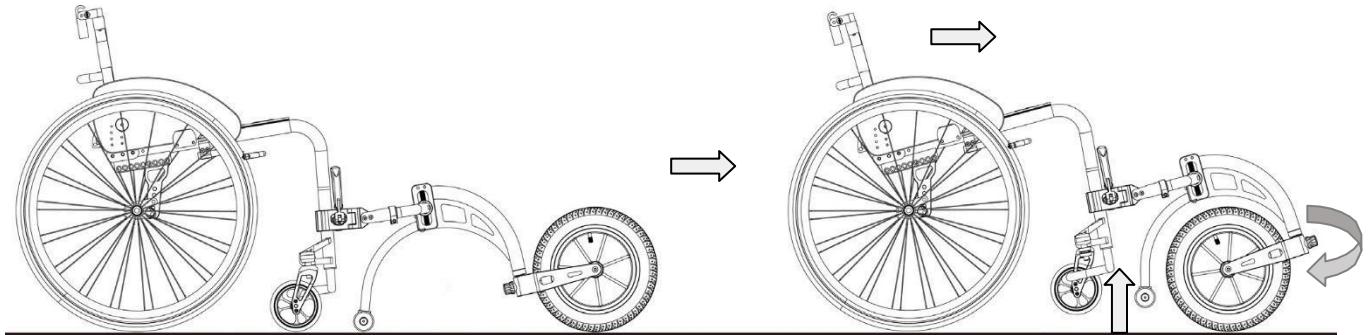

**Prijunkite**

**Į priekį, pasukite ir pakelkite**

**Kilus bet kokiems techniniams klausimams, kreipkitės į vietinį platintoją arba tiesiogiai į**

**"Rehasense". Platintojas:**

**Gamintojas Rehasense®**

**Sp. z o.o.**

Sulejowska 45G

97-300 Piotrków Trybunalski Lenkija

[www.rehasense.com](http://www.rehasense.com)

[info@rehasense.com](mailto:info@rehasense.com)