



NAUDOJIMO VADOVAS

R-Net CJSM2



Šis gaminy s atitinka Reglamento (ES) 2017/745
dėl medicinos priemonių reikalavimus.

*inspire
joy of life*

Turinys

Simboliai	5
Įvadas	5
Modeliai	5
Specifikacijos	5
Naudojimas	5
Reguliavimas	6
Pakartotinis naudojimas	6
Gaminio naudojimo laikotarpis	6
Saugos priemonės	6
Dviejų valdymo modulių sujungimas	7
Apžvalga	8
CJSM2 <LCD> valdymo modulis	8
Mygtukinis valdymo skydelis	8
Simbolių valdymo skydelis	8
LCD ekranas	9
Lydinčiojo asmens valdymas	10
Mygtukinis valdymo skydelis	10
LED indikatoriai	10
Mygtukai ir simboliai	11
Lydinčiojo asmens valdymas	12
LCD ekranas	13
Prieš naudojimą	15
Akumuliatorių įkrovimas	15
Valdymo modulio prijungimas	15
Užraktas	16
Užrakto išjungimas	17
Automatinis išjungimas	18
Patikrinimas prieš važiavimą	19
Akumuliatoriaus indikatorius	19
Pastaba	19
Iš anksto nustatytas didžiausias greitis	20
Lydinčiojo asmens valdymas	21
Greičio lygiai	22

Režimo meniu	23
Važiavimo režimas	23
Nuostatų režimas	23
Vairasvirtė	24
Važiavimo ir vairavimo manevrai	24
Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio stabdymas	24
Lydinčiojo asmens valdymas	25
Valdymo režimo pasirinkimas	25
Elektroniniai reguliavimai	26
Elektroninio reguliavimo pasirinkimas	26
Standartiniai elektroniniai reguliavimai	26
Papildomi elektroniniai reguliavimai	27
Atskiros funkcijos / nuostatos	29
Odometras (bendras kilometrų skaičius)	29
Kelionių skaitiklis	29
Kelionių skaitiklio nustatymas iš naujo	29
Važiavimo programa	30
Nuostatų meniu	31
Prieiga prie nuostatų meniu	32
Menu naršymas	32
Giroskopas	33
Giroskopo įjungimas / išjungimas	33
Išorinių jungčių parinktys	34
Išorinių mygtukų valdiklių prijungimas	34
Infraraudonųjų spindulių sąsaja	35
Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pulto kodų įvedimas	35
„Bluetooth“	36
Trikčių šalinimas	37
Techninė priežiūra ir (arba) remontas	40
Remontas	40
Aptarnavimas	40
Techninės saugos patikrinimai	40
Kasdieniai patikrinimai	40
Kassavaitiniai patikrinimai	40
Kasmetiniai patikrinimai	40

Techniniai duomenys	41
Termodinaminiai duomenys	41
Garantija	41
Garantijos sertifikatas	42
Pastabos	43

SIMBOLIAI

Visada būtina laikytis spalvotame fone esančių saugos priemonių!

- ☞ Šis simbolis reiškia atsargumo priemonę arba rekomendaciją.
- [] Nurodo paveikslėlio numerį
- () Nurodo funkcinį komponentą paveikslėlyje.

ĮVADAS

Prieš pirmą kartą naudodamiesi vežimėliu perskaitykite šį vadovą ir atidžiai laikykitės nurodymų. Jei vežimėliu naudosis vaikai ar paaugliai, prieš pradėdami naudotis vežimėliu, jie kartu su tėvais ar globėjais turėtų perskaityti šį vadovą.

Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis valdomas per valdymo modulį.

- ☞ Priedai ir papildomos funkcijos, pvz., išoriniai valdikliai, nėra standartinio komplekto dalis.

Jei valdymo modulį ar jo priedus naudosite netinkamai, galite sukelti pavojų sau arba kitiems, todėl svarbu išmokti tinkamai naudotis įranga.

Šis naudojimo vadovas padės jums patogiai naudotis valdymo moduliu, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

Naudotojams, turintiems regos negalią, mūsų svetainėje galima rasti PDF failų su papildoma informacija apie mūsų gaminius.

- ☞ Jei turite klausimų, kreipkitės į platintoją.

Jūsų elektrinio neįgaliųjų vežimėlio naudojimo vadove taip pat pateikiama informacija apie gaminio saugą ir visus galimus gaminio atšaukimus.

MODELIAI

Šis naudojimo vadovas skirtas šiam valdymo moduliui:

CJSM2 modulis

SPECIFIKACIJOS

Šis valdymo modulis sukurtas elektriniams neįgaliųjų vežimėliams su „R-Net“ elektronika.

NAUDOJIMAS

Šį valdymo modulį prie elektrinio neįgaliųjų vežimėlio galima prijungti tik per „R-Net“ elektroniką.

REGULIAVIMAS

Prieš pirmą kartą naudodamiesi vežimėliu perskaitykite šį vadovą ir atidžiai laikykitės nurodymų. Jei vežimėliu naudosis vaikai ar paaugliai, prieš pradėdami naudotis vežimėliu, jie kartu su tėvais ar globėjais turėtų perskaityti šį vadovą.

Paprastai bet kokį reguliavimą ar pritaikymą turi atlikti platintojas.

Prieš pirmą kartą naudojant valdymo modulį, jį turi sureguliuoti platintojas.

Be jūsų vairavimo patirties ir specialių poreikių, atliekant šį pritaikymą taip pat reikia atsižvelgti į aplinką, kurioje vežimėlis bus naudojamas pirmiausia.

Jei reikia, platintojas gali sureguliuoti vairasvirtės jautrumą.

☞ Rekomenduojame reguliariai tikrinti valdymo modulio nuostatas, kad būtų užtikrintas geriausias ilgalaikis komfortas, taip pat ir pasikeitus jūsų sveikatos būklei ar negaliai.

PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS

Valdymo modulį galima vėl pradėti naudoti. Prieš vėl naudodami valdymo modulį, jį atidžiai patikrinkite.

☞ Higienos priemonės, įskaitant dezinfekciją, turi būti vykdomos pagal patvirtintą higienos planą.

GAMINIO NAUDOJIMO LAIKOTARPIS

Apskaičiuota, kad vidutinė gaminio naudojimo trukmė turėtų būti 4 metai, jei gaminys naudojamas pagal paskirtį ir laikomasi visų techninės priežiūros ir eksploatacijos reikalavimų. Gaminio naudojimo laikotarpis priklauso nuo naudojimo dažnumo, aplinkos, kurioje jis naudojamas, ir priežiūros. Atsarginėmis dalimis galite prailginti gaminio naudojimo laikotarpį. Paprastai atsarginių dalių galima įsigyti dar 5 metus po to, kai modelis buvo nustotas gaminti.

☞ Šis nurodytas numatomas naudojimo laikotarpis nelaikomas garantiniu laikotarpiu.

SAUGOS PRIEMONĖS

☞ Išmontuoto valdymo modulio nenu-meskite ir neišmeskite. Visada su juo elkitės atsargiai! Tik taip bus užtikrintas ilgalaikis jo tarnavimas be nesklandumų.

☞ Važiuodami neatjunkite jungties.

☞ Važiuodami nespauskite įjungimo / išjungimo mygtuko, nebent tai būtų avarinė situacija.

– Tai sustabdo elektrinį neįgalųjų vežimėlį (avarinis stabdymas).

☞ Į įkrovimo lizdą neįjunkite jokių kitų daiktų, išskyrus originalios įrangos gamintojo kištukus.

– Gali kilti trumpojo jungimo pavojus!

DVIEJŲ VALDYMO MODULIŲ SUJUNGIMAS

Tai turi atlikti tik platintojas.

Prie „R-Net“ LCD sistemos galima prijungti du valdymo modulius.

Ši parinktis gali būti naudinga, jei elektrinį neįgaliųjų vežimėlį valdys lydintysis asmuo – tada valdymo modulio nereikės perkelti į vežimėlio galą.

Antrasis valdymo modulis gali būti naudojamas, pvz., kaip išorinė vairasvirtė arba išorinis įjungimo / išjungimo mygtukas. Galima pridėti ir daugiau funkcijų, pvz., posūkių signalus, garso signalą ir pan.


Vairavimo funkcijos yra aktyvios tame valdymo modulyje, kuriame jos buvo įjungtos.

Antrojo valdymo modulio ekranas valdomas tuo pačiu būdu. Šis valdymo modulis taip pat leidžia išjungti sistemą.

APŽVALGA


CJSM2 <LCD> valdymo modulis

- (1) Vairasvirtė
- (2) Įkrovimo lizdas
- (3) Išorinio režimo spaudžiamojo mygtuko (11) arba valdiklio lizdas
- (4) Išorinio įjungimo / išjungimo mygtuko lizdas
- (5) Infraraudonųjų spindulių siųstuvas

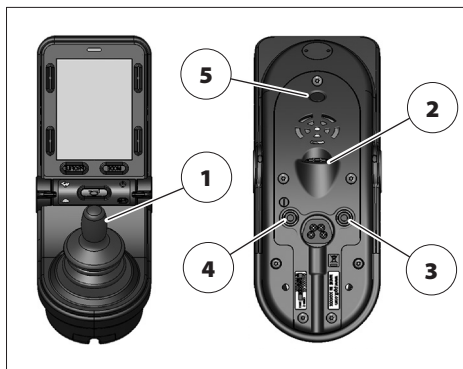

Mygtukinis valdymo skydelis

- (6) Garso signalas
- (7) Įjungimas / išjungimas ir profilis / režimas
- (8) Režimo perjungiklis
- (9) Kairysis posūčio signalas, įjungimas / išjungimas
- (10) Avarinė lemputė, įjungimas / išjungimas
- (11) Šviesos, įjungimas / išjungimas
- (12) Dešinysis posūčio signalas, įjungimas / išjungimas
- (13) Vairavimo profiliai
- (14) Greičio nuostata

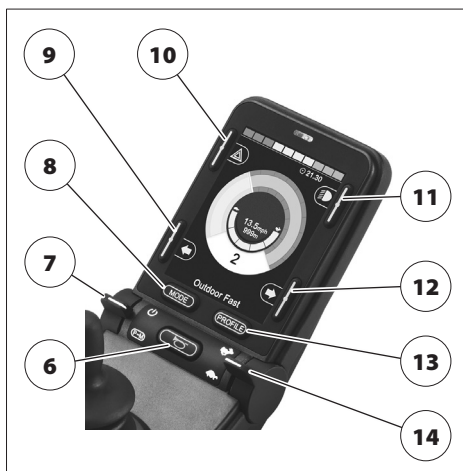

Simbolių valdymo skydelis

- (15) Profilis / režimas
- (16) Valdymo modulis, įjungimas / išjungimas
- (17) Infraraudonųjų spindulių imtuvas
- (18) Greitėjimas
- (19) Lėtėjimas



LCD ekranas

🔊 LED indikatoriai užsidega, kai funkcija yra įjungta.

(20) Kairiojo posūkio signalo ekranas

(21) Avarinės lemputės ekranas

(22) Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius

(23) Šviesų indikatorius

(24) Dešiniojo posūkio signalo ekranas

(25) Profilio ekranas

(26) Greičio nuostata

(27) Grafinis faktinio važiavimo greičio arba elektroninės energijos sąnaudų rodmuo.



👁️ Indikatorius pasislenka į dešiniąją ekrano pusę, kai padidėja važiavimo greitis arba energijos sąnaudos.

(28) „Bluetooth“ ryšio indikatorius

(29) Laikrodis

(30) Faktinio važiavimo greičio rodmuo, įskaitant kelionių skaitiklį arba odometrą.

(31) Vairavimo profilio ekranas

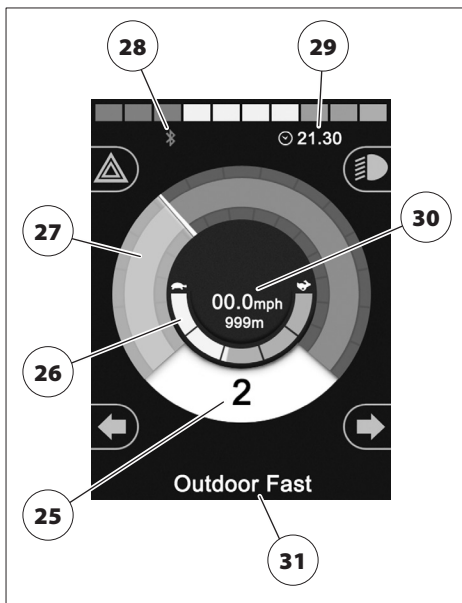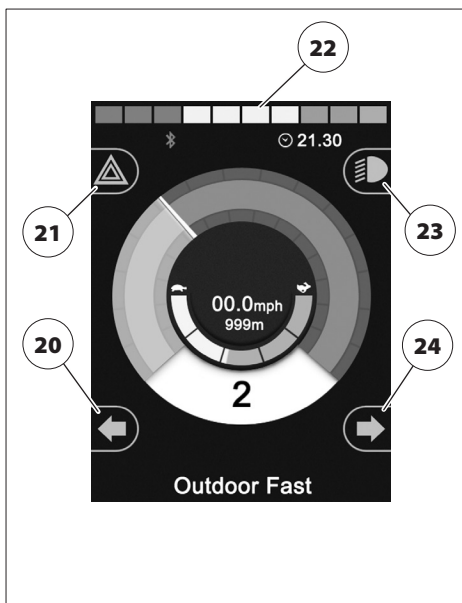


Lydinčiojo asmens valdymas

- (1) Vairasvirtė
- (2) Atraminė plokštelė


Mygtukinis valdymo skydelis

- (3) Iš anksto nustatytas didžiausias greitis
- (4) Režimo perjungiklis
- (5) Valdymo režimo perjungiklis (naudotojas / lydintysis asmuo)


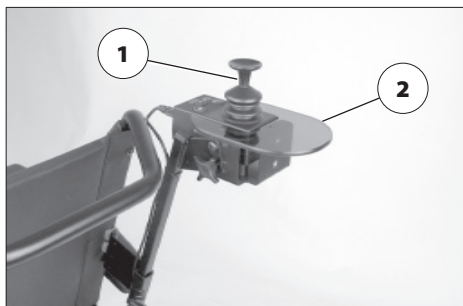



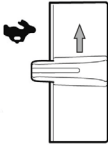


LED indikatoriai

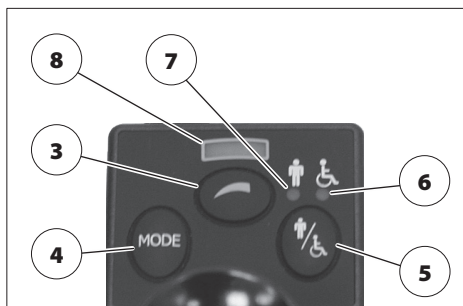




- (6) Valdymo režimas (naudotojas)
- (7) Valdymo režimas (lydintysis asmuo)
- (8) Iš anksto nustatyti didžiausi greičio lygiai

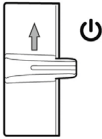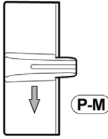



MYGTUKAI IR SIMBOLIAI

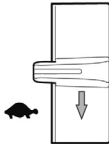	Ijungimas / išjungimas	Atitinkamai įjungia ir išjungia valdymo modulį.
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Įjungiant elektronika atlieka sistemos bandymą. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Mygtukas automatiškai grįžta į neutralią padėtį. 	
	Profilis / režimas	Kaskart, kai svirtis pastumiama <i>atgal</i> , cikliškaai perjungiami galimi vairavimo profiliai ir konfigūruojamos funkcijos.
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ <i>Profilio / režimo mygtuką</i> reikia spausiti tik tada, kai elektrinis neįgaliųjų vežimėlis yra nejudančioje padėtyje. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Atkreipkite dėmesį į skyriuose <i>Važiavimo programa 30</i> puslapyje ir <i>Režimo meniu 23</i> puslapyje pateiktą informaciją. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Mygtukas automatiškai grįžta į neutralią padėtį. 	
	Garso signalas	Garsinis signalas skamba visą laiką, kol mygtukas yra nuspaustas.
	Režimas	Paspaudus mygtuką, perjungiama į nuostatų režimą.
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ <i>Režimo mygtuką</i> spauskite tik tada, kai elektrinis neįgaliųjų vežimėlis yra nejudančioje padėtyje. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje <i>Režimo meniu 23</i> puslapyje. 	
	Profilis	Paspaudus perjungiamas kitas vairavimo profilis.
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje <i>Važiavimo programa 30</i> puslapyje. 	
	Didžiausio greičio nuostata, Plus	Stumdami rankenėlę <i>į priekį</i> , didžiausią greičio nuostatą padidinsite vienu lygiu (20 %). <ul style="list-style-type: none"> ☞ Rekomenduojame naudoti rankenėlę „Plus“ tik tada, kai elektrinis neįgaliųjų vežimėlis yra nejudančioje padėtyje.
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Nuo 1 lygio (20 %) iki didžiausio 5 lygio (100 %). 	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Rankenėlė automatiškai grįžta į neutralią padėtį. 	

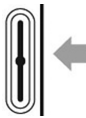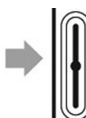




MYGTUKAI IR SIMBOLIAI

	Didžiausio greičio nuostata, Minus	<p>Stumdami rankenėlę <i>atgal</i>, didžiausią greičio nuostata sumažinsite vienu lygiu (20 %).</p> <p>☞ Saugumo sumetimais rankenėlę „Minus“ rekomenduojame naudoti tik tada, kai neįgaliųjų vežimėlis yra nejudančioje padėtyje.</p>
	☞ Nuo 5 lygio (100 %) iki mažiausio 1 lygio (20 %).	
	☞ Rankenėlė automatiškai grįžta į neutralią padėtį.	
	Avarinė lemputė	<p>Paspaudus įjungtą arba išjungtą avarinę lemputę.</p>
	☞ Simbolis mirksi kartu su posūkio signalu.	
	Šviesos	<p>Paspaudus įjungtą arba išjungtą šviesos.</p>
	☞ Simbolis šviečia, kai įjungtos šviesos.	
	Kairysis posūkio signalas	<p>Paspaudus įjungtą arba išjungtą posūkio signalą.</p>
	☞ Greitai mirksintis simbolis reiškia, kad posūkio signalas sugedęs.	
	Dešinysis posūkio signalas	<p>Paspaudus įjungtą arba išjungtą posūkio signalą.</p>
	☞ Greitai mirksintis simbolis reiškia, kad posūkio signalas sugedęs.	




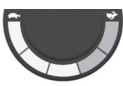

Lydinčiojo asmens valdymas

	Iš anksto nustatytas greitis	<p>Stumdami rankenėlę, didžiausią greičio nuostata padidinsite vienu lygiu (20 %).</p>
	☞ Nuo 1 lygio (20 %) iki didžiausio 5 lygio (100 %).	
	Didžiausio greičio rodinys	<p>Didžiausią greitį rodo šviečiančių diodų (LED) skaičius.</p> <p>☞ Kiekvienas LED atitinka papildomą 20 % lygį.</p>

Lydinčiojo asmens valdymas

	Valdymo režimas	Kiekvienu mygtuko paspaudimu perjungiamas naudotojo ir lydinčiojo asmens valdymas.
	Iš anksto nustatyto valdymo režimo indikatorius	Po simboliu esantis šviečiantis diodas (LED) rodo, kuris valdymo režimas pasirinktas.
	Režimas	Perjungiamas važiavimo režimas ir nuostatų režimas.
	 Režimo mygtuką spauskite tik tada, kai elektrinis neįgaliųjų vežimėlis yra nejudančioje padėtyje.	
	 Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje <i>Režimo meniu</i> 23 puslapyje.	

LCD ekranas

	LCD ekranas	Kai vežimėlis įjungiamas, LCD ekrane rodomi įvairūs indikatoriai.
	Informacijos langelis	Rodomas pasirinktas vairavimo profilis.
	Greičio rodmuo	Indikatorius pasislenka į dešiniąją ekrano pusę, kai padidėja važiavimo greitis arba energijos sąnaudos.
	Didžiausio greičio rodmuo	Didžiausią greičio nuostatą rodo šviečiančių segmentų skaičius.  Kiekvienas segmentas atitinka papildomą 20 % lygį.

LCD ekranas		
	Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius	Akumuliatoriaus indikatoriuje šviečiančių segmentų skaičius mažėja atsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovos lygį.
 Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje <i>Akumuliatoriaus indikatorius</i> 19 puslapyje.		
	Elektroninis reguliavimas	Apšviesta simbolio sritis rodo, kuri elektroninė nuostata pasirinkta.
 Šis simbolis rodomas, kai perjungiate nuostatų režimą.		
 Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje <i>Elektroniniai reguliavimai</i> 26 puslapyje.		
	Valdymo modulis užblokuotas	Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis yra apsaugotas nuo neteisėto naudojimo.
 Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje <i>Užraktas</i> 16 puslapyje.		
	Budėjimo režimas	Šis simbolis trumpam pasirodo prieš pat elektriniam neįgaliųjų vežimėliui pereinant į automatinį budėjimo režimą.
	Klaidų pranešimai	Įspėjamieji pranešimai apie įvairias klaidas.
 Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje <i>Trikčių šalinimas</i> 37 puslapyje.		
	„Bluetooth“	Simbolis (mėlynas) rodomas kiekvieną kartą suaktyvinus „Bluetooth“.
	Sumažintas greitis	Jei simbolis geltonas, vežimėlio greitis sumažintas. Taip yra todėl, kad sėdynės pakėlimas buvo nustatytas aukščiau nei 5,5 cm ir (arba) sėdynės pasvirimas viršija 14°. Jei simbolis yra raudonas, vežimėlio važiavimo režimas išjungtas.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Akumuliatorių įkrovimas

Nekiškite į įkrovimo lizdą jokių daiktų, išskyrus apsauginį kištuką ir akumuliatoriaus įkroviklio kištuką. Gali kilti trumpojo jungimo pavojus!

Norėdami įkrauti akumuliatorius, pirmiausia išjunkite valdymo modulį, tada įkiškite akumuliatoriaus įkroviklio kištuką į valdymo modulio lizdą (2).

☞ Taip pat žr. *elektrinio neįgaliųjų vežimėlio naudojimo vadovą*.

Valdymo modulio prijungimas

Per įjungimo fazę (trunka maždaug vieną sekundę) nelieskite ir nejudinkite vairasvirtės!

Valdymo modulį įjunkite pastumdami valdymo svirtį (6) pirmyn į *įjungimo / išjungimo* padėtį (15). Dabar elektronika atliks sistemos bandymą.

☞ Valdymo svirtis automatiškai grįžta į neutralią padėtį.

Kai *akumuliatoriaus indikatorius* (21) šviečia nepertraukiamai, elektronika yra paruošta naudoti.

☞ Jei įjungus valdymo modulį rodomas 8 vairavimo profilis, reiškia, kad kėdė veikia lydinčiojo asmens valdymo režimu. Neįgaliųjų vežimėlio naudotojo valdymo modulį galite perjungti paspausdami mygtuką „*Profiliai*“.

☞ Jei yra sutrikimų, LCD ekrane bus rodomi pranešimai.

☞ Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje *Trikčių šalinimas* 37 puslapyje.



Pastumkite valdymo svirtį (6) pirmyn į *įjungimo / išjungimo* padėtį (15). Tokiu būdu išjungiamas neįgaliųjų vežimėlis.


Užraktas

Valdymo modulis yra užrakintas, jei LCD ekrane pasirodo pakabinamos spynos simbolis [1].

Valdymo modulį galima užrakinti, kad elektrinis neįgaliųjų vežimėlis būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimo. Nors pagal numatytąsias nuostatas ši funkcija nekonfigūruojama, jūsų platintojas gali pridėti konfigūravimo funkciją jūsų pageidavimu.

Užraktas suaktyvinamas įjungimo / išjungimo mygtuku

1. Kai valdymo modulis prijungtas, passtumkite valdymo svirtį (6) pirmyn į *įjungimo / išjungimo* padėtį (15) ir palaikykite, kol išgirsite trumpą pyptelėjimą.
 2. Paspauskite vairasvirtę iki galo į priekį (važiavimas į priekį) ir palaukite, kol išgirsite trumpą <pyptelėjimą>.
 3. Tada patraukite vairasvirtę iki galo atgal (atbuline eiga) ir dar palaukite, kol išgirsite trumpą <pyptelėjimą>.
 4. Atleiskite vairasvirtę.
- ☞ Kai pasigirsta ilgas <pyptelėjimo> signalas, tai reiškia, kad užraktas buvo įjungtas.
 - ☞ Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis dabar apsaugotas nuo neteisėto naudojimo.

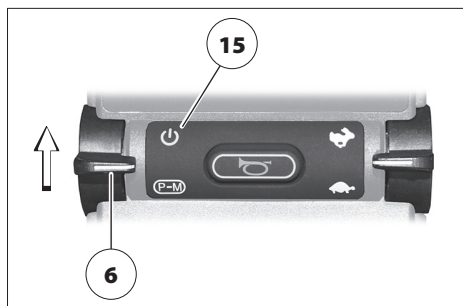

Išjungiklio funkcija

Ijungę valdymo modulį, įkiškite išjungiklį [1] į įkrovimo lizdą (2). Išgirdę trumpą <pyptelėjimą>, ištraukite išjungiklio kištuką.

🔊 Elektronika išjungia važiavimo režimą ir automatiškai išsijungia.

Užrakto išjungimas

Užraktas išjungiamas įjungimo / išjungimo mygtuku


1. Valdymo modulį prijunkite pastumdami valdymo svirtį (6) pirmyn į *įjungimo / išjungimo* padėtį (15).
2. Paspauskite vairasvirtę iki galo į priekį (važiavimas į priekį) ir palaukite, kol išgirsite trumpą <pyptelėjimą>.
3. Paspauskite vairasvirtę iki galo atgal (atbuline eiga) ir dar palaukite, kol išgirsite trumpą <pyptelėjimą>.
4. Atleiskite vairasvirtę.

🔊 Kai pasigirsta ilgai trunkantis <pyyptelėjimo> signalas, reiškia, kad užraktas išjungtas.

Išjungiklio funkcija

Ijungę valdymo modulį, įkiškite išjungiklį [1] į įkrovimo lizdą (2). Išgirdę trumpą <pyptelėjimą>, ištraukite išjungiklio kištuką.

🔊 Dabar užraktas išjungtas.

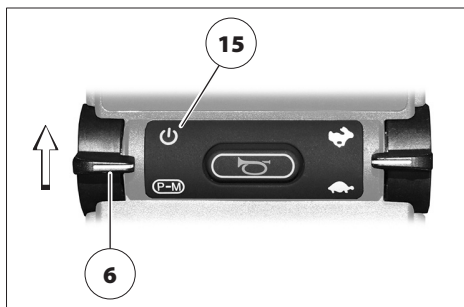

Automatinis išjungimas

Siekiant taupyti akumulatoriaus energiją, elektriniame neįgaliųjų vežimėlyje yra automatinio išjungimo funkcija.

Jei nepajudinsite vairasvirtės arba nepašpausite valdymo modulio mygtuko, neįgaliųjų vežimėlis automatiškai išsijungs pasibaigus iš anksto nustatytam skirtojo laiko laikotarpiui.

- ☞ Nors ši funkcija nėra standartinė, jūsų techninės priežiūros atstovas gali ją sukonfigūruoti ir nustatyti 1–30 minučių skirtąjį laiką.

PATIKRINIMAS PRIEŠ VAŽIAVIMĄ

Akumulatoriaus indikatorius

Ijungus valdymo modulį, po trumpo sistemos bandymo akumulatoriaus indikatorius (21) rodo akumulatoriaus įkrovos lygį.

Akumulatoriams išsikraunant, akumulatoriaus indikatorius rodys vis mažiau šviečiančių segmentų (21).

Šį indikatorių sudaro 10 segmentų (3 raudoni, 4 geltoni / oranžiniai ir 3 žali).

Segmentų spalva parodo:


Žalia	Akumulatoriai įkrauti.
	➤ Akumulatoriaus įkrovos lygis atitinka užsidedusių žalių indikatorių skaičių.
Geltona	Patartina įkrauti.
Raudona	Akumulatoriai yra išsikrovę. Kuo greičiau įkraukite akumuliatorių.

- Akumulatoriaus indikatorius tiksliai rodo tik važiuojant lygiu paviršiumi.
- Važiuojant į kalnę ar nuokalnę, rodmenys bus nepatikimi.

Pastaba

Akumulatoriaus indikatorius buvo sukurtas atsižvelgiant į gamintojo originalių akumuliatorių išsikrovimo savybes. Papildomai parduodamų arba kitų akumuliatorių savybės gali skirtis ir turėti neigiamos įtakos šio ekrano patikimumui.

Be to, kadangi tikslūs rodmenys priklauso nuo akumuliatorių amžiaus, temperatūros ir apkrovos, kuria jie yra veikiami, taikomi tam tikri apribojimai.

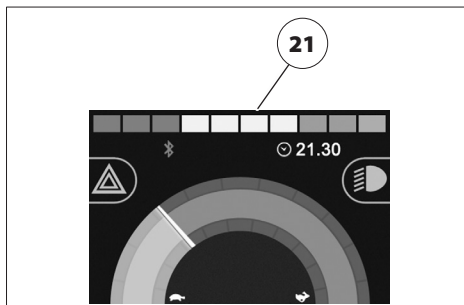

Iš anksto nustatytas didžiausias greitis

Nelaimingo atsitikimo rizika dėl:

- netinkamai nustatyto didžiausio greičio lygio;
- važiuodami pasirinkite mažesnę didžiausio greičio lygį!

Didžiausią greičio lygį reikia pasirinkti atsižvelgiant į asmenines aplinkybes ir konkrečią vairavimo situaciją!

Važiuodami nuo kalno, didžiausią greitį reguliuokite proporcingai nuokalnės statumui. Niekada neviršykite didžiausio leistino greičio. Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus!


Ijungus valdymo modulį, jis automatiškai atmintyje atkuria ir vėl įjungia paskutinę didžiausio greičio nuostatą.

Didžiausio greičio indikatorius (25) užsidegusių segmentų skaičius rodo didžiausio greičio lygio nuostatą.

- ☞ Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje *Mygtukai ir simboliai* 11 puslapyje.

Prieš pradėdami važiuoti arba važiuojant, judinant valdymo svirtį (13) į priekį arba atgal, atitinkamai vienu metu didinamas arba mažinamas didžiausias greitis.


- ☞ Šiame kontekste žr. skyrius *Greičio lygiai* 22 puslapyje ir *Mygtukai ir simboliai* 11 puslapyje.

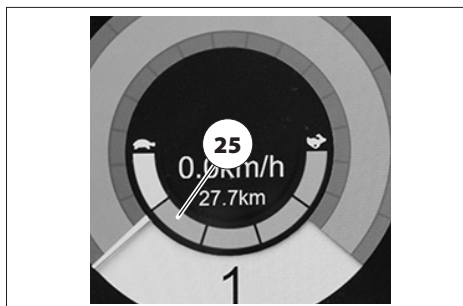

Lydinčiojo asmens valdymas

Prieš pradėdant važiuoti arba važiuojant, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką (3), didžiausio greičio nuostata padidėja vienu lygiu, kol pasiekiamas didžiausias 5 lygis. Dar kartą paspaudus mygtuką, kai nustatytas 5 lygis, didžiausias greitis bus grąžintas į 1 lygį, t. y. mažiausią nuostatą.

- ☞ Ekrane (1) šviečiantis diodas (LED) rodo nustatytą didžiausią greitį.
- ☞ Taip pat žr. skyrių *Mygtukinis valdymo skydelis* 10 puslapyje.
- ☞ Jei simbolis mirksi, vežimėlio greitis buvo sumažintas. Taip yra todėl, kad sėdynės pakėlimas buvo nustatytas aukščiau nei 5,5 cm ir (arba) sėdynės pasvirimas viršija 14°.

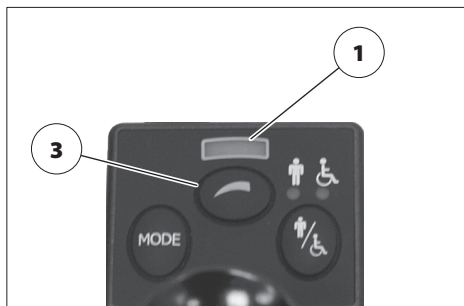

Greičio lygiai

Didžiausią greičio lygį reikia pasirinkti atsižvelgiant į asmenines aplinkybes ir konkrečią vairavimo situaciją!

Pavojingose situacijose, kai jaučiatės nesaugiai (pvz., važiuodami uždaroje erdvėje, nuokalne, rampa, pėsčiųjų zonose ar pan.), pasirinkite mažą greičio lygį.

Naudojant lydinčiojo asmens valdymo režimą, didžiausią leistiną greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į asmenines lydinčiojo asmens aplinkybes ir konkrečią vairavimo situaciją!

Perjungiant į mažesnę didžiausio greičio lygį, elektrinis neįgaliųjų vežimėlis turi būti nejudančioje padėtyje. Staigiai stabdant gali kilti pavojus!

Didžiausią greitį galima iš anksto nustatyti bet kuriame iš 5 skirtingų greičio lygių (25).

☞ Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje *Mygtukai ir simboliai* 11 puslapyje.

Įjungus 5 lygį, didžiausias greitis yra 100 % jūsų elektrinio neįgaliųjų vežimėlio didžiausio greičio.

Įjungus 1 lygį, didžiausias greitis yra 20 % jūsų elektrinio neįgaliųjų vežimėlio didžiausio greičio.



1. Konkretus pavyzdys:

Važiavimas namuose.

Reikalinga nuostata: mažas iš anksto nustatytas didžiausias greitis [1].

☞ **Dėl per didelio iš anksto nustatyto didžiausio greičio:**

net menkiausias vairasvirtės judesys gali greitai išjudinti vežimėlį. Ankštose erdvėse naudotojas praranda vežimėlio kontrolę. Gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus!

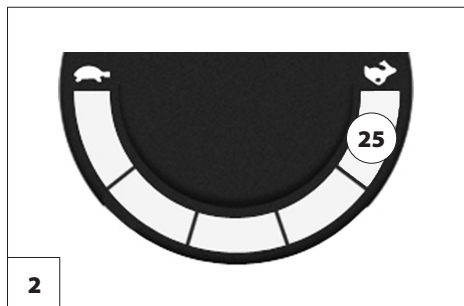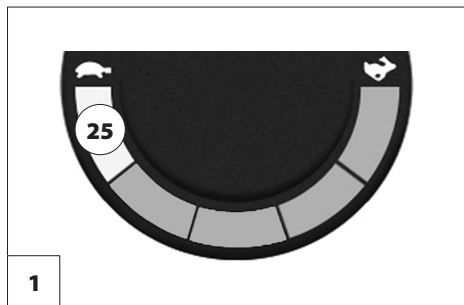

2. Konkretus pavyzdys:

Važiavimas per sankryžą.

Reikalinga nuostata: didelis iš anksto nustatytas didžiausias greitis [2].

☞ **Dėl per mažo iš anksto nustatyto didžiausio greičio:**

nesugebėsite pakankamai greitai pervažiuoti per sankryžą. Gali kilti pavojus susidurti su artėjančia transporto priemone!

REŽIMO MENIU

Režimo mygtuką spauskite tik tada, kai elektrinis neįgaliųjų vežimėlis yra nejudančioje padėtyje.

Paspaudę režimo mygtuką galite perjungti važiavimo režimą, nuostatų režimą ir kitus aktyvius režimus, pvz., „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių [1].

Važiavimo režimas

Nustačius važiavimo režimą elektrinis neįgaliųjų vežimėlis valdomas vairasvirte.



☞ Daugiau apie tai skaitykite skyriuje *Vairasvirvė* 24 puslapyje.

Nuostatų režimas

Kai įjungtas nuostatų režimas, šviečiantis sėdynės simbolis [2] rodo paskutinį pasirinktą elektroninį reguliavimą.

Elektroniniai reguliavimai pasirenkami ir tiksliai nustatomi vairasvirte.

☞ Daugiau apie tai skaitykite skyriuje *Elektroniniai reguliavimai* 26 puslapyje.

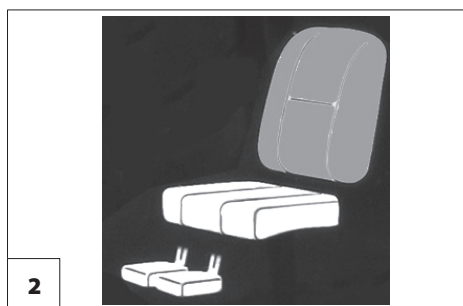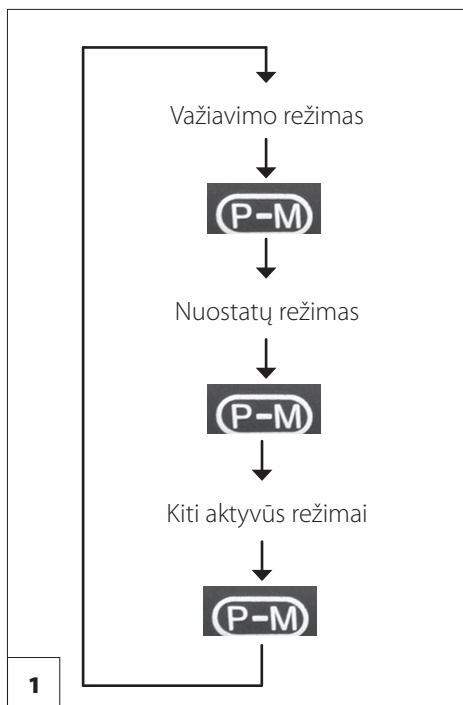

VAIRASVIRTĖ

Nejudinkite vairasvirtės, kol akumuliatoriaus indikatorius pradės nuolat šviesti.

Važiavimo ir vairavimo manevrai

Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio vairasvirtė (1) naudojama greitėjimui ir stabdymui. Lėtai judinkite vairasvirtę norima važiavimo kryptimi.

Kuo labiau atitolinsite vairasvirtę nuo pradinės padėties, tuo greičiau važiuos vežimėlis (iki nustatyto didžiausio greičio).



Jei norite įveikti posūkį, pamažu judinkite vairasvirtę ta kryptimi, kuria norite pasukti. Jei vairasvirtę staigiai pajudinsite į vieną ar į kitą pusę, vežimėlis beveik apsisuks (pasisuks vietoje).

☞ Važiuojant atbuline eiga arba įveikiant posūkius greitis automatiškai sumažinamas.

Elektrinio neįgaliųjų vežimėlio stabdymas

Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis sustoja, kai tik atleidžiate vairasvirtę.

Norėdami stabdyti saugiai, lėtai grąžinkite vairasvirtę į pradinę (numatytąją) padėtį.

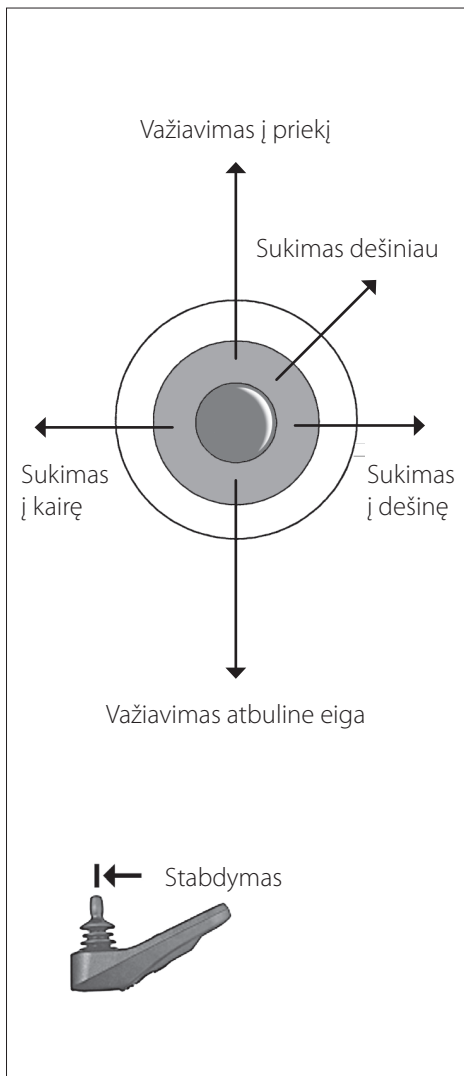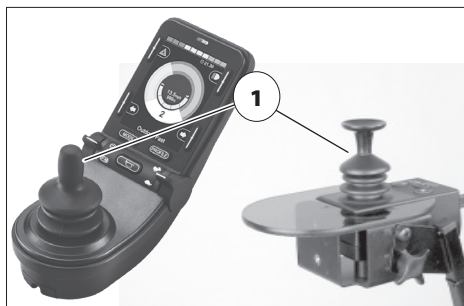

LYDINČIOJO ASMENS VALDYMAS

Lydinčiojo asmens valdymas galimas tik su moduliais JSM, CJSM ir CJSM2. JSM nėra ats-kira funkcija.



- ☞ Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje *Apžvalga* 8 puslapyje.

Valdymo režimo pasirinkimas

Kai CJSM2 valdymo modulyje valdymo svirtis (6) pastumiama pirmyn įjungimo / išjungimo padėtį (15), vėl įjungiamas paskutinis pasirinktas valdymo režimas.

Mygtuko (32) paspaudimu perjungiami naudotojo ir lydinčiojo asmens valdymo režimai.

- ☞ Po simboliiais šviečiantys šviesos diodai (LED) (31) rodo esamą valdymo režimą.

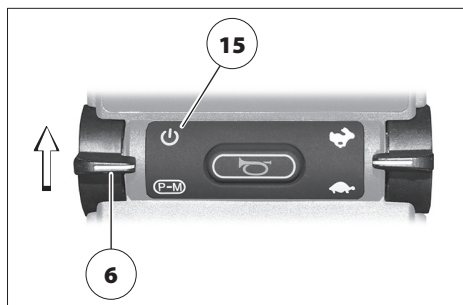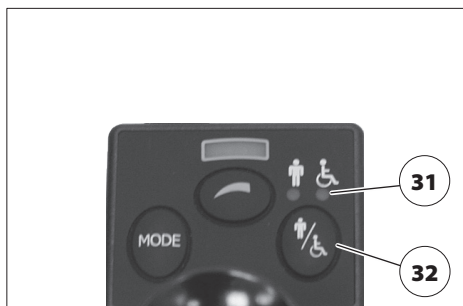

ELEKTRONINIAI REGULIAVIMAI

Galimi elektroniniai reguliavimai priklauso nuo konkrečios elektrinio neįgaliųjų vežimėlio įrangos.

Nuostatų režimu ekrane nuolat šviečia pasirinktas elektroninis reguliavimas.

Elektroninio reguliavimo pasirinkimas

Elektroniniai reguliavimai saugomi begaliniame cikle.

Pasukdami vairasvirtę į dešinę, pereisite aukštn prie kitos nuostatos.

Pasukdami vairasvirtę į kairę, pereisite žemyn prie kitos nuostatos.

Standartiniai elektroniniai reguliavimai

Elektroninius reguliavimus galima atlikti:

Judinant vairasvirtę žemyn – reguliuojama pagrindinės padėties link.

Judinant vairasvirtę atgal – reguliuojama nuo pagrindinės padėties.

Atleidus vairasvirtę bet koks reguliavimas panaikinamas.

LCD ekrano indikatoriai

Daugiau informacijos apie konkrečių elektroninį reguliavimą gali būti pateikta po sėdynės simboliais esančiame tekste.


Jei šalia sėdynės simbolio pasirodo oranžinio vėžlio simbolis, reiškia, kad buvo suaktyvintas greičio valdymas.

Taip pat žr. skyrių *Trikčių šalinimas* 37 puslapyje.

Jei šalia vežimėlio simbolio pasirodo mirksintis raudonas vėžlio simbolis, tai reiškia, kad vežimėlis buvo sustabdytas saugumo sumetimais. Toliau važiuoti galima tik tada, kai reguliavimas grąžinamas į pagrindinę padėtį.

Taip pat žr. skyrių *Trikčių šalinimas* 37 puslapyje.

Pavaizduotas simbolis reiškia:

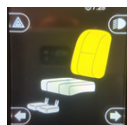


Atlošas




Sėdynės pakreipimas




Sėdynės pakėlimas

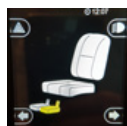


Kairės kojos atrama

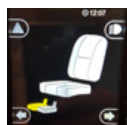

Dešinės kojos atrama

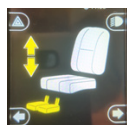

Kojų atramos ilgis

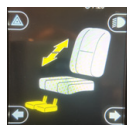

Kojų atrama

Papildomi elektroniniai reguliavimai

- ☞ Jei parinktis buvo įrašyta į *atmintį*, visos nuostatos bus apšviestos.

Jei meniu išsaugotos atlošo, sėdynės kampo, atlenkimo, atsistojimo arba kojų pagrindinės arba galutinės padėties, bus rodomos rodyklės.

- ☞ Pasvirusi rodyklė rodo išsaugotą galutinę padėtį.
- ☞ Pasvirusi rodyklė rodo išsaugotą galutinę padėtį.

Elektroninius reguliavimus išskyrus *Stand* (atsistojimo) ir *Help stand up* (pagalbos atsistoti) galima atlikti:

Judinant vairasvirtę žemyn – reguliuojama pagrindinės padėties link.

Judinant vairasvirtę atgal – reguliuojama nuo pagrindinės padėties.

Stand (atsistojimo) ir *Help stand up* (pagalbos atsistoti) elektroniniai reguliavimai atliekami:


Judinant vairasvirtę žemyn – reguliuojama nuo pagrindinės padėties.

Judinant vairasvirtę atgal – reguliuojama pagrindinės padėties link.


Atleidus vairasvirtę bet koks reguliavimas panaikinamas.

LCD ekrano indikatoriai

- ☞ Daugiau informacijos apie konkretų elektroninį reguliavimą gali būti pateikta po simboliais esančiame tekste.

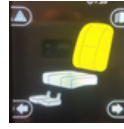

Atlošas

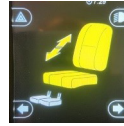

Sėdynės pakreipimas



Sėdynės pakėlimas




Kojų atramos ilgis



Kojų atrama



Neigiamas posvyris

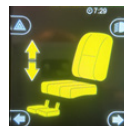

Iš sėdimos į stovimą padėtį




Iš sėdimos į gulinčią padėtį


Pavaizduotas simbolis reiškia:



Iš gulinčios į stovimą padėtį

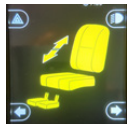

45° kampų stovimą padėtį

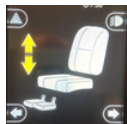

Atmintis 1/2



Atmintis 3/4

ATSKIROS FUNKCIJOS / NUOSTATOS

- Ne visos čia aprašytos funkcijos gali būti prieinamos jūsų konkrečiam vežimėlio modeliui.

Odometras (bendras kilometrų skaičius)

LCD ekrane rodomas *bendras nuvažiuotų kilometrų skaičius (29)*, bet ne daugiau kaip 99 999.

- Rodomi tik kilometrai, nuvažiuoti pirmyn.

Kelionių skaitiklis

LCD ekranas gali rodyti *kasdien nuvažiuotus kilometrus (29)*, bet ne daugiau kaip 9 999,9.

- Rodomi tik kilometrai, nuvažiuoti pirmyn.


Atstumo nuostatų meniu galite perjungti įvairias odometro rodmens parinktis.

- Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje *Nuostatų meniu* 31 puslapyje.
- Prireikus galima iš naujo nustatyti kelionių skaitiklį.

Kelionių skaitiklio nustatymas iš naujo

Kelionių skaitiklį galima iš naujo nustatyti atstumo nuostatų meniu.

- Tuomet kelionių skaitiklis LCD ekrane rodys *0,0 km*.

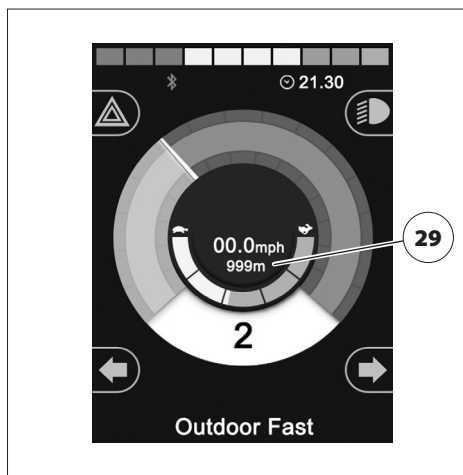

Važiavimo programa

Paspaudus mygtuką „Profiliai“ (12) galima pasirinkti iki aštuonių vairavimo profilių.

Skirtingos važiavimo programų savybės leidžia nustatyti elektrinio neįgaliųjų vežimėlio važiavimo charakteristikas, kad jos atitiktų konkrečias važiavimo sąlygas.

Pavyzdžiui, galima atsisiųsti atskiras programas, kad būtų galima naudoti specialius valdiklius.

☞ Dabartinė važiavimo programa (24) rodoma LCD ekrane.



Šių važiavimo programų gamykloje nustatytos savybės nurodytos atitinkamuose *Aptarnavimo ir techninės priežiūros vadovuose*.

☞ Taip pat skaitykite elektrinio neįgaliųjų vežimėlio naudojimo vadovo skyrių *Rekomendacijos platintojui*.


Važiavimo programa	Savybės	Ijungtas giroskopas
1	Tinka tais atvejais, kai elektrinis neįgaliųjų vežimėlis naudojamas viešojo transporto priemonėse ir yra įrengtas giroskopas	Ne
2	Visapusiškas, skirtas naudoti patalpose ir lauke	Taip
3	Visapusiškas, skirtas naudoti patalpose ir lauke	Taip
4–7	Naudotojas gali pritaikyti pagal savo poreikius	
8	Lydinčiojo asmens valdymas	Taip

Nuostatų meniu

- ☞ Kiekviename submeniu yra meniu parinktis „Išeiti“, kuri grąžina į pagrindinį meniu.

Nuostatų meniu [1] leidžia pasiekti šiuos meniu:

- ☞ Laikas
 - Nustatyti laiką
 - „Display Time“ (laiko rodinys) (standartiniu arba kariniu laiku)
- ☞ Atstumas
 - Bendras atstumas (bendras kilometrų skaičius)
 - Kelionės atstumas (kelionių skaitiklis)
 - Rodyti atstumą (odometro arba kelionių skaitiklio rodmuo)
 - Išvalyti kelionės atstumą (iš naujo nustatomas kelionių skaitiklis)
- ☞ Foninis apšvietimas (fono apšvietimas)
 - Foninis apšvietimas (fono apšvietimas)
 - Automatinis foninis apšvietimas (automatinis fono apšvietimo reguliavimas)
 - Foninio apšvietimo skirtasis laikas (fono apšvietimo trukmė)
- ☞ „Bluetooth“
 - ☞ Įvairūs meniu, leidžiantys įdiegti ir naudoti vairasvirte valdomus „Bluetooth“ įrenginius. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Bluetooth“ 36 puslapyje.

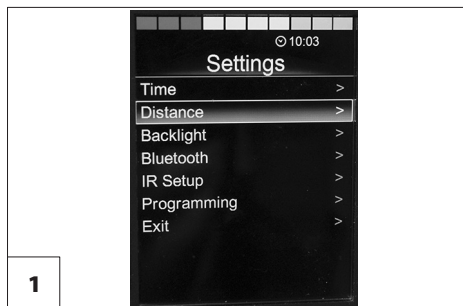

- ☞ Infraraudonųjų spindulių sąranka (infraraudonųjų spindulių nuostatos)
 - ☞ Įvairūs meniu, kuriuose galima įdiegti ir naudoti su infraraudonąja spinduliuote suderinamus prietaisus, valdomus vairasvirtėmis. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje *Infraraudonųjų spindulių sąsaja* 35 puslapyje.
- ☞ Programavimas
 - Valdikliai (konkrečių elektroninių parametrų nuostatos)
 - ☞ Šias nuostatas turi atlikti jūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras per pradinę gaminio demonstraciją.
 - Sistema (valdymo modulių informacija, padedanti techninės priežiūros centrui atlikti trikčių šalinimo procedūrą)
- ☞ Išeiti (grįžti į važiavimo režimą)


Prieiga prie nuostatų meniu

1. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę avarinio apšvietimo mygtuką (9).
 - ☞ Palaukite, kol išgirsite trumpą < pyp-
telėjimą >.
2. Atleiskite mygtuką (9).
 - ☞ LCD ekrane rodomas nuostatų meniu [1].



Menu naršymas

- ☞ Pastumiant vairasvirtę atgal – pereinama žemyn prie kito meniu elemento, sumažinama vertė arba išeinama iš meniu elemento.
- ☞ Pastumiant vairasvirtę pirmyn – pereinama aukštyn prie kito meniu elemento, padidinama vertė arba išeinama iš meniu elemento.
- ☞ Pastumiant vairasvirtę į dešinę – pereinama prie submeniu arba rodomos kitos nuostatos.
- ☞ Pastumiant vairasvirtę į kairę – kai rodoma rodyklė į kairę, rodomos kitos nuostatos.

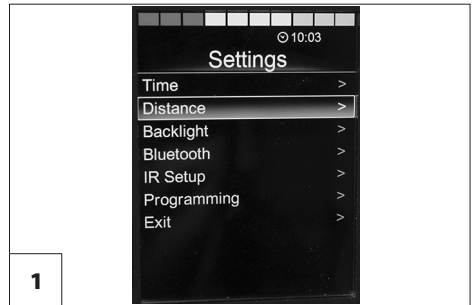

GIROSKOPAS

Giroskopas turi būti išjungtas prieš gabenimą judančioje transporto priemonėje ir (arba) per gabenimą.

Tai galima padaryti pasirinkus specialią šioms sąlygoms pritaikytą važiavimo programą.

Giroskopas, kuris yra standartinis FWD ir FWDS, padeda ištiesinti neįgaliųjų vežimėlių, kai priešingu atveju, pvz., esant nelygiam reljefui, jis pasvirtų arba apvirtų. Neįgaliųjų vežimėlio stabilumas ir valdymas žymiai pagerėja.

Kai neįgaliųjų vežimėliu, kuriame įrengtas giroskopas, važiuojama judančioje transporto priemonėje, pvz., laive, autobuse ar traukinyje, vežimėlis gali atlikti nepageidaujamus važiavimo manevrus, jei važiuojate su profiliu, kuriame yra ši funkcija. Tokiu atveju patartina važiuoti 1 profiliu, kur giroskopas išjungtas.

Išlipę iš transporto priemonės, galite perjungti kitą programą, kuri leidžia naudotis giroskopo privalumais.

Giroskopo įjungimas / išjungimas

Atsižvelgiant į pasirinktą važiavimo programą, giroskopas įjungiamas arba išjungiamas (30).

- ☞ Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje *Važiavimo programa 30* puslapyje.
- ☞ Atsižvelgiant į modelį ir įrangą, kai giroskopas išjungtas, saugumo sumetimais neįgaliųjų vežimėlio greitis gali gerokai sumažėti.



IŠORINIŲ JUNGČIŲ PARINKTYS


Valdymo modulis suteikia papildomų išorinių jungčių galimybių, pvz.:

- A Režimo perjungiklis (1)
- Įjungimo / išjungimo mygtukas (2)

Išorinių mygtukų valdiklių prijungimas

Norėdami prijungti išorinius valdymo mygtukus, nuimkite kištuko dangtelį ir iki galo įkiškite atitinkamą kištuką į atitinkamą lizdą (3) + (4) / [6].

- ☞ Įsitikinkite, kad priedas į lizdą jungiamas 90°, o ne įstrižu kampu.

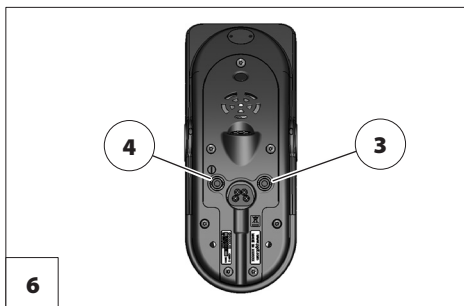




INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ SAŠAJA

Vadovaukitės išorinio įrenginio naudojimo vadove pateiktais nurodymais.

Išorinius įrenginius su infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu, pvz., televizorių, galima valdyti naudojant valdymo modulį.

Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pulto kodų įvedimas

1. Paspauskite ir palaikykite avarinę lemputę 3 sekundes.
2. Nuostatų meniu patraukite vairasvirtę žemyn, kol parenkama infraraudonųjų spindulių sąranka. Vairasvirtę paslinkite į dešinę [1].
3. INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ REŽIMAS: Norėdami pasirinkti prietaiso tipą [2], kurį norite valdyti vairasvirte, judinkite vairasvirtę aukštyn arba žemyn ir patvirtinkite pasirinkimą paslinkdami vairasvirtę į dešinę. Taip atidarysite infraraudonųjų spindulių režimo meniu [4].
4. Judinkite vairasvirtę aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte funkciją meniu [4], atitinkančią priskirtą nuotolinio valdymo pulto mygtuką, ir patvirtinkite savo pasirinkimą paslinkdami vairasvirtę į dešinę.
5. Pasirinkite mokymosi kodą [3] ir paslinkite vairasvirtę į dešinę, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Dabar valdymo modulis gali priimti signalą iš nuotolinio valdymo pulto. Tada laikykite nuotolinio valdymo pultą virš valdymo modulio ekrano maždaug 5–10 cm nuo IR imtuvo. Žr. punktą 16 8 puslapyje.

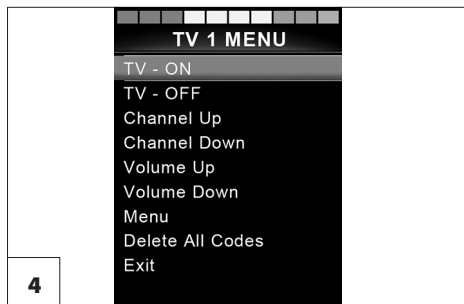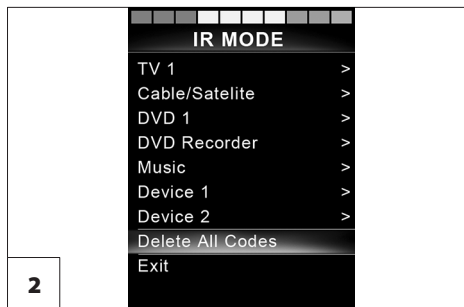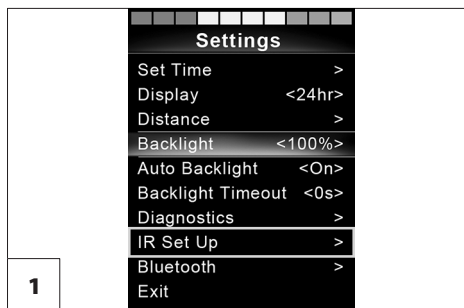

Dukart paspauskite nuotolinio valdymo pultą ir ekrane pasirodys didelė varnelė.

- ☛ Techninės priežiūros atstovas gali redaguoti valdymo modulio meniu tekstą taip, kad jis būtų tinkamas jūsų įrangai.



„BLUETOOTH“

Vadovaukitės įrenginių naudojimo vadove pateiktais nurodymais.

„Bluetooth“ meniu rodomi visi prietaisai, prijungti per „Bluetooth“.

Išorinius įrenginius su „Bluetooth“ sąsaja, pvz., išmanųjį telefoną, galima valdyti valdymo moduliu.

- ☛ Norint nustatyti, reikia techninės priežiūros atstovo pagalbos.
- ☛ „Bluetooth“ nėra standartinė funkcija. Ją reikia užsakyti kaip priedą CJSM2-BT. „Bluetooth“ modifikuoti negalima.

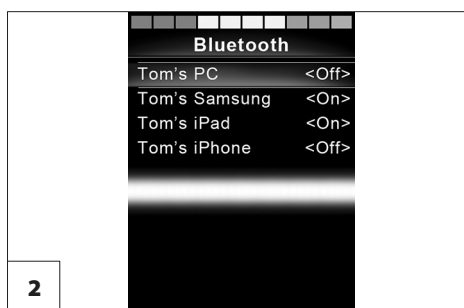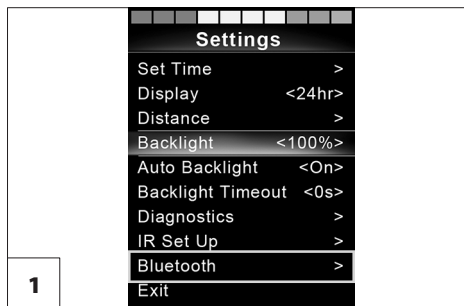


TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Klaidos ir informacija rodomos valdymo modulio LCD ekrano centre.

- (a) Rodoma klaidos vieta.
- (b) Rodomas klaidos kodas.
- (c) Rodoma gedimo priežastis.


Iš esmės, norėdami pašalinti gedimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Išjunkite valdymo modulį.
2. Atlikite veiksmą, aprašytą stulpelyje *Sprendimas*.
3. Vėl įjunkite valdymo modulį.
 - ☞ Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje *Valdymo modulio prijungimas* 15 puslapyje.

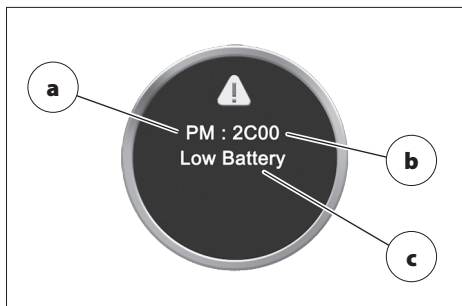

☞ Jei gedimo nepavyksta pašalinti ir elektrinio neįgaliųjų vežimėlio nebegalima naudoti, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą ir nurodykite klaidos kodą.

Klaidos kodas	Priežastis	Sprendimas
2C00	Išsikrovęs akumuliatorius	Kuo greičiau įkraukite akumuliatorių ir, jei reikia, patikrinkite akumuliatorių laidus. ☞ Elektriniu neįgaliųjų vežimėliu vis dar galima važiuoti.
3B00	Prarasta jungtis su kairiuoju varikliu	Patikrinkite variklio laidą, variklio jungties kištuką ir variklį.
3D00	Kairiojo variklio elektros laidas pažeistas (trumpasis jungimas)	Patikrinkite variklio laidą, variklio jungties kištuką ir variklį.
3C00	Prarasta jungtis su dešiniuoju varikliu	Patikrinkite variklio laidą, variklio jungties kištuką ir variklį.
3E00	Dešiniojo variklio elektros laidas pažeistas (trumpasis jungimas)	Patikrinkite variklio laidą, variklio jungties kištuką ir variklį.
1E01	Įjungtas automatinis išjungimas.	Ištraukite įkroviklį iš įkrovimo lizdo.

Klaidos kodas	Priežastis	Sprendimas
2F00	Sistemos klaida arba vairasvirtės gedimas	Prijungdami įrenginį ar priedą nelieskite vairasvirtės.
0E00, 0E02, 1200, 1202	Vairasvirtės gedimas	Pakeiskite valdymo modulį. Remontuokite jį įgaliotajame techninės priežiūros centre.
7A0C, 7A0E, 7A90	Pavaros / reguliavimo pavaros srovės ribojimas. – Mechanškai įtempta pavana / reguliavimo pavana – Mechaninė perkrova	Jei atliekami keli reguliavimai, patikrinkite, kurios pavaros veikia netinkamai, ir patikrinkite kabelio jungtį.
1505	Kairiojo variklio magnetinio stabdžio gedimas	Perkelkite važiavimo / stūmimo režimo svirtį į padėtį „Drive“ (važiuoti).
1506	Dešiniojo variklio magnetinio stabdžio gedimas	Perkelkite važiavimo / stūmimo režimo svirtį į padėtį „Drive“ (važiuoti).
1600	Akumuliatoriaus įtampa per didelė (važiuojant nuo kalno).	Visada labai lėtai važiuokite nuo kalno ir, jei reikia, patikrinkite akumuliatoriaus laidus.
9710/7B02	Giroskopas gali būti sugedęs.	Patikrinkite valdymo modulį.  Elektriniu neįgaliųjų vežimėliu vis dar galima važiuoti gerokai sumažintu greičiu.
Nenurodyti klaidų kodai	Įvairios priežastys	Išjunkite ir iš naujo paleiskite elektrinį neįgaliųjų vežimėlį.

Informacija	Priežastis	Sprendimas
	Užraktas įjungtas.	<p>Išjunkite užraktą.</p> <p>☞ Žr. skyrių <i>Užraktas</i> 16 puslapyje.</p>
	Per anksti pajudinta vairasvirtė	<p>Atleiskite vairasvirtę.</p> <p>Vairasvirtės gedimas</p>
 Geltonas simbolis	Įjungtas automatinis greičio mažinimas.	<p>Nustatykite elektroninį reguliavimą į pagrindinę padėtį.</p> <p>☞ Su elektriniu neįgaliųjų vežimėliu galima važiuoti.</p>
 Raudonas simbolis	Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis sustojo automatiškai.	<p>Nustatykite elektroninį reguliavimą į pagrindinę padėtį arba perjunkite važiavimo / stūmimo režimo svirtį į padėtį „Drive“ (važiuoti).</p> <p>☞ Su elektriniu neįgaliųjų vežimėliu negalima važiuoti.</p>

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR (ARBA) REMONTAS

Remontas

Galite visiškai pasitikėti savo platintoju, kuris atlieka remontą. Jis buvo instrukuotas, kaip atlikti darbą, ir samdo tinkamai išmokytus darbuotojus.

Aptarnavimas

Jei turite klausimų ar reikia pagalbos, kreipkitės į platintoją, kuris jums patars ir atliks priežiūrą bei remontą.

Techninės saugos patikrinimai

Kol vežimėlis važiuoja, elektroninė sistema nuolat atlieka patikrinimus. Be šių elektroninių saugos priemonių, naudotojas taip pat turėtų atlikti įprastus patikrinimus. Jei atliekant šiuos patikrinimus nustatoma kokių nors pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis patikrintų jūsų vežimėlį.

Kasdieniai patikrinimai

Patikrinkite, ar valdymo modulis ir visi susiję elektroniniai komponentai nėra išoriškai pažeisti ir ar tinkamai pritvirtinti prie elektrinio neįgaliųjų vežimėlio.

Išjungę valdymo modulį, apžiūrėkite ir patikrinkite, ar nėra išorinių vairasvirtės ir vairasvirtės įvorės pažeidimų, taip pat patikrinkite, ar vairasvirtė sklandžiai automatiškai grįžta į vidurio linijos padėtį.

Kassavaitiniai patikrinimai

Vairasvirtės veikimas, susijęs su magnetine stabdžių sistema: prieš patikrą įsitikinkite, kad aplink vežimėlį yra bent 1 metras laisvos erdvės.

Įjunkite valdymo modulį ir palaukite, kol užsidegs akumulatoriaus indikatorius ir pasirodys signalas „Ready“ (paruošta). Lėtai judinkite vairasvirtę į priekį, kol stabdžių sistema sureaguos garsiniu spragtelėjimu. Neįgalioto vežimėlis palaipsniui pradės riedėti. Greitai atleiskite vairasvirtę. Vos po keelių sekundžių turėtumėte aiškiai išgirsti, kaip įsijungia stabdžiai. Tokia pati patikra turi būti atliekama važiuojant į dešinę, į kairę ir atbuline eiga.

Visi laidai ir kištukai turi būti apžiūrėti, ar nėra išorinių pažeidimų ir ar tinkamai pritvirtinti.

Kasmetiniai patikrinimai

Per kasmetinę vežimėlio techninę patikrą paprašykite platintojo patikrinti elektroninę sistemą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Termodinaminiai duomenys

Aplinkos temperatūros diapazonas	nuo -25 °C iki +50 °C
Laikymo temperatūros diapazonas	nuo -40 °C iki +65 °C
Gaubto klasė	IP54

GARANTIJA

Bet koks naudojimo vadovo nesilaikymas arba neprofesionaliai atlikti techninės priežiūros darbai, ypač susiję su techniniais pakeitimais ir papildymais (sumontuotomis dalimis) be mūsų aiškaus sutikimo, ne tik panaikina šią garantiją, bet ir mūsų bendrąją atsakomybę už gaminį.

Dėl šio gaminio, be kitų aiškiai nurodytų ar sutartų garantijų, mes taip pat prisimame teisinę atsakomybę, kuri yra mūsų bendrųjų verslo nuostatų ir sąlygų dalis. Dėl bet kokių garantinių reikalavimų kreipkitės į savo platintoją ir pateikite šį GARANTIJOS pažymėjimą kartu su privaloma informacija apie modelį, pakuotės lapo numerį, pristatymo datą ir serijos numerį (SN).

Serijos numeris (SN) nurodytas vardinėje plokštelėje.

- ☞ Papildomos garantijos sąlygos nurodytos vežimėlio naudojimo instrukcijoje.

Garantijos sertifikatas

Užpildykite! Prireikus gali būti kopijuojama ir siunčiama platintojui.

Garantija

Modelio pavadinimas:

Pakuotės lapo Nr:

SN (žr. vardinę plokštelę):

Pristatymo data:

Platintojo antspaudas:



Gamintojas:

📍 TA Service A/S
Centervej Syd 2
DK-4733 Tappernøje
Danija

✉ ta-service@ta-service.dk
T: +45 56 72 57 77
www.ta-service.dk

Platintojas

Vietos platintojus rasite
www.ta-service.dk