

lt

Valdymo modulis
Modelis R-Net CJSM2

Naudojimo instrukcija



MEYRA®

Turinys

Naudojamo ženklavimo reikšmė	5
Įvadas	5
Modelių sąrašas	5
Specifikacija	5
Naudojimas	5
Pritaikymas	6
Pakartotinis naudojimas	6
Naudojimo trukmė	6
Saugos nuorodos	6
Dviejų valdymo modulių prijungimas	7
Apžvalga	8
Valdymo modulis su < skystųjų kristalų ekranu >	8
Valdymo skydelis, mygtukai	8
Valdymo skydelis, simboliai	8
Skystųjų kristalų ekranas	9
Valdiklis, skirtas lydinčiam asmeniui	10
Valdymo skydelis, mygtukai	10
Šviesos diodų indikatorius	10
Mygtukai ir simboliai	11
Valdiklis, skirtas lydinčiam asmeniui	12
Skystųjų kristalų ekranas	13
Parengimas naudoti	15
Akumuliatorių įkrovimas	15
Valdymo modulių įjungimas	15
Imobilizatorius	16
Imobilizatoriaus įjungimas	16
Imobilizatoriaus išjungimas	17
Automatinio išjungimo laikas	18

Patikrinimas prieš pradedant važiuoti	19
Akumulatoriaus indikatorius	19
Vertinimas	19
Iš anksto parenkamas didžiausias greitis	20
Valdiklis, skirtas lydinčiajam asmeniui	21
Greičio pakopos	22
Režimo meniu	23
Važiavimo režimas	23
Nustatymo režimas	23
Vairasvirtė	24
Važiavimo ir vairavimo judesys	24
Elektrinio neįgaliojo vežimėlio stabdymas	24
Valdiklis, skirtas lydinčiajam asmeniui	25
Valdiklio parinktis	25
Elektriniai reguliatoriai	26
Elektrinės reguliavimo funkcijos parinktis	26
Elektriniai standartiniai reguliatoriai	26
Sudėtiniai elektriniai reguliatoriai	27
Individualios funkcijos / nustatymai	29
Bendras kilometrų skaitiklis	29
Dienos kilometrų skaitiklis	29
Dienos kilometrų skaitiklio rodmenų ištrynimas	29
Važiavimo programa	30
Nustatymo meniu	31
Nustatymo meniu atvėrimas	32
Menu valdymas	32
Važiavimo stabilumo jutiklis (ESP)	33
Važiavimo stabilumo jutiklio aktyvinimas / išaktyvinimas	33
Išorinės prijungimo parinktys	34
Išorinio mygtuko prijungimas	34
Išorinio mygtuko ištraukimas	34
IR sąsaja	35
IR sąsajos nuskaitymas	35
„Bluetooth“	36
„Bluetooth“ įrenginių peržiūrėjimas	36

Trikčių diagnostika	37
Profilaktinė priežiūra	40
Remontas	40
Priežiūra	40
Saugos kontrolės	40
Kasdienė kontrolė	40
Kontrolė kas savaitę	40
Kontrolė kasmet	40
Techniniai duomenys	41
Klimatiniai duomenys	41
Atsakomybė už trūkumus / garantija	41
Atsakomybės už trūkumus / garantijos skirsnis	42
Užrašams	43

NAUDOJAMO ŽENKLINIMO REIKŠMĖ

Privaloma laikytis tam tikra spalva pažymėtų saugos nuorodų!

-  Šiuo simboliu žymimos nuorodos ir rekomendacijos
- [] Nuoroda į paveikslėlio numerį
- () Nuoroda į paveikslėlyje pavaizduotus funkcinis elementus.

ĮVADAS

Prieš pradėdami eksploatuoti pirmą kartą perskaitykite šį dokumentą. Vaikai ir jaunuoliai prieš važiuodami vežimėliu pirmą kartą šį dokumentą turėtų perskaityti kartu su tėvais arba prižiūrimi prižiūrėtojo ar lydinčiojo personalo.

Elektrinis neįgaliojo vežimėlis valdomas valdymo moduliu.

-  Priedai ir parinktys, pvz., išoriniai spaudžiamieji mygtukai, standartiniam tiekimo rinkiniui nepriklauso!

Netinkamai naudodami valdymo modulį arba jo priedus keliate pavojų sau ir kitiems. Todėl būtina išmokti jį tinkamai naudoti.

Pateikta naudojimo instrukcija padės Jums susipažinti su elektrinio valdymo modulio naudojimu ir išvengti nelaimingų atsitikimų.

Regėjimo negalią turintys asmenys šiuos PDF formatu pateikiamus failus su papildoma informacija apie mūsų gaminius ras mūsų interneto svetainėje.

-  Jei reikės, kreipkitės į platintoją.

Informaciją apie gaminio saugą ir galimas mūsų gaminių atšaukimo akcijas rasite savo elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimo instrukcijoje.

MODELIŲ SĄRAŠAS

Ši naudojimo instrukcija skirta toliau nurodytiems valdymo moduliams:

Modulis CJSM2

SPECIFIKACIJA

Valdymo modulis sukurtas elektriniams neįgaliojo vežimėliams su „R-Net“ elektronika.

NAUDOJIMAS

Valdymo modulį galima jungti tik prie atitinkamo elektrinio neįgaliojo vežimėlio su „R-Net“ elektronika.

PRITAIKYMAS

Prieš pradėdami eksploatuoti pirmą kartą perskaitykite šį dokumentą. Vaikai ir jaunuoliai prieš važiuodami vežimėliu pirmą kartą šį dokumentą turėtų perskaityti kartu su tėvais arba prižiūrimi prižiūrėtojo ar lydinčiojo personalo.

Pritaikymo arba nustatymo darbus leidžiama atlikti tik platintojui.

Prieš naudojant pirmą kartą valdymo modulį turėtų pritaikyti jūsų platintojas.

Tai atliekant atsižvelgiama į naudotojo mokėjimą važiuoti, specialius naudotojo reikalavimus ir pagrindinę elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimo vietą.

Vairasvirtės jautrumą platintojas nustato keisdamas nuostatas pagal reikalavimus.

-  Mes rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar valdymo modulis tinkamai pritaikytas, kad būtų galima vežimėlį naudoti ilgą laiką ir optimaliai net ir pasikeitus naudotojo ligos / neįgalumo aplinkybėms.

PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS

Valdymo modulį galima naudoti pakartotinai. Prieš kiekvieną pakartotinį naudojimą reikia kruopščiai patikrinti visą valdymo modulio konstrukciją.

-  Prieš pakartotinį naudojimą reikia imtis būtinų, patvirtintame higienos plane nurodytų higienos priemonių bei dezinfekuoti.

NAUDOJIMO TRUKMĖ

Mes numatėme, kad šis gaminys turėtų būti naudojamas vidutiniškai **5 metus**, jei jis būtų naudojamas pagal paskirtį bei atliekant visus nurodytus techninės priežiūros ir apžiūros darbus. Jūsų gaminio naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo dažnumo, naudojimo aplinkos ir jo priežiūros. Naudojant atsargines dalis gaminio naudojimo trukmė gali būti ilgesnė. Atsarginių dalių dažniausia galima įsigyti dar 5 metus nuo gaminio gamybos pabaigos.

-  Nurodytos naudojimo trukmės negalima traktuoti kaip papildomos garantijos.

SAUGOS NUORODOS

-  Nuimto valdymo modulio nemeskite ir nemėtykite; elkitės su juo tinkamai. Tik tuomet šios dalys ilgai veiks tinkamai.
-  Neatjunkite prijungimo kištuko važiuodami.
-  Važiuodami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką naudokite tik avariniu atveju.
 - Tuomet elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimas nutraukiamas (avarinis stabdymas).
-  Prie prijungimo lizdų nejunkite jokių kitų daiktų, išskyrus prijungimo kištuką.
 - Gali įvykti trumpasis jungimas!

DVIEJŲ VALDYMO MODULIŲ PRIJUNGIMAS

Prijungti gali tik platintojas.

Prie „R-Net“ skystųjų kristalų sistemos galima prijungti du valdymo modulius.

Ši galimybė gali praversti, jei lydintysis asmuo nori valdyti elektrinį neįgaliojo vežimėlį, tačiau valdymo modulio negalima permontuoti iš priekio į galą.

Antrąjį valdymo modulį galima naudoti, pvz., vietoje išorinės vairasvirtės arba išorinio įjungimo / išjungimo mygtuko. Tuomet galima naudotis papildomomis funkcijomis, pvz., posūkio rodiklio, įspėjamojo signalo ir t. t.


Važiavimo funkcijos valdomos tuo valdymo moduliu, kuriuo buvo įjungta.

Antruoju moduliu lygiagrečiai valdomi rodmėnys. Šiuo valdymo moduliu galima papildomai išjungti sistemą.

APŽVALGA


Valdymo modulis su < skystųjų kristalų ekranu >

- (1) Vairasvirtė
- (2) Akumuliatoriaus įkrovimo lizdas
- (3) Išorinio mygtuko (11) < Režimas > arba išorinės reguliavimo klaviatūros prijungimo lizdas
- (4) Išorinio mygtuko (9) < Įjungti / išjungti > prijungimo lizdas

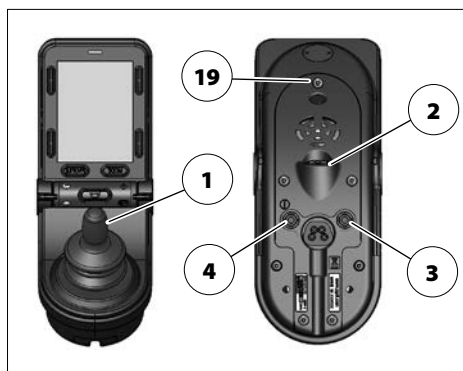

Valdymo skydelis, mygtukai

- (5) Signalas
- (6) Įjungimo / išjungimo ir profilių / režimo jungiklis be fiksuojamosios padėties
- (7) Funkcija (režimas)
- (8) Įjungti / išjungti kairįjį posūkio rodiklį
- (9) Įjungti / išjungti įspėjamąją avarinę šviesą
- (10) Įjungti / išjungti apšvietimą
- (11) Įjungti / išjungti dešinįjį posūkio rodiklį
- (12) Važiavimo profiliai
- (13) Išankstinės greičio parinktys jungiklis be fiksuojamosios padėties

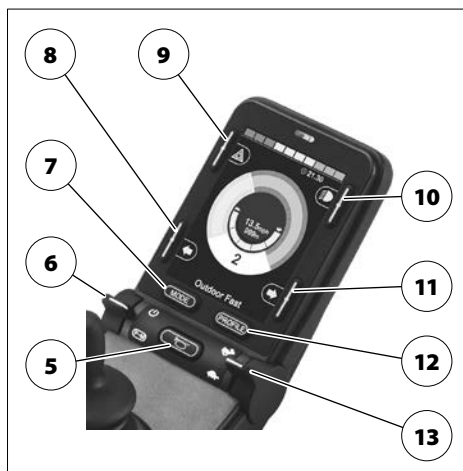

Valdymo skydelis, simboliai

- (14) Profiliai / režimas
- (15) Valdymo modulis ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
- (16) LCD diagnostika, IR imtuvai
- (17) Padidinti iš anksto nustatytą greitį
- (18) Sumažinti iš anksto nustatytą greitį





Skystųjų kristalų ekranas

☞ Šviesos diodų indikatoriai šviečia aktyvinus.

- (19) Posūkio rodiklio kairėje indikatorius
- (20) Įspėjamosios avarinės šviesos indikatorius
- (21) Akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius
- (22) Apšvietimo indikatorius
- (23) Posūkio rodiklio dešinėje indikatorius
- (24) Profilio rodmuo
- (25) Iš anksto parinktas greitis
- (26) Dabartinio važiavimo greičio arba elektronikos vartojamosios galios grafinis rodmuo.


☞ Didėjant važiavimo greičiui arba vartojamajai galiai, rodyklė lanke juda greičiau.

- (27) Simbolis, rodantis ryšį per „Bluetooth“.
- (28) Laiko rodmuo
- (29) Rodomas dabartinis važiavimo greitis, per dieną nuvažiuoti kilometrai arba bendras nuvažiuotų kilometrų skaičius.
- (30) Informacinės eilutės rodmuo

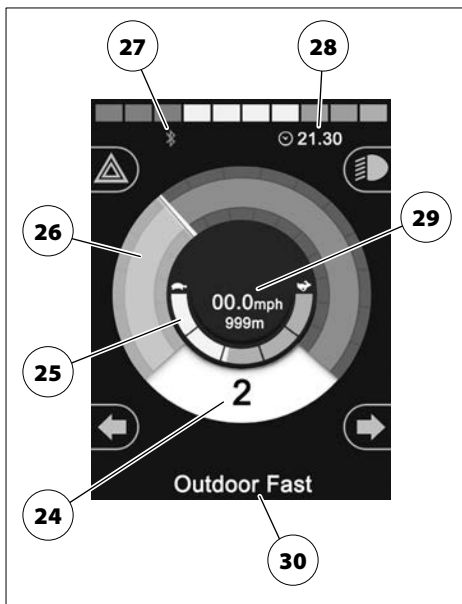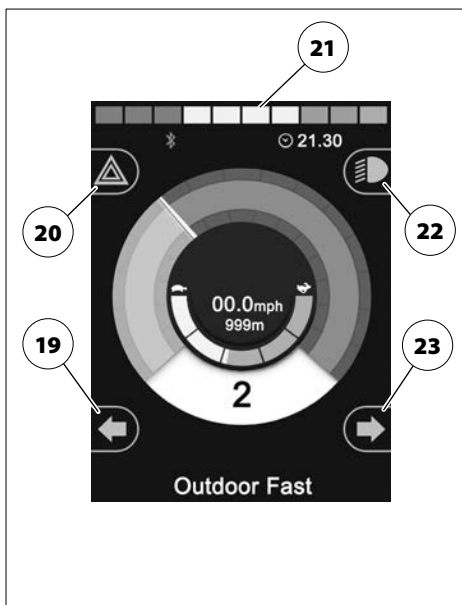

Valdiklis, skirtas lydinčiam asmeniui

- (1) Vairasvirtė
- (2) Atraminė plokštelė

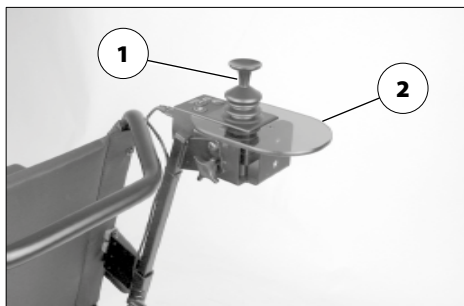


Valdymo skydelis, mygtukai




- (3) Iš anksto parenkamas maks. didžiausias greitis
- (4) Režimo mygtukas
- (5) Valdymo režimas (naudotojas / lydintysis asmuo)

Šviesos diodų indikatorius



- (6) Valdymo režimas (naudotojas)
- (7) Valdymo režimas (lydintysis asmuo)
- (8) Iš anksto parinkta maks. didžiausiojo greičio pakopa

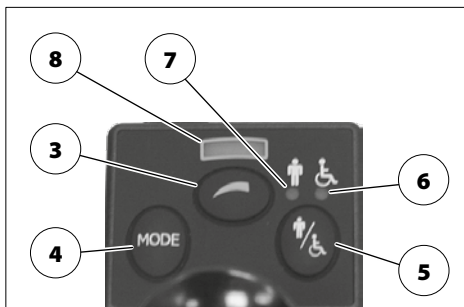

MYGTUKAI IR SIMBOLIAI

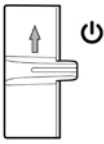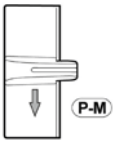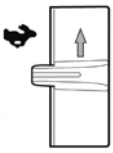	Ijungti / išjungti	Ijungia ir išjungia valdymo modulį galinėje padėtyje < <i>priekyje</i> >.
	 Ijungus elektronika atlieka sistemos patikrą.	
	 Jungiklis be fiksuojamosios padėties automatiškai vėl persijungia į neutraliąją padėtį.	
	Profilis / režimas	Svirtimi atliekant judesį < <i>atgal</i> > kiekvieną kartą peržiūrimi galimi naudoti važiavimo profiliai ir galimi nustatyti režimai.
	 Mygtuką < <i>Profilis / režimas</i> > spauskite tik elektriniam neįgaliojo vežimėliui stovint vietoje.	
	 Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. <i>Važiavimo programa</i> , 30 psl. ir skaitykite sk. <i>Režimo meniu</i> , 23 psl..	
	Išspėjamasis signalas	Signalas veikia tol, kol spaudžiamas mygtukas.
	Režimas	Paspaudus mygtuką perjungiama nustatymo režimo funkcija.
	 Mygtuką < <i>Režimas</i> > spauskite tik elektriniam neįgaliojo vežimėliui stovint vietoje.	
	 Apie tai skaitykite skaitykite sk. <i>Režimo meniu</i> , 23 psl..	
	Profilis	Paspaudus mygtuką perjungiamas kitas važiavimo profilis.
	 Apie tai skaitykite skaitykite sk. <i>Važiavimo programa</i> , 30 psl..	
	Maks. greičio išankstinė parinktis < <i>Pliusas</i> >.	Paspaudus mygtuką < <i>pirmyn</i> >, iš anksto parinktas maks. greitis padidinamas viena pakopa (20 %).
	 Dėl saugumo rekomenduojame < <i>pliuso mygtuką</i> > spausti tik tuomet, kai elektrinis neįgaliojo vežimėlis stovi vietoje.	
	 Nuo 1 pakopos (20 %) iki maks. 5 pakopos (100 %).	
	 Jungiklis be fiksuojamosios padėties automatiškai vėl persijungia į neutraliąją padėtį.	

MYGTUKAI IR SIMBOLIAI

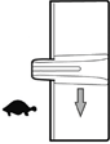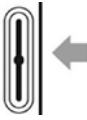	Maks. greičio išankstinė parinktis < Minusas >.	Paspaudus mygtuką < atgal >, iš anksto parinktas maks. greitis sumažinamas viena pakopa (20 %).  Dėl saugumo rekomenduojame < minuso mygtuką > spausti tik tuomet, kai elektrinis neįgaliojo vežimėlis stovi vietoje.
	 Nuo 5 pakopos (100 %) iki min. 1 pakopos (20 %).	
	 Jungiklis be fiksuojamosios padėties automatiškai vėl persijungia į neutraliąją padėtį.	
	Įspėjamoji avarinė šviesa	Paspaudus mygtuką įjungia arba išjungia įspėjamąją avarinę šviesą.
	 Simbolis mirksi tokiu pat taktu, kaip posūkio rodiklis.	
	Apšvietimas	Paspaudus mygtuką įjungia arba išjungia apšvietimą.
	 Įjungus apšvietimą šviečia ir simbolis.	
	Posūkio rodiklis kairėje	Paspaudus mygtuką įjungia arba išjungia posūkio rodiklį.
	 Greitai mirksintis simbolis rodo, kad sugedo posūkio rodiklis.	
	Posūkio rodiklis dešinėje	Paspaudus mygtuką įjungia arba išjungia posūkio rodiklį.
	 Greitai mirksintis simbolis rodo, kad sugedo posūkio rodiklis.	

Valdiklis, skirtas lydinčiajam asmeniui

	Išankstinė greičio parinktis	Paspaudus mygtuką, iš anksto parinktas maks. greitis padidinamas viena pakopa (20 %).  Nuo 1 pakopos (20 %) iki maks. 5 pakopos (100 %).
	Maksimalaus galutinio greičio indikatorius	Įsižiebiančių diodų (šviesos diodų) skaičius rodo iš anksto parinktą maksimalų galutinį greitį.  Kiekvienas šviesos diodas atitinka 20 % pakopą.
	Valdymo būdas	Paspaudus mygtuką perjungiamas naudotojo arba lydinčiajam asmeniui skirtas valdiklis.

Valdiklis, skirtas lydinčiajam asmeniui

	Nustatyto valdymo būdo indikatorius	Po simboliu šviečiantis diodas (šviesos diodas) rodo nustatytą valdymo būdą.
	Režimas	Valdant klaviatūrą perjungiamo važiavimo režimo arba nustatymo režimo funkcija.
	 Mygtuką < Režimas > spauskite tik elektriniam neįgaliojo vežimėliui stovint vietoje.	
	 Apie tai skaitykite skaitykite sk. <i>Režimo meniu</i> , 23 psl..	

Skystųjų kristalų ekranas

	Skystųjų kristalų ekranas	Ijungus skystųjų kristalų ekrane rodomi įvairūs rodmenys.
	Informacinė eilutė	Šioje eilutėje pateikiama įvairi informacija, pvz., ESP jutiklio aktyvumo būsena, aktyvios važiavimo programos pavadinimas, aktyvaus elektrinio reguliatoriaus pavadinimas.
	Greičio indikatorius	Didėjant važiavimo greičiui arba vartojamajai galiai, rodyklė lanke juda greičiau.
	Maksimalaus galutinio greičio indikatorius	Įsižiebiančių segmentų skaičius rodo iš anksto parinktą maksimalų galutinį greitį.  Kiekvienas segmentas atitinka 20 % pakopą.
	Akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius	Mažėjant akumuliatoriaus įkrovai atitinkamai sumažėja akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatoriuje šviečiančių segmentų skaičius.
	 Apie tai skaitykite skaitykite sk. <i>Akumuliatoriaus indikatorius</i> , 19 psl..	

Skystųjų kristalų ekranas

	Elektrinis reguliatorius	Įsižiebus atitinkamam plotui simboliu parodomas pasirinktas elektrinis reguliatorius.
	 Simbolis rodomas perjungus nustatymo režimo funkciją.	
	 Apie tai skaitykite skaitykite sk. <i>Elektriniai reguliatoriai</i> , 26 psl..	
	Imobilizatorius	Elektrinis neįgaliojo vežimėlis yra apsaugotas, kad juo nepasinaudotų pašaliniai.
	 Apie tai skaitykite skaitykite sk. <i>Imobilizatorius</i> , 16 psl..	
	Rimties būseną	Simbolis įsijungia prieš tai, kai elektrinis neįgaliojo vežimėlis persijungia į automatinę rimties padėtį.
	Trikties indikatorius	Pateikiama informacija apie įvairias triktis.
	 Apie tai skaitykite skaitykite sk. <i>Trikčių diagnostika</i> , 37 psl..	
	„Bluetooth“	Simbolis (mėlynas) rodomas aktyvius „Bluetooth“ funkciją.
	Sumažintas greitis	Simbolis rodo greičio sumažinimą (geltona) ir tolesnio važiavimo blokavimą (raudona), pvz., reguliuojant sėdynės aukštį.

PARENGIMAS NAUDOTI

Akumuliatorių įkrovimas

Į akumuliatoriaus įkrovimo lizdą neįkiškite jokių kitų daiktų, išskyrus apsauginį kištuką ir akumuliatoriaus įkroviklio kištuką.

– Gali įvykti trumpasis jungimas!

Norėdami įkrauti akumuliatorius, pirmiausia išjunkite valdymo modulį, tada įkiškite akumuliatoriaus įkroviklio kištuką į valdymo modulio įkrovimo lizdą (2).

☞ Taip pat žr. < Elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimo instrukcija >.

Valdymo modulio įjungimas

Per maždaug vieną sekundę vykstantį įjungimo etapą neperjunkite vairasvirtės.

Norėdami įjungti valdymo modulį, stumkite jungiklį be fiksuojamąsios padėties (6) į priekį iki padėties *Įjungti* / *išjungti* (15). Dabar elektronika atlieka sistemos patikrą.

☞ Jungiklis be fiksuojamąsios padėties automatiškai vėl persijungia į neutraliąją padėtį.


Kai akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (17) nuolat šviečia, elektronika parengta naudoti.

☞ Jei įjungus įsižiebia 8 važiuavimo profilis, vadinasi, aktyvintas lydinčiajam asmeniui skirtas valdiklis. Paspaudus mygtuką < Profiliai > galima perjungti, kad elektrinį neįgaliojo vežimėlį valdytų jo naudotojas.

☞ Jei skystųjų kristalų ekrane pasirodo pranešimai, vadinasi, įvyko triktis.

☞ Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. *Trikčių diagnostika*, 37 psl..

Baigę važiuoti pastumkite jungiklį be fiksuojamąsios padėties (6) į priekį, į padėtį *Įjungti* / *išjungti* (15). Tuomet elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimas nutraukiamas.

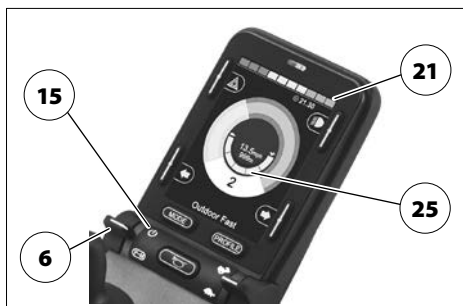

Imobilizatorius


Imobilizatorius išjungtas, kai skystųjų kristalų ekrane rodomas spynos simbolis [1].

Kad elektriniu neįgaliojo vežimėliu nepasinaudotų pašaliniai, jį galima užblokuoti imobilizatoriumi.

Imobilizatoriaus įjungimas

Funkcijų valdymas mygtukais

1. Įjungę valdymo modulį stumkite jungiklį be fiksuojamosios padėties (6) į priekį, į padėtį *Įjungti / Išjungti* (15) ir joje laikykite, kol pasigirs trumpas signalas.
 2. Pakreipkite vairasvirtę iki galo į priekį (pirmyn) ir palaukite, kol pasigirs trumpas garsinis signalas < pyp >.
 3. Pakreipkite vairasvirtę iki galo į galą (atgal) ir palaukite, kol pasigirs trumpas garsinis signalas < pyp >.
 4. Grąžinkite vairasvirtę į nulinę padėtį.
- ☞ Po ilgo garsinio signalo < pyyyyyp > imobilizatorius yra įjungtas.
 - ☞ Dabar elektrinis neįgaliojo vežimėlis yra apsaugotas, kad juo nepasinaudotų pašaliniai.

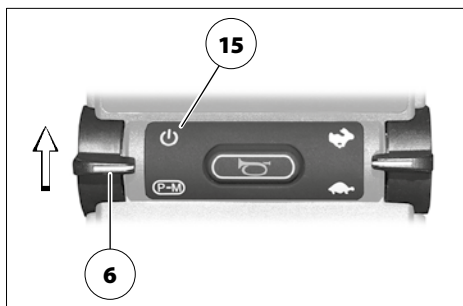

Funkcija su apsauginiu kištuku

Ijungę valdymo modulį įkiškite apsauginį kištuką [1] į akumuliatoriaus įkrovimo lizdą (2). Po trumpo garsinio signalo < pyp > vėl ištraukite apsauginį kištuką.

🔊 Elektronika užblokuoja eigos pavarą ir automatiškai išsijungia.

Imobilizatoriaus išjungimas

Funkcijų valdymas mygtukais


1. Norėdami įjungti valdymo modulį, stumkite jungiklį be fiksuojamosios padėties (6) į priekį iki padėties *Įjungti* / *išjungti* (15).
2. Pakreipkite vairasvirtę iki galo į priekį (pirmyn) ir palaukite, kol pasigirs trumpas garsinis signalas < pyp >.
3. Pakreipkite vairasvirtę iki galo į galą (atgal) ir palaukite, kol pasigirs garsinis signalas < pyp >.
4. Grąžinkite vairasvirtę į nulinę padėtį.

🔊 Po ilgo garsinio signalo < pyyyyyyp > imobilizatorius yra išjungtas.

Funkcija su apsauginiu kištuku

Ijungę valdymo modulį įkiškite apsauginį kištuką [1] į akumuliatoriaus įkrovimo lizdą (2). Po trumpo garsinio signalo < pyp > vėl ištraukite apsauginį kištuką.

🔊 Imobilizatorius išjungtas.

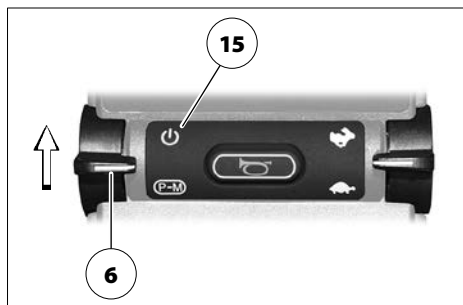

Automatinio išjungimo laikas

Elektriniame neįgaliojo vežimėlyje yra automatinio išjungimo laiko funkcija, tausoianti akumuliatoriaus srovę.

Jei per nustatytą išjungimo laiką neatliekami jokie vairasvirtės valdymo veiksmai ir nepaspaudžiamas nė vienas valdymo modulio mygtukas, elektrinis neįgaliojo vežimėlis automatiškai išsijungia.

- ☞ Standartiškai nustatytas automatinis išjungimas po 10 minučių.
- ☞ Specializuotose dirbtuvėse per priežiūros programą galima nustatyti išjungimo laiką nuo 1 iki 30 minučių arba visiškai išjungti funkciją.


PATIKRINIMAS PRIEŠ PRA- DEDANT VAŽIUOTI

Akumuliatoriaus indikatorius

Ijungus valdymo modulį ir pasibaigus sistemos patikrai akumuliatoriaus indikatorius (22) rodo akumuliatoriaus įkrovos būseną.

Mažėjant akumuliatoriaus įkrovai, šviečia mažiau akumuliatoriaus indikatorius šviečiančių segmentų (21).

- Akumuliatoriaus indikatoryje yra 10 segmentų – 3 raudoni, 4 geltoni / oranžiniai ir 3 žali segmentai.

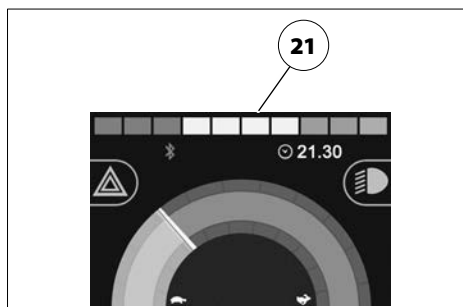

Segmentų spalvų diapazonų reikšmės:

Žalia	Akumuliatoriai įkraunami
	■ Įkrovimo būklę rodo žalių indikatorių skaičius.
Geltona	Rekomenduojama įkrauti papildomai
Raudona	Akumuliatoriai išseko, nedelsdami įkraukite

- Akumuliatoriaus indikatorius tiksliai įkrovą rodo važiuojant lygiu keliu.
- Važiuojant įkalne / nuokalne indikatorius rodo neteisingus duomenis.

Vertinimas

Akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius suderintas su mūsų tiekiamų akumuliatorių išsikrovimo charakteristikomis. Kitų akumuliatorių tipų ar kitų gamintojų akumuliatorių charakteristikos gali būti kitokios, todėl rodomi rodmenys bus netikslūs.

Be to, tikslumas priklauso nuo akumuliatoriaus temperatūros, jo naudojimo trukmės ir apkrovos, todėl jam taikomi tam tikri apribojimai.

Iš anksto parenkamas didžiausias greitis

Nelaimingo atsitikimo pavojus:

- parinkus netinkamą iš anksto parenkamą greičio pakopą!
- mažesnio greičio pakopą perjungiant tuomet, kai važiuojama!

Greičio pakopa parenkama pagal asmenines savybes ir atitinkamą važiavimo situaciją!

Važiuojant nuokalne arba įdubomis reikia pritaikyti greitį pagal nuokalnę. Niekada neviršykite leidžiamojo didžiausiojo greičio. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!



Įjungus valdymo modulį naudojamas prieš išjungiant iš anksto parinktas didžiausias greitis.

Įsižiebiančių *nustatomo maks. galutinio greičio indikatoriaus* (25) segmentų skaičius rodo parinktą greičio pakopą.

☞ Apie tai skaitykite ir skyriuje skaitykite sk. *Mygtukai ir simboliai*, 11 psl..

Prieš pradėdant važiuoti arba važiuojant pastūmus jungiklį be fiksuotosios padėties (13) į priekį arba atgal, iš anksto parenkamas maksimalus galutinis greitis padidinamas arba sumažinamas viena pakopa.


☞ Apie tai taip pat skaitykite skyriuje skaitykite sk. *Greičio pakopos*, 22 psl. ir skaitykite sk. *Mygtukai ir simboliai*, 11 psl..

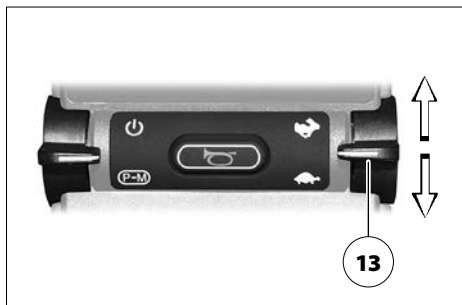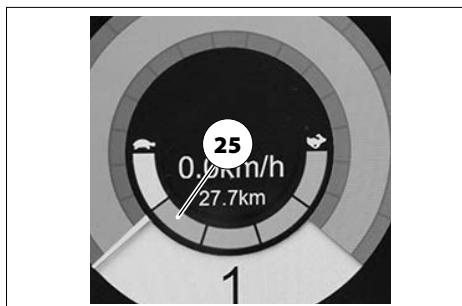

Valdiklis, skirtas lydinčiajam asmeniui

Prieš pradėdant važiuoti arba važiuojant paspaudus mygtuką (3), iš anksto parenkamas maksimalus didžiausias greitis padidinamas nuo vienos iki daugiausia 5 pakopos. Po 5 pakopos perjungiama 1 pakopa – mažiausias didžiausias greitis.

- ☞ Nustatytą greičio pakopą rodo indikatoriuje (1) įsižiebiančys diodai (šviesos diodai).
- ☞ Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. *Greičio pakopos*, 22 psl..

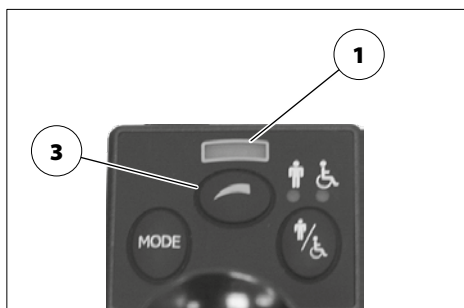

Greičio pakopos

Greičio pakopa parenkama pagal asmenines savybes ir atitinkamą važiavimo situaciją!

Situacijose, kuriose jaučiatės nesaugiai (pvz., važiuodami ankštoje erdvėje, nuokalne, nuo rampų, pėsčiųjų zonose ir pan.), nustatykite žemesnę greičio pakopą.

Naudojant lydinčiajam asmeniui skirtą valdiklį, didžiausias greitis nustatomas, atsižvelgiant į asmenines lydinčiojo asmens savybes ir atitinkamą važiavimo situaciją!

Naudojant lydinčiajam asmeniui skirtą valdiklį, žemesnė greičio pakopa gali būti perjungiama tik elektriniam neįgaliojo vežimėliui stovint vietoje. – Netikėtas sulėtinimas stabdant.

Galima iš anksto parinkti vieną iš 5 didžiausio greičio pakopų (25).

 Apie tai skaitykite ir skyriuje skaitykite sk. *Mygtukai ir simboliai*, 11 psl..

Nustačius 5 greičio pakopą, maks. didžiausias greitis yra 100 % maks. galimo jūsų elektrinio neįgaliojo vežimėlio greičio.

Nustačius 1 greičio pakopą, maks. didžiausias greitis yra 20 % maks. galimo jūsų elektrinio neįgaliojo vežimėlio greičio.



1. Situacijos pavyzdys:

Važiavimas gyvenamojoje patalpoje.

Būtina nuostata: mažiausias iš anksto parenkamas greitis [1].

Parinkus per didelį greitį:

Šiek tiek pakreipus vairasvirtę iš vietos pajudama greičiau. – Ankštose gyvenamosiose patalpose vairuotojas praranda kontrolę. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

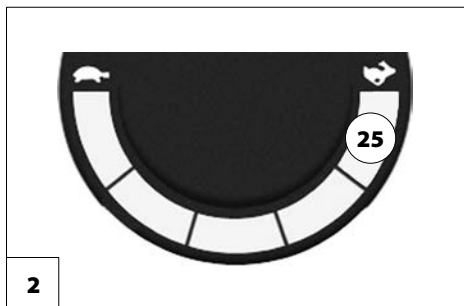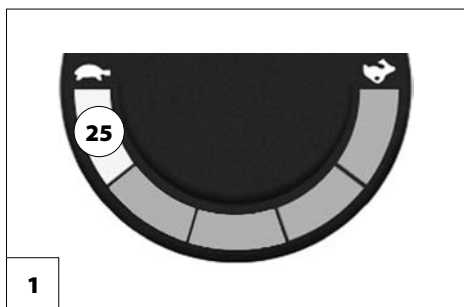

2. Situacijos pavyzdys:

Važiavimas sankryžą.

Būtina nuostata: didelis iš anksto parenkamas greitis [2].

Parinkus per mažą greitį:

nepakankamai greitai pervažiuojama per sankryžą. – Nelaimingo atsitikimo pavojus, keliamas artėjančių transporto priemonių!

REŽIMO MENIU

Mygtuką < Režimas > spauskite tik elektriniam neįgaliojo vežimėliui stovint vietoje.

Paspaudus mygtuką MODE perjungiamas važiavimo, nustatymo režimas arba kiti aktyvūs režimai, pavyzdžiui, „Bluetooth“ arba IR [1].

Važiavimo režimas

Važiavimo režime elektrinis neįgaliojo vežimėlis valdomas vairasvirte.



☞ Tai aprašyta skyriuje skaitykite sk. *Vairasvirtė*, 24 psl..

Nustatymo režimas

Aktyvinus nustatymo režimą, sėdynės simbolyje [2] rodomas paskutinis parinktas elektrinis reguliatorius.

Elektriniai reguliatoriai parenkami ir reguliuojami vairasvirte.

☞ Tai aprašyta skyriuje skaitykite sk. *Elektriniai reguliatoriai*, 26 psl..

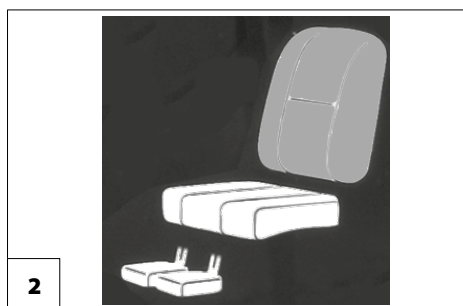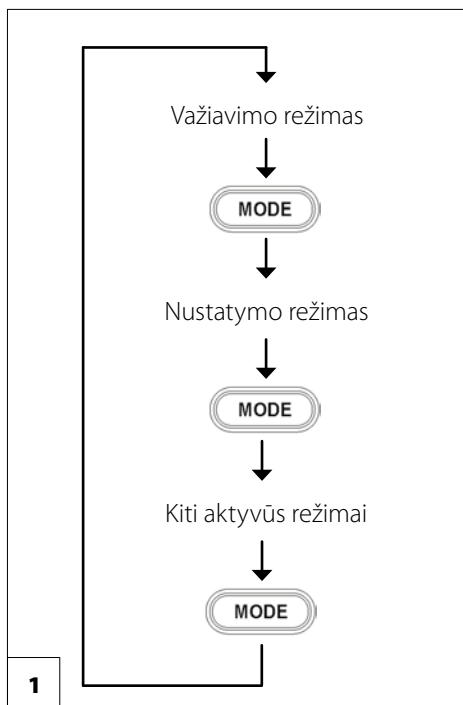

VAIRASVIRTĖ

Vairasvirtę valdykite tik tuomet, kai nuolat šviečia akumuliatoriaus indikatorius (2).

Važiavimo ir vairavimo judesys

Elektrinis neįgaliojo vežimėlis greitinamas arba stabdomas vairasvorte (1). Vairasvirtę lėtai kreipkite norima važiavimo kryptimi.

Kuo labiau iš vidurinės padėties pakreipiama vairasvirtė, tuo greičiau važiuoja elektrinis neįgaliojo vežimėlis (iki nustatyto didžiausio greičio).



Kartu kreipiant vairasvirtę į šoną, vežimėlis pasukamas. Jei vairasvirtė pakreipiama tik į šoną, elektrinis neįgaliojo vežimėlis beveik sukasi vietoje.

❏ Važiuojant atgal arba posūkiu, greitis automatiškai sumažinamas.

Elektrinio neįgaliojo vežimėlio stabdymas

Atleidus vairasvirtę elektrinis neįgaliojo vežimėlis sustoja.

Jei norite valdomai stabdyti, lėtai grąžinkite vairasvirtę į vidurinę padėtį (nulinę padėtį).

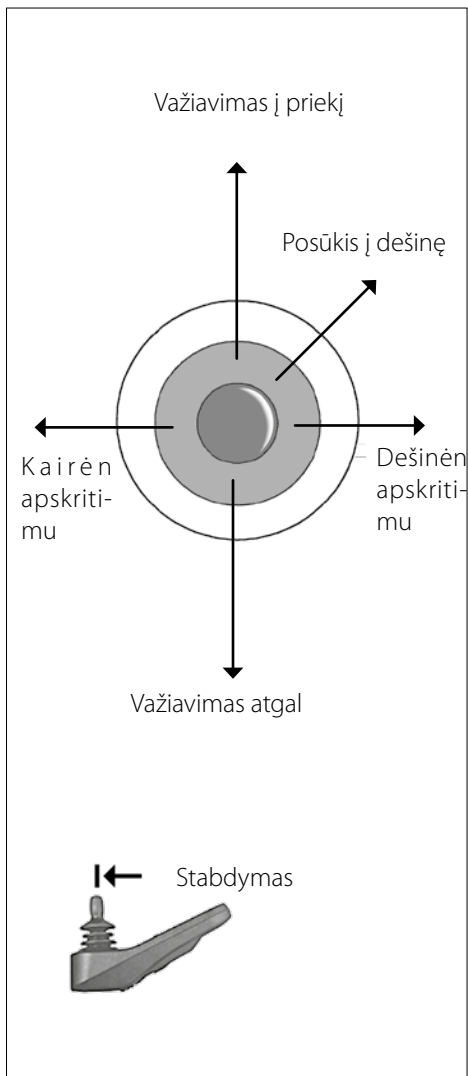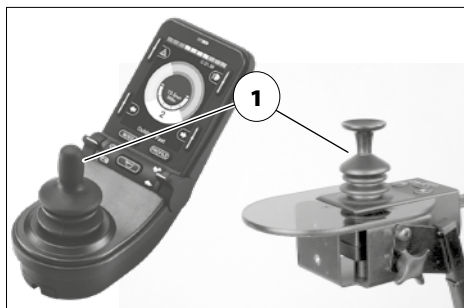

VALDIKLIS, SKIRTAS LYDINČIAJAM ASMENIUI

Nesiremkite į lydinčiojo asmens valdiklį.

- ☞ Atraminė plokštelė skirta naudoti tik valdant.

Valdiklį, skirtą lydinčiajam asmeniui, galima naudoti tik turint valdymo modulį CJSM2.



- ☞ Apie tai skaitykite ir skyriuje skaitykite sk. *Apžvalga*, 8 psl..

Valdiklio parinktis

Stumiant jungiklį be fiksuotosios padėties (6) į priekį iki padėties *Ijungti / išjungti* (15), valdymo modulyje CJSM2 aktyvus paskutinį kartą parinktas valdiklis.

Paspaudus mygtuką (32) perjungiamas naudotojo arba lydinčiajam asmeniui skirtas valdiklis.

- ☞ Simbolis virš įsižiebusio diodo (šviesos diodo) (31) rodo šiuo metu aktyvų valdiklį.

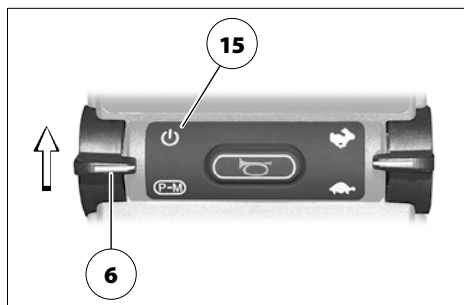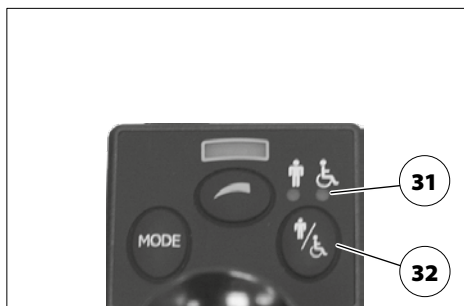

ELEKTRINIAI REGULATORIAI

Parenkamas elektrinis reguliatorius priklauso nuo atitinkamos elektrinio neįgaliojo vežimėlio įrangos.

Kol aktyvus nustatymo režimas, šviečia parinktas elektrinis reguliatorius.

Elektrinės reguliavimo funkcijos parinktis

☞ Elektriniai reguliatoriai veikia nesibai giančiu ciklu.

Vairasvirtė dešinėn – perjungia aukšty n kitą reguliatorių.

Vairasvirtė kairėn – perjungia žemyn kitą re guliatorių.

Elektriniai standartiniai reguliatoriai

Elektriniai reguliatoriai reguliuojami taip:

Vairasvirtė pirmyn – reguliavimas pagrindi nės padėties kryptimi.

Vairasvirtė atgal – reguliavimas iš pagrindi nės padėties.

Atleidus vairasvirtę reguliavimo procesas nutraukiamas.

Rodmenys skystųjų kristalų ekrane

☞ Tekste po sėdynės simboliu gali būti pateikiami paaškinimai apie atitinkamą elektrinį reguliatorių.

☞ Jei šalia sėdynės simbolio rodomas oranžinis vėžlys, vadinasi, aktyvintas greičio ribotuvas.

☞ Tai aprašyta ir skyriuje skaitykite sk. *Trikčių diagnostika*, 37 psl..

☞ Jei šalia neįgaliojo vežimėlio simbolio mirksi raudonas vėžlio simbolis, vadi nasi, dėl saugumo elektrinis neįgaliojo vežimėlis buvo sustabdytas. – Toliau važiuoti galima tik tuomet, kai iš naujo

nustatoma reguliatoriaus pagrindinė padėtis.

☞ Tai aprašyta ir skyriuje skaitykite sk. *Trikčių diagnostika*, 37 psl..

Rodomo simbolio reikšmė:



Atlošas



Sėdynės polinkis



Kojų atrama kairėje



Kojų atrama dešinėje



Abi kojų atramos
Centrinė kojų atrama



Nuleidžiamoji pėdų plokš telė



Sėdėjimo aukštis



Pagalbinė atsistojimo prie monė

Sudėtiniai elektriniai reguliatoriai

☞ Jei norima parinkti išsaugota funkcijoje < *Atmintis* >, šviečia visi reguliatoriai.

Jei atlošo, sėdynės polinkio, gulėjimo, stovėjimo ar kojų meniu išsaugotos pagrindinės arba galinės padėties, rodomos rodyklės.

- ☞ Vertikali rodyklė rodo išsaugotą pagrindinę padėtį.
- ☞ Įstriža rodyklė rodo išsaugotą galutinę padėtį.

Elektriniai reguliatoriai (išskyrus *Stovėti* ir *Pagalbinę atsistojimo priemonę*) reguliuojami taip:

Vairasvirtė pirmyn – reguliavimas pagrindinės padėties kryptimi.

Vairasvirtė atgal – reguliavimas iš pagrindinės padėties.

Elektriniai reguliatoriai (tik *Stovėti* ir *Pagalbinę atsistojimo priemonę*) reguliuojami taip:

Vairasvirtė pirmyn – reguliavimas iš pagrindinės padėties.

Vairasvirtė atgal – reguliavimas pagrindinės padėties kryptimi.

Atleidus vairasvirtę reguliavimo procesas nutraukiamas.

Rodmenys skystųjų kristalų ekrane

☞ Tekste po simboliu gali būti pateikiami paaiškinimai apie atitinkamą elektrinį reguliatorių.

Rodomo simbolio reikšmė:



Atlošas



Sėdynės polinkis



Gulėti



Stovėti



Kojų atrama kairėje



Kojų atrama dešinėje



Kojos



Nuleidžiamoji pėdų plokštelė



Sėdėjimo aukštis



Pagalbinė atsistojimo priemonė



Atmintis (neišsaugota)

Rodomo simbolio reikšmė:



Atmintis (išsaugota)



Pagalbinė išlipimo priemonė

INDIVIDUALIOS FUNKCIJOS / NUSTATYMAI

- Jūsų asmeniniame elektriniame neįgaliojo vežimėlyje gali būti ne visos čia aprašytos funkcijos.

Bendras kilometrų skaitiklis

Skystųjų kristalų ekrane rodomas *bendras kilometrų skaičius* (29) iki maks. 99999 km.

- Rodomi tik važiuojant pirmyn nuvažiuoti kilometrai.

Dienos kilometrų skaitiklis

Skystųjų kristalų ekrane gali būti rodomi *per dieną nuvažiuoti kilometrai* (29) iki maks. 9999,9 km.

- Rodomi tik važiuojant pirmyn nuvažiuoti kilometrai.


Kilometrų skaitiklio rodmuo nustatomas nustatymo meniu < *Atstumas* >.

- Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Nustatymo meniu*, 31 psl.!
- Jei reikia, dienos kilometrų skaitiklyje galima nustatyti nulį.

Dienos kilometrų skaitiklio rodmenų ištrynimasis

Dienos kilometrų skaitiklio duomenis galima ištrinti nustatymo meniu < *Atstumas* >.

- Skystųjų kristalų ekrane rodomas dienos kilometrų rodmuo < 0,0 km >.

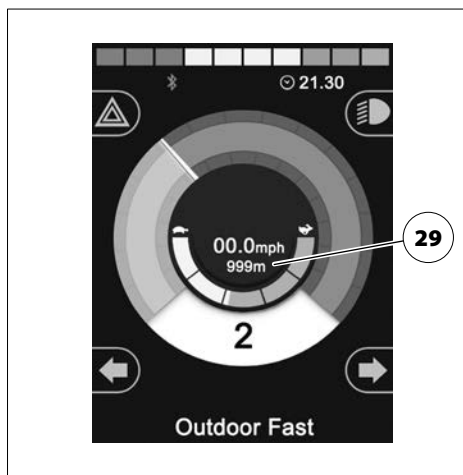

Važiavimo programa

Paspaudus mygtuką < Profilis > (12) galima parinkti iki aštuonių važiavimo programų.

Dėl skirtingų važiavimo programų charakteristikų elektrinio neįgaliojo vežimėlio važiavimo savybės bet kada galima pritaikyti atitinkamai paskirčiai.

Pavyzdžiui, specialiems valdikliams galima atverti atskiras programas.

🔊 Dabartinė važiavimo programa (24) rodoma skystųjų kristalų ekrane.

Važiavimo programa	Charakteristika	ESP jutiklis aktyvus
1	Universali, skirta važiuoti viduje ir lauke	taip
2	Universali, skirta važiuoti viduje ir lauke	taip
3	Naudojant elektrinį neįgaliojo vežimėlį transporto priemonėje ir įrengus ESP jutiklį	ne
4 -7	Rezervuota specialiems kliento nustatymams.	
8	Valdiklis, skirtas lydinčiam asmeniui	ne

Gamykloje parinktos šios važiavimo programos charakteristikos nurodytos < priežiūros instrukcijoje >.

🔊 Apie tai skaitykite savo elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimo ins-



trukcijos skyriuje < Nuorodos platintojui >.

Nustatymo meniu

- ☞ Kiekviename pomeniu yra po meniu punktą < Exit > (Išėiti), kurį paspaudus grįžtama į aukštesnio lygmens meniu.

Nustatymų meniu [1] galima atverti toliau nurodytus meniu:

- ☞ Time (Laikas)
 - Set Time (Nustatyti paros laiką)
 - Display Time (Paros laikas 12 / 24 val.)
- ☞ Distance (Atstumas)
 - Total Distance (Bendras kilometrų skaičius)
 - Trip Distance (Per dieną nuvažiuotų kilometrų skaičius)
 - Display Distance (Bendro ir per dieną nuvažiuotų kilometrų skaičiaus rodmuo)
 - Clear Trip Distance (Iš naujo nustatyti per dieną nuvažiuotų kilometrų skaičių)
- ☞ Backlight (Foninis apšvietimas)
 - Backlight (Foninis apšvietimas)
 - Auto Backlight (Automatinis foninio apšvietimo pritaikymas)
 - Backlight Timeout (Foninio apšvietimo trukmė)
- ☞ „Bluetooth“
 - ☞ Skirtas vairasvirte derinti ir valdyti prietaisu su „Bluetooth“ funkcija.
 - Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. „Bluetooth“, 36 psl..
- ☞ IR Setup (Infraraudonųjų spindulių nustatymai)
 - ☞ Įvairūs meniu, skirti vairasvirte derinti ir naudoti su IR suderinamus prietaisus. – Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. *IR sąsaja*, 35 psl..
- ☞ Programming (Programavimas)
 - Controls (Elektronikos parametrų nustatymai)



- ☞ Nustatymus turėtų parinkti Jūsų platintojas, atlikdamas instruktažą.
 - System (Valdiklio informacija apie triukšų diagnostiką, padedanti platintojui)

- ☞ Exit (Grįžtama į važiavimo režimą)

Kai ši naudojimo instrukcija buvo atiduota spausdinti, Jūsų platintojas galėjo nustatyti meniu tekstus šiomis kalbomis:

- Vokiečių k.
- Anglų k.
- Prancūzų k.
- Italų k.
- Olandų k.
- Norvegų k. (Bokmål)
- Švedų k.
- Ispanų k.
- ☞ Savo platintojo teiraukitės, ar galima nustatyti ir kitas kalbas.

Nustatymo meniu atvėrimas

1. Paspauskite įspėjamojo švyturėlio (9) mygtuką ir laikykite apie 3 sekundes.
 - ☞ Palaukite, kol pasigirs trumpas garsinis signalas < beep >.
2. Atleiskite mygtuką (9).
 - ☞ Skystųjų kristalų ekrane rodomas nustatymo meniu [1].



Meniu valdymas

- ☞ Vairasvirtė atgal – perjungia ankstesnį meniu punktą / sumažina vertę / išjungia meniu punktą.
- ☞ Vairasvirtė pirmyn – perjungia kitą meniu punktą / padidina vertę / išjungia meniu punktą.
- ☞ Vairasvirtė dešinėn – perjungia antrinį meniu / rodo kitus duomenis.
- ☞ Vairasvirtė kairėn – jei rodoma į kairę nukreipta rodyklė, rodo kitus duomenis.



VAŽIAVIMO STABILUMO JUTIKLIS (ESP)

Prieš važiuojant ir važiuojant judančioje transporto priemonėje, reikia išaktyvinti ESP jutiklį. Tai atliekama specialiai tam parinkamoje važiavimo programoje.

Pasirenkamasis važiavimo stabilumo jutiklis (ESP) stabilizuoja nepageidaujamus važiavimo maneuvrus, tam tikromis aplinkybėmis galinčius atsirasti dėl nelygaus pagrindo. Pastebimai pagerėja Jūsų elektrinio neįgaliojo vežimėlio stabilumas ir vairavimo savybės.


Jei elektrinis neįgaliojo vežimėlis su ESP jutikliu važiuoja judančioje transporto priemonėje, pvz., laive, autobuse ar traukinyje, elektrinis neįgaliojo vežimėlis gali netikėtai pajudėti.

Išvažiavus iš transporto priemonės galima perjungti kitą važiavimo programą, kad būtų galima naudotis ESP jutiklio teikiama nauda.

Važiavimo stabilumo jutiklio aktyvinimas / išaktyvinimas

ESP jutiklio aktyvinimas arba išaktyvinimas priklauso nuo parinktos važiavimo programos (30).

- Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. *Važiavimo programa, 30* psl..
- Išaktyvinus ESP jutiklį, atsižvelgiant į modelį ir naudojamą įrangą, dėl saugumo gerokai sumažinamas ir elektrinio neįgaliojo vežimėlio važiavimo greitis.

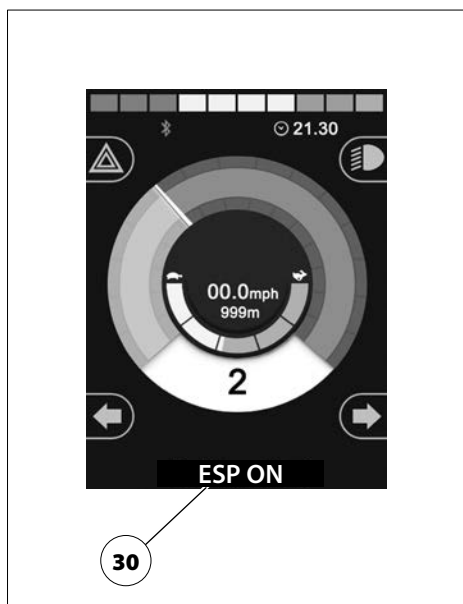

IŠORINĖS PRIJUNGIMO PARINKTYS

Prie valdymo modulio papildomai galima jungti išorines prijungiamąsias parinktis, pvz.:

- režimo mygtukas (1),
- įjungimo / išjungimo mygtukas (2).

Išorinio mygtuko prijungimas


Norėdami prijungti išorinį mygtuką, nuimkite uždaramąjį kamštelį ir stumkite kištuką iki galo į atitinkamą prijungimo lizdą (3)/(4) [5].

- ☞ Tai atlikdami laikykite kištuką vertikaliai prijungimo lizdui.

Išorinio mygtuko ištraukimas

Norėdami atjungti išorinį mygtuką, ištraukite atitinkamą kištuką iš prijungimo lizdo (3)/(4) [6] ir vėl uždėkite uždaramąjį kamštelį.

- ☞ Netraukite už laido!

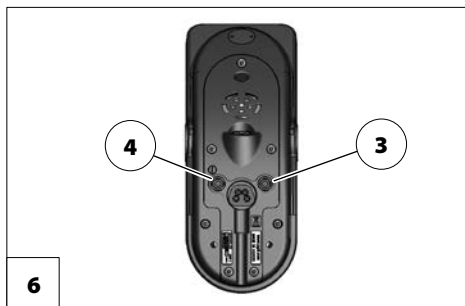



IR SĄSAJA

Atkreipkite dėmesį į atitinkamą išorinio įrenginio naudojimo instrukciją.

Išorinius prietaisus su IR sąsaja, pvz., TV prietaisą, galima valdyti valdymo moduliui.

IR sąsajos nuskaitymas

1. Atverkite IR meniu [2] iš meniu „Settings“ (Nustatymai) [1] [2].
2. Įjunkite funkciją „Learn Code“ [2] (Programuoti kodą) ir nuotoliniu atitinkamo įrenginio valdikliu nuskaitykite atitinkamą kodą.
3. Meniu IR MODE [3] atverkite nuskaityto įrenginio (pvz., TV 1) meniu [4].
4. Parinkite norimą funkciją [4].

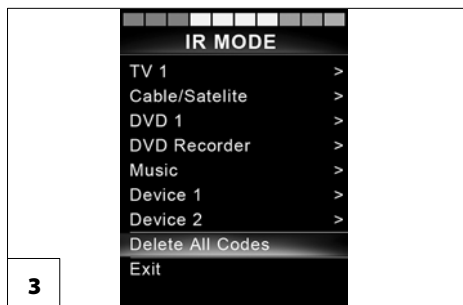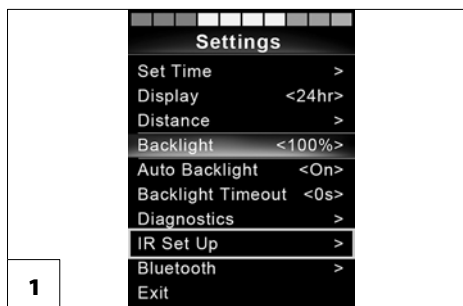


„BLUETOOTH“

Atkreipkite dėmesį į atitinkamą išorinio įrenginio naudojimo instrukciją.


„Bluetooth“ meniu rodomi visi per „Bluetooth“ susieti įrenginiai.

Išorinius įrenginius su „Bluetooth“ sąsaja, pvz., išmanųjį telefoną, galima valdyti valdymo moduliui.

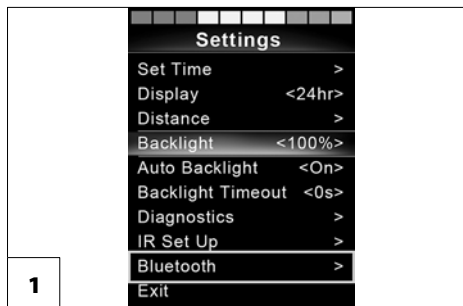

„Bluetooth“ įrenginių peržiūrėjimas

1. Atverkite „Bluetooth“ meniu [1] iš meniu „Settings“ (Nustatymai) [2].
2. Parinkite norimą įrenginį [2].

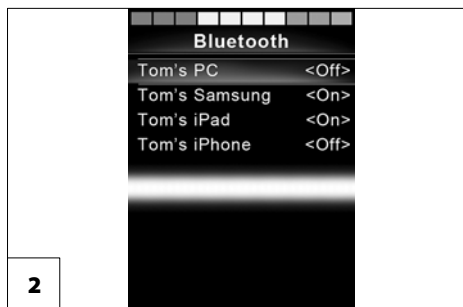

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA


Triktys ir informacija rodomi valdymo modulio skystųjų kristalų ekrano centre.

- (a) Rodo trikties vietą.
- (b) Rodo klaidos kodą.
- (c) Rodo trikties priežastį.

☞ Dėl saugumo laikinai sumažinta elektros galia.

Norėdami pašalinti klaidą, atlikite toliau aprašytus veiksmus:

1. Išjunkite valdymo modulį.
2. Atlikite skiltyje *Šalinimo būdas* nurodytą veiksmą.
3. Įjunkite valdymo modulį.

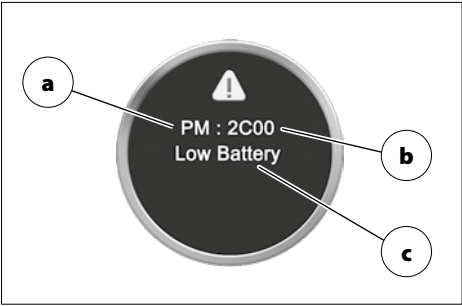

☞ Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. *Valdymo modulio įjungimas*, 15 psl..

☞ Jei nepavyksta pašalinti trikties ir toliau naudoti elektrinio neįgaliojo vežimėlio, kreipkitės į įgaliotas specializuotąsias dirbtuves ir nurodykite klaidos kodą.

Klaidos kodas	Priežastis	Šalinimo būdas
2C00	Išsikrovė akumuliatorius.	Nedelsdami įkraukite akumuliatorių ir prireikus patikrinkite akumuliatoriaus jungtis. ☞ Elektrinis neįgaliojo vežimėlis dar gali važiuoti.
3B00	Nutrūko jungtis su kairiuoju varikliu.	Patikrinkite variklio prijungimo laidą, kištuką ir variklį.
3D00	Sugedo elektros laidas, kuriuo prijungiamas kairysis variklis (trumpasis jungimas).	Patikrinkite variklio prijungimo laidą, kištuką ir variklį.
3C00	Nutrūko jungtis su dešiniu varikliu.	Patikrinkite variklio prijungimo laidą, kištuką ir variklį.

Klaidos kodas	Priežastis	Šalinimo būdas
3E00	Sugedo elektros laidas, kuriuo prijungiamas dešinysis variklis (trumpasis jungimas).	Patikrinkite variklio prijungimo laidą, kištuką ir variklį.
1E01	Aktyvi važiavimo blokuotė.	Ištraukite įkroviklį iš akumulatoriaus lizdo.
2F00	Sistemos arba vairasvirtės klaida.	Vykstant įjungimo etapui nelieskite vairasvirtės.
0E00, 0E02, 1200, 1202	Vairasvirtės klaida	Pakeiskite valdymo modulį.
7A0C, 7A0E, 7A90	Ribojama reguliavimo pavaros el. srovė. – Mechanškai sunkiai juda reguliavimo pavara – Mechaninė perkrova	Naudodami kelis reguliatorius patikrinkite, kuris iš jų neveikia, ir patikrinkite neveikiančio reguliatoriaus laido jungtį.
1505	Kairiojo variklio magnetinio stabdžio triktis.	Važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtį nustatykite į važiavimo režimo padėtį.
1506	Dešiniojo variklio magnetinio stabdžio triktis.	Važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtį nustatykite į važiavimo režimo padėtį.
1600	Per aukšta akumulatoriaus įtampa (važiuojant nuokalne).	Nuo kalno važiuokite labai lėtai ir prireikus patikrinkite akumulatoriaus jungtis.
9710 / 7B02	Gali būti sugedęs ESP jutiklis.	Paveskite patikrinti ESP jutiklį.  Elektrinis neįgaliojo vežimėlis dar gali važiuoti, tačiau daug mažesniu greičiu.
Nepateikti klaidų kodai	Įvairios priežastys	Išjunkite ir vėl įjunkite elektroninį neįgaliojo vežimėlį.

Informacija	Priežastis	Šalinimo būdas
	Ijungtas imobilizatorius.	Išjunkite imobilizatorių.  Apie tai žr. skyrių skaitykite sk. <i>Imobilizatorius</i> , 16 psl..
	Per anksti pakreipta vairasvirtė.	Atleiskite vairasvirtę.
 Geltonas simbolis	Aktyvus automatinis greičio ribojimas.	Patraukite elektrinį reguliatorių į pagrindinę padėtį.  Elektrinis neįgaliojo vežimėlis gali važiuoti.
 Raudonas simbolis	Elektrinis neįgaliojo vežimėlis automatiškai sustabdytas.	Nustatykite elektrinio reguliatoriaus pagrindinę padėtį arba parinkties svirtį „Važiuoti / stumti“ perjunkite į važiavimo padėtį.  Elektrinis neįgaliojo vežimėlis neparengtas važiuoti.

PROFILAKTINĖ PRIEŽIŪRA

Remontas

Norėdami atlikti remonto darbus, galite pasitikėti vietoje dirbančiu platintoju ir kreiptis į jį. Jis yra instrukuotas, kaip atlikti šiuos darbus, ir turi išmokyti darbuotojų.

Priežiūra

Jei Jums kiltų klausimų arba prireiktų pagalbos, kreipkitės į savo platintoją. Jis pakonsultuos, atliks priežiūros ir remonto darbus.

Saugos kontrolės

Eksploatuojant elektroninę sistemą nuolat vykdo kontrolę. Šios elektroninės saugos priemonės turi būti papildytos naudotojo atliekamomis reguliariomis kontrolėmis. Jei atliekant vieną iš kontrolių aptinkama pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į platintoją, kad jis patikrintų elektrinį neįgaliojo vežimėlį.

Kasdienė kontrolė

Patikrinkite, ar nesimato valdymo modulio ir prijungtų elektroninių komponentų išorinių pažeidimų, ar elektrinis neįgaliojo vežimėlis tinkamai sutvirtintas.

Išjungę valdymo modulį patikrinkite, ar nėra vairasvirtės ir po ja esančio manžeto išorinių pažeidimų, ar vairasvirtė iš visų padėčių automatiškai ir lengvai grįžta į vidurinę padėtį.

Kontrolė kas savaitę

Vairasvirtės funkcija su magnetinio stabdžio sistema: prieš šią kontrolę pasirūpinkite, kad aplink elektrinį neįgaliojo vežimėlį būtų mažiausiai 1 metras laisvos vietos.

Ijunkite valdymo modulį ir palaukite, kol įsižiebs akumuliatoriaus indikatorius parodys, kad parengta eksploatuoti. Dabar atsargiai lenkite vairasvirtę į priekį, kol išgirsite, kad stabdžių sistema sureagavo (spragsėjimas). Elektrinis neįgaliojo vežimėlis lėtai pajuda iš vietos. Iš karto vėl atleiskite vairasvirtę. Dabar per kelias sekundes turite išgirsti, kaip stabdžių sistema vėl įsijungia. Taip patikrinkite važiavimo dešinien, kairien ir atgal kryptis.

Patikrinkite visus laidus ir kištukus, ar nėra išorinių pažeidimų ir ar jie tinkamai pritvirtinti.

Kontrolė kasmet

Kasmet atlikdami elektrinio neįgaliojo vežimėlio techninę priežiūrą, paveskite platintojui patikrinti ir elektroninę sistemą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Klimatiniai duomenys

Aplinkos temperatūra	nuo -25 °C iki +50 °C
Laikymo temperatūra	nuo -40 °C iki +65 °C
Apsaugos klasė	IP54

ATSAKOMYBĖ UŽ TRŪKUMUS / GARANTIJA

Nesilaikant naudojimo instrukcijos, netinkamai atliekant techninės priežiūros darbus bei be mūsų sutikimo atlikus techninių pakeitimų ir patobulinimų (primontavus dalis) netenkama teisės teikti pretenzijas dėl atsakomybės už gaminio trūkumus bei reikalauti garantijos suteikimo.

Remdamiesi mūsų Bendrosiomis sandorių sudarymo sąlygomis mes prisiimame atsakomybę už šio gaminio trūkumus ir prireikus suteikiame nurodytą bei sutartą garantiją. Norėdami pateikti pretenziją dėl atsakomybės už trūkumus arba garantijos suteikimo, kreipkitės į savo platintoją ir pateikite jam šį ATSAKOMYBĖS UŽ TRŪKUMUS / GARANTIJOS SUTEIKIMO SKIRSNĮ bei nurodykite reikiamus duomenis – modelio pavadinimą, važtaraščio Nr., pristatymo datą ir serijos numerį (SN).

Serijos numeris (SN) nurodytas identifikacinėje plokštelėje.

-  Daugiau garantijos suteikimo sąlygų rasite elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimo instrukcijoje.



Šis gaminys kartu su elektriniu neįgaliojo vežimėliu atitinka EB direktyvą 93/42/EEB ir po 2021-05-25 įsigaliojusius reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos produktų reikalavimus.

Atsakomybės už trūkumus / garantijos skirsnis

Užpildykite! Jei reikia, nukopijuokite ir nusiųskite kopiją savo platintojui.

Atsakomybė už trūkumus / garantija

Modelio pavadinimas:

Važtaraščio Nr.:

SN (žr. identifikacinę plokštelę):

Pristatymo data:

Platintojo spaudas:

Gamintojas:

Curtiss-Wright
Enterprise Way
Aviation Park West
Bournemouth Airport
BOURNEMOUTH
Dorset BH23 6HH
UNITED KINGDOM

Platintojas:

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
VOKIETIJA



Tel. +49 5733 922 - 311
Faks. +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de